

VITAVM[®]9 for VITABLOCS[®] Programma di cottura

	Prees. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.
Cottura di fissaggio colori di caratterizzazione VITA AKZENT Plus	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-
1° Cottura d'individualizzazione con VITA VM 9	500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49
2° Cottura d'individualizzazione con VITA VM 9	500	6.00	7.38	55	920	1.00	7.38
Cottura finale VITA AKZENT Plus VITA AKZENT Plus Glaze, VITA AKZENT Plus Glaze Spray, VITA AKZENT Plus finishing agent	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-
Cottura finale VITA GLAZE LT Powder	500	4.00	3.30	80	780	1.00	-
Cottura finale VITA GLAZE LT Paste	500	6.00	3.30	80	780	1.00	-
Cottura de correzione con VITA VM 9 COR	500	4.00	4.40	60	780	1.00	4.40

Nelle ceramiche dentali il risultato della cottura dipende in larga misura dai cicli di cottura individuali, ed in particolare dal tipo di forno, dalla posizione della termosonda, del supporto di cottura e dalle dimensioni del lavoro. Le nostre raccomandazioni tecnico-applicative per le temperature di cottura (indipendentemente dall'essere date in forma orale, scritta o durante dimostrazioni pratiche) si basano su numerose esperienze e prove proprie. Ciononostante tali dati devono essere considerati solo indicativi dall'utilizzatore. Se superficie, trasparenza, grado di lucentezza non corrispondessero ai risultati ottenibili in condizioni ottimali, adattare il ciclo di cottura. Per valutare il grado di cottura non è decisiva la temperatura indicata dal forno, ma bensì l'aspetto e la struttura superficiale del lavoro dopo la cottura.

VITA shade, VITA made.

VITA