





Brenntabellen VITA In-Ceram im VITA INCERAMAT 3T

VITA In-Ceram ALUMINA



VITA In-Ceram ALUMINA Kronengerüste *Schlickertechnik*

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Sinterbrand	4	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
Glasinfiltrationsbrand	5	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00



VITA In-Ceram ALUMINA Brückengerüste *Schlickertechnik*

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Sinterbrand	4	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
Glasinfiltrationsbrand	6	0:03	200	0:00	0:30	1110	6:00



VITA In-Ceram ALUMINA Kronengerüste *Schleiftechnik*

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Glasinfiltrationsbrand	7	0:03	200	0:00	0:30	1140	1:00

VITA In-Ceram ALUMINA Brückengerüste *Schleiftechnik*

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Glasinfiltrationsbrand	8	0:03	200	0:00	0:30	1140	2:00

VITA In-Ceram ALUMINA *sprint Technik*

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Sinterbrand	12	0:03	120	0:00	0:30	1120	2:00
Glasinfiltrationsbrand	13	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00





VITA



Brenntabellen VITA In-Ceram im VITA INCERAMAT 3T

VITA In-Ceram SPINELL

VITA In-Ceram SPINELL Inlay- Onlaygerüste



	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Sinterbrand	1	0:03	120	0:00	2:00	1180	2:00

VITA In-Ceram SPINELL Kronengerüste



	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
1. Sinterbrand	2	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
2. Sinterbrand	3	0:03	120	0:00	1:00	1180	2:00

VITA In-Ceram ZIRCONIA



VITA In-Ceram ZIRCONIA Schlickertechnik

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
1. Sinterbrand	9	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
2. Sinterbrand	3	0:03	120	0:00	1:00	1180	2:00
Glasinfiltrationsbrand	11	0:03	200	0:00	0:50	1140	2:30

VITA In-Ceram ZIRCONIA Schleiftechnik

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Glasinfiltrationsbrand	11	0:03	200	0:00	0:50	1140	2:30

VITA In-Ceram ZIRCONIA sprint Technik

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Zeit 1	 2	Temp 2	Zeit 2
Sinterbrand	10	0:03	120	0:00	0:30	1180	2:00
Glasinfiltrationsbrand	13	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00



VITA