

VITA VM 13 im Dekema Austromat 3001

(langsame Abkühlung)

NAME	BRENNPROGRAMME - EINTRAGSREIHE
Washbrand Pulver	C500 T60 T60.L9 V9 T075.C890 V0 T120 C0 L0 T2 C500
Washbrand Paste	C500 T180 T120.L9 V9 T075.C890 V0 T120 C0 L0 T2 C500
Washbrand Pulver NEM	C500 T60 T60.L9 V9 T075.C940 V0 T120 C0 L0 T2 C500
Washbrand Paste NEM	C500 T120 T120.L9 V9 T075.C940 V0 T120 C0 L0 T2 C500
Pulveropaker NEM	C500 T60 T60.L9 V9 T075.C920 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Pastenopaker NEM	C500 T120 T120.L9 V9 T075.C920 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Grundmasse Pulver	C500 T60 T60.L9 V9 T075.C890 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Grundmasse Paste	C500 T180 T120.L9 V9 T075.C890 V0 T60 C0 L0 T2 C500
MARGIN Brand	C500 T180 T120.L9 T60 V9 T055.C890 V0 T120 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
EFFECT LINER Brand	C500 T180 T120.L9 T60 V9 T055.C890 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
1.Dentinbrand	C500 T240 T120.L9 V9 T055.C880 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
2. Dentinbrand	C500 T240 T120.L9 V9 T055.C870 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
Glanz mit Glasur	C500 T120 T120.L9 T080.C880 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
Glanz	C500 T60 T60.L9 T080.C880 T120 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500
Korrekturbrand mit COR	C500 T120 T120.L9 V9 T050.C800 V0 T60 C0 L7 T300.C500 L0 T2 C500

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.