

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS

Resultados brilhantes e fiéis à cor. Sempre.



VITA Determinação de Cor

VITA Comunicação de Cor

VITA Reprodução de Cor

VITA Controle de Cor

Versão 03.20



VITA – perfect match.

VITA

A close-up, soft-focus photograph of a woman's face, smiling warmly. Her eyes are light-colored and looking slightly to the right. She has dark hair pulled back. The background is a bright, out-of-focus white. The overall mood is positive and professional.

CONCEITO E VANTAGENS

VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS é um sistema de prensagem altamente estético para resultados vibrantes e naturais. Além de uma ótima fidelidade à cor e excelente dinâmica de luz, a cerâmica de prensagem se destaca por seu processamento eficiente.



▶ VITA AMBRIA –
Brilhante. Fiel à cor Adequação perfeita.



VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS – NATURAL, FIEL À COR, DE CONFIANÇA



VITA AMBRIA –
Sistema de prensagem
para resultados estéticos
e duradouros.



O quê?

- Sistema cerâmico de prensagem de dissilicato de lítio reforçado com dióxido de zircônio para resultados altamente estéticos e duradouros por meio de processamento eficiente

Para quê?

- Para a produção de reconstruções delicadas, como facetas, inlays/onlays, bem como coroas totais/parciais e pontes de três elementos altamente estéticas até o 2.º pré-molar

Com o quê?

- O sistema cerâmico de prensagem compreende pastilhas de cerâmica de prensagem em dois níveis de translucidez (T/HT) e dois tamanhos (S, L), sistema de mufla, massa de revestimento e líquido, bem como êmbulos de prensagem



O SISTEMA DE PRENSAGEM COM COMPONENTES ADEQUADOS



VITA AMBRIA®

- Para um processamento consistentemente eficiente e confiável, existem componentes de sistema perfeitamente compatíveis para cada etapa, desde a integração do sistema, passando pela prensagem até o recobrimento.



DETERMINAÇÃO DA COR



MODELAGEM



INCLUIR



PRENSAGEM



RECOBRIMENTO*



COLORAÇÃO



POLIR



VITA AMBRIA –
Eficiência com sistema.

*) Etapa opcional do processo: não é necessária para restaurações monolíticas.

AS VANTAGENS



▶ VITA AMBRIA –
Esteticamente fascinante,
de confiança e adequação
perfeita.

Brilhante

- Reprodução brilhante e multifacetada do jogo de cor e luz graças ao material e sua translucência, opalescência e fluorescência próximas ao natural.

Fiel à cor


- Reproduza as cores dos dentes de forma confiável graças às pastilhas de prensagem com excelente fidelidade de cores e componentes de sistema perfeitamente harmonizados

Eficiente

- Alcance de maneira eficiente, resultados de prensagem sob medida através de camada de reação minimizada graças à harmonização ideal do material e à massa de revestimento

Duradouro

- Restaurações altamente duradouras graças à cerâmica de dissilicato de lítio reforçada com dióxido de zircônio de altíssima resistência (> 550 MPa)

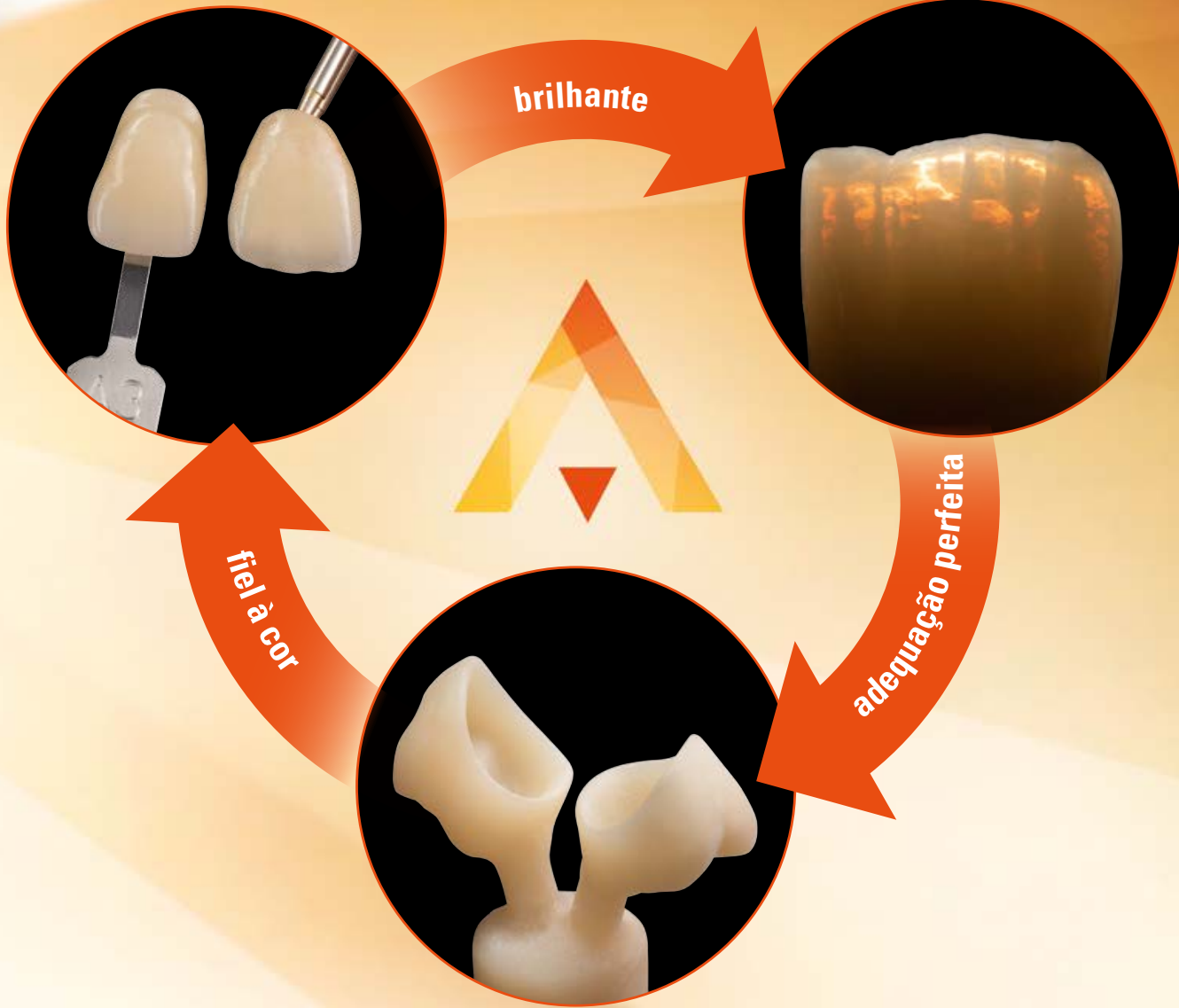

EXCELENTE DINÂMICA DE LUZ PARA RESTAURAÇÕES ALTAMENTE ESTÉTICAS

VITA AMBRIA –
Para um jogo de cores e
luz multifacetado.



VITA AMBRIA®

- conta com uma translucidez natural para a melhor transmissão de luz
- possui opalescência integrada para um jogo de cores brilhante
- proporciona uma autofluorescência próxima ao natural para um excelente jogo de luz



▶ melhor transmissão de luz



▶ jogo de luz brilhante




▶ fluorescência próxima ao natural



REPRODUÇÃO CONFIÁVEL E EFICIENTE DAS CORES DOS DENTES



◀ **VITA AMBRIA – perfect match.**
Reprodução de cor confiável graças às pastilhas de prensagem com a melhor confiabilidade de cor.

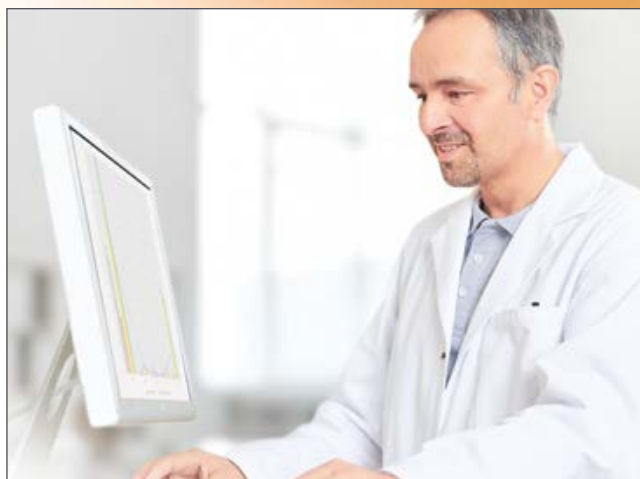

Receita de cor precisa

- Graças aos métodos metrológicos de alta precisão, uma fidelidade de cores muito alta é alcançada durante o desenvolvimento e a produção das pastilhas de prensagem VITA AMBRIA.



Determinação precisa da cor

- Com os sistemas de determinação de cores visual e digital da VITA Zahnfabrik, é possível determinar as cores dos dentes com alta precisão.



Reprodução precisa da cor

- Informações precisas sobre a cor dos dentes e pastilhas de prensagem altamente fiéis às cores permitem a reprodução de cores eficiente e confiável.

RESULTADOS PERFEITAMENTE ADEQUADOS E EFICIENTES



Cerâmica de prensagem VITA AMBRIA

VITA AMBRIA®

- Possibilita resultados de prensagem de adequação perfeita por meio de uma camada de reação minimizada, pois o material e a massa de revestimento são harmonizados de maneira ideal
- Permite uma finalização eficiente, uma vez que a camada de reação mínima pode ser decapada com rapidez e facilidade sem necessidade de tratamento posterior com banho de ácido



Massa de revestimento e líquido VITA AMBRIA



Massas de revestimento harmonizadas
Sem camada de reação



Massa de revestimento convencional
Com camada de reação




ESTABILIDADE E POLIBILIDADE EXCEPCIONAIS

1. Resistência altíssima para uma estabilidade excelente



Resistência biaxial

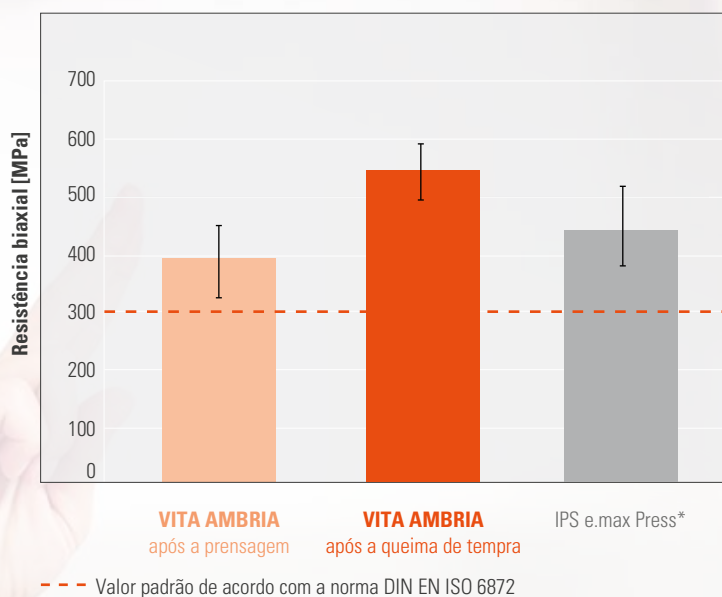

Fonte: Pesquisa interna, VITA P&D, Medição da resistência biaxial do materiais mencionados em correspondência à norma ISO 6872 (com geometria de ensaio modificada), (Gödikler, 1/2019, [1] consulte o verso do folheto)

*) Nível de resistência após o processo de prensagem. Uma queima de tempra não é especificada pelo fabricante.


VITA AMBRIA®

- Graças à sua altíssima resistência, é possível contar com uma excelente estabilidade clínica a longo prazo
- Alcança com uma força biaxial de, em média, > 550 MPa (após a queima de tempra) um nível de resistência acima dos requisitos padrão

2. Polibilidade eficiente para um excelente brilho



1. Processamento com diamante

Superfície após o tratamento com fresa diamantada

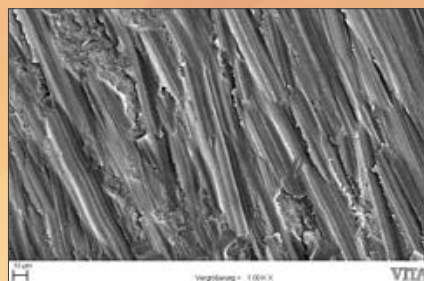

2. Polimento grosso

Superfície após o tratamento com polidor grosso

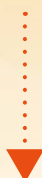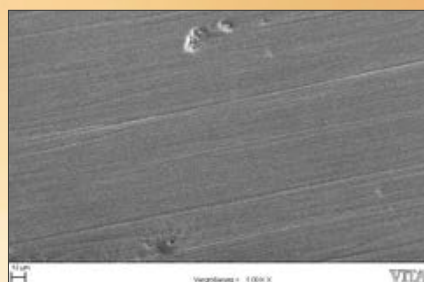

3. Polimento fino

Superfície após o tratamento com polidor fino



VITA AMBRIA –
Obtenção de alto brilho
com rapidez e eficiência.

Fonte: Pesquisa interna, VITA P&D, Imagens MEV da superfície tratada da amostra de VITA AMBRIA, imagem aumentada 1.000 vezes (Gódiiker, 8/2019 [1], consulte o verso do folheto)

VITA AMBRIA®

- Graças a uma microestrutura homogênea, permite um polimento altamente eficiente com alto brilho
- Apresenta superfícies homogêneas e lisas, sem defeitos, após três etapas de tratamento (tratamento de diamante, polimento grosso e fino)



A man with a beard, wearing an orange polo shirt, is looking towards a woman on the right. The woman is wearing a yellow top and has a pearl earring. They appear to be in a close, intimate conversation. The background is bright and out of focus.

SISTEMA E COMPONENTES

As pastilhas de prensagem **VITA AMBRIA®** estão disponíveis em diferentes variantes e cores. Além disso, conta com inúmeros componentes de sistema harmonizados entre si. Conheça agora mesmo a gama completa de materiais disponíveis.



SYSTEMKOMPONENTEN

Einbetten
VITA-AUSBAU INVEST-F
VITA-AUSBAU-ADAPTSYSTEM

Präsen
VITA-ALZINAT DRUM
VITA-AUSBAU-PLUNGER


Polieren
VITA-SPIRIT
Polierinstrumente

Verblenden
VITA-LUMEX-AC

Bemalen/Glasieren
VITA-ACCENT PLUS

RESUMO DAS VARIANTES, GEOMETRIAS E CORES

VITA AMBRIA Variantes/Cores

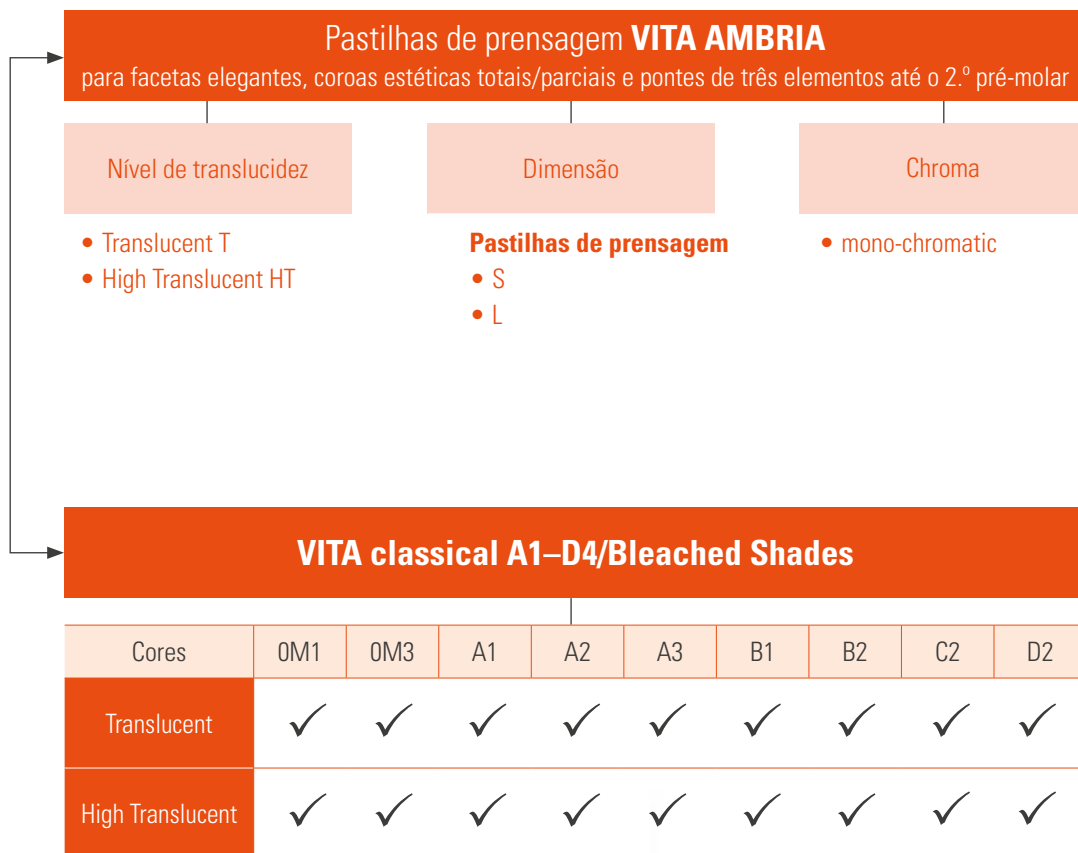

COMPONENTES DE Prensagem HARMONIZADOS



Massa de revestimento/Líquido

Massa de revestimento e líquido idealmente harmonizados para as pastilhas de prensagem VITA AMBRIA, à base de fosfato e com capacidade de velocidade para um controle de expansão e fluidez exatos.

VITA AMBRIA INVEST

- VITA AMBRIA INVEST P: disponível como pacote de 50 x 100 g
- VITA AMBRIA INVEST F: disponível como frasco de 1 litro



Sistema de mufla

Anel e base de mufla transparentes em forma de cone, para colocação e remoção fácil de objetos; adequado para todas as unidades de prensagem convencionais.

- VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM: disponível como sistema de mufla de 100 g e 200 g



Êmbolo de prensagem

Êmbolo de prensagem descartável para um manuseio fácil, sem jateamento e pré-aquecimento demorados.


- VITA AMBRIA PLUNGER: disponível como pacote de 50 unidade (diâmetro de 13 mm)

COMPONENTES DE SISTEMA DISPONÍVEIS




Incluir

VITA AMBRIA INVEST P + F
VITA AMBRIA MUFFEL SYSTEM

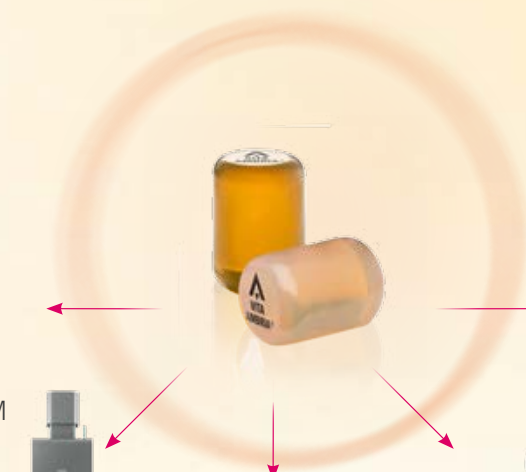


Pigmentar/Aplicar glaze
VITA AKZENT PLUS.

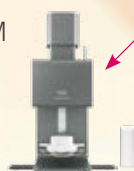

Prensagem

VITA VACUMAT 6000 MP
VITA AMBRIA PLUNGER

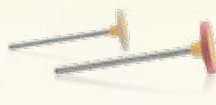

Polir

Instrumentos de polimento
VITA SUPRINITY



Recobrir

VITA LUMEX AC

AS MELHORES SOLUÇÕES NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO



*) Opcional: o recobrimento com VITA Lumex AC é uma etapa do processo opcional e não é necessária para o conceito de restauração monolítico.

TEREMOS O PRAZER DE AJUDAR VOCÊ

Mais informações sobre os produtos e processamentos, você também encontra em www.vita-zahnfabrik.com



Hotline do suporte de vendas

Para saber o status de pedidos, tirar dúvidas sobre entregas, bem como obter informações sobre produtos e materiais promocionais, a Sra. Carmen Holsten e sua equipe de suporte ao cliente estarão a sua disposição.

► Fone +49 (0) 7761 / 56 28 84
Fax +49 (0) 7761 / 56 22 99
8:00 às 17:00 CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com



Serviço de apoio técnico ao consumidor

Para questões técnicas sobre as soluções de produtos VITA, você pode contatar nosso consultor técnico Ralf Mehlin ou Daniel Schneider.

► Fone +49 (0) 7761 / 56 22 22
Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46
8:00 às 17:00 CET
E-mail info@vita-zahnfabrik.com




Mais informações sobre o VITA AMBRIA você encontra em www.vita-zahnfabrik.com/ambria

1. Referências

1. Pesquisas Internas, VITA P&D:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Eng. Michael Gödiker, Chefe de Projeto P&D, Bad Säckingen

Para dados de testes detalhados, consulte a Documentação Técnico-científica
VITA AMBRIA® PRESS SOLUTIONS
Download no site www.vita-zahnfabrik.com/ambria

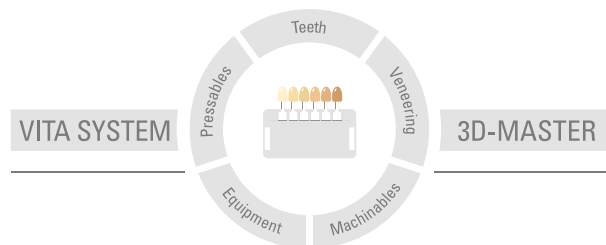

Nota importante: Nossos produtos devem ser utilizados de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 03.20

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação deste manual de instruções. A respectiva versão atualizada e vigente encontra-se em www.vita-zahnfabrik.com

A VITA Zahnfabrik é certificada e os seguintes produtos levam o selo **CE 0124** :

VITA AMBRIA®

Neste documento os produtos/sistemas mencionados de outros fabricantes são marcas registradas dos respectivos fabricantes.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik