

> VITA Easyshade® V

Quick Start Guide



1.



CZ – Před použitím nechte přístroj 12 hodin nabíjet.

PL – Przed użyciem naładuj baterię urządzenia przez min. 12 godzin.

HU – Használat előtt töltsse a készüléket 12 órán át.

BG – Преди употреба зареждайте уреда в продължение на 12 часа.

RO – Încărcăți aparatul timp de 12 ore înainte de utilizare.

SA – اشحن الوحدة لمدة 12 ساعة قبل الاستخدام

RS/HR – Pre upotrebe uređaj punite 12 sati.

2.
Optional



CZ – Měřicí hrot vsuňte do ochranného krytu.

PL – Nałóż osłonkę ochronną na końcówkę pomiarową.

HU – Helyezze a védőkupakot a mérőfejre.

BG – Поставете защитната капачка върху измервателния връх.

RO – Acoperiți vârful de măsurare cu o folie de protecție.

SA – ضع غطاء الحماية البلاستيكي على رأس جهاز قاريء اللون

RS/HR – Postavite zaštitnu kapu na mernu sondu.



3.



CZ – Zapněte tlačítkem měření.

PL – Naciśnij przycisk pomiaru.

HU – Bekapcsolás Mérés gombbal.

BG – Включете с бутона за измерване.

RO – Porniți aparatul acționând butonul de măsurare.

SA – شغل الوحدة بالضغط على زر القياس

RS/HR – Uključite putem tastera za merenje.

4.



CZ – VITA Easyshade® V položte na základní jednotku a stiskněte tlačítko pro kalibraci.

PL – Końcówkę urządzenia VITA Easyshade® V włóż do portu kalibracyjnego i naciśnij przycisk kalibracji.

HU – Helyezze VITA Easyshade® V-t a bázisegységre, és kalibrálásához nyomja meg a Mérés gombot.

BG – Сложете VITA Easyshade® V на базовата станция и активирайте измервателния бутон за калибриране.

RO – Așezați VITA Easyshade® V pe unitatea de bază. Acțioñând butonul de măsurare începeți calibrarea.

SA – بالجهاز الأولية المعايرة لتفعيل القياس زر اضغط القاعدة على الجهاز بوضع وذلك

RS/HR – VITA EASYSHADE® V postavite na baznu stanicu i pritisnite taster za merenje radi kalibracije.

5.



CZ – Dotykiem vyberte určení základní barvy.

PL – Wybierz opcję doboru koloru podstawowego na ekranie dotykowym.

HU – Megérintve jelölje ki az Alapszín meghatározása opciót.

BG – С докосване изберете Определяне на основен цвят.

RO – Selectați și confirmați prin atingere modul „alegerea culorii de bază”.

SA – نختار و نؤكد قياس اللون الأساسي باللمس

RS/HR – Određivanje osnovne boje obavite dodirrom.

6.



CZ – Pro změření středu dentinu stiskněte tlačítko měření.

PL – Ustaw końcówkę sondy w centralnej części zęba i naciśnij przycisk pomiaru.

HU – Mérés a dentin centrumában a Mérés gomb megnyomásával.

BG – Измерете в центъра на дентина, като натиснете бутона за измерване.

RO – Pentru măsuraea centrului dentinei apăsați butonul de măsurare.

SA – اضغط زر قياس اللون لتحديد لون السن

RS/HR – Merite u centru dentina pritiskom na taster za merenje.

7.



CZ – Zobrazí se barva zuba.

PL – Odczytaj kolor zęba.

HU – Fogszín leolvasása.

BG – Отчетете цвета на зъба.

RO – Citiți culoarea dintelui.

SA – اقرأ درجة لون السن

RS/HR – Očitajte boju zuba.



VITA