

VITAVM®LC flow

Guida rapida all'uso



Composito di rivestimento fotopolimerizzabile,
a bassa viscosità per riabilitazioni dentali fisse e mobili.

VITA – perfect match.

VITA

> Fatti & Caratteristiche



VITAVM[®]LC flow:

- Composito di rivestimento fotopolimerizzabile, a bassa viscosità per riabilitazioni dentali fisse e mobili

VITAVM[®]LC flow offre:

- modellazione precisa grazie alla consistenza tissotropica, che assicura una fluidità ottimale e nel contempo un'elevata stabilità
- risultati vitali secondo il modello naturale
- elevata resistenza

Per quali settori?

- Rivestimento di corone, ponti, corone telescopiche e sovrastrutture su impianti
- Inlay, faccette
- Individualizzazione di denti in resina VITA
- Ricostruzione di parti gengivali

Per quali materiali?

- Leghe dentali, ceramica ibrida, biossido di zirconio, compositi CAD/CAM, PEEK, denti protesici in polimero/composito



Avvertenze per la polimerizzazione

VITA ha testato i più diffusi fotopolimerizzatori in commercio in combinazione con VITA VM LC. Per tempi e avvertenze sulla polimerizzazione consultare www.vita-zahnfabrik.com oder hier:



> 1. Operazioni preliminari

► Condizionamento della struttura



1

💡 Informazioni per la lavorazione:

- Sabbiare la superficie metallica, pulire a secco
- Applicare VITA VM LC PRIMER I, lasciare asciugare / attendere il tempo di azione prescritto.
- Applicare VITA VM LC PRIMER II con un pennellino monouso
- Lasciare libere le aree marginali

⚠️ Attenzione:

- Utilizzare VITA VM LC PRIMER I e II in conformità con le istruzioni dopodiché applicare direttamente PRE OPAQUE
-

> 2. Lavorazione OPAQUE PASTE

▶ Lavorazione OPAQUE PASTE



1



2



3

! Informazioni per la lavorazione:

OPAQUE PASTE

- applicare un primo strato sottile di opaco in pasta con un pennellino monouso e polimerizzare
- applicare un secondo strato con un pennellino monouso e polimerizzare
- se il metallo non risultasse ancora ricoperto, applicare un terzo strato sottile e polimerizzare

! Attenzione:

- dopo la polimerizzazione dell'opaco, applicare direttamente le masse flow
- in alternativa proteggere la struttura da polvere e umidità

> 3. Stratificazione DENTINE

▶ Stratificazione BASE DENTINE



1



2

💡 Informazioni per la lavorazione:

Stratificazione DENTINE

- in estrema carenza di spazio o denti cromatici si raccomanda l'uso delle masse CHROMA PLUS nell'area cervicale o su tutta la superficie
- stratificare BASE DENTINE in forma anatomica ridotta
- fissare con una breve polimerizzazione

⚠ Attenzione:

- in alternativa stratificare in forma completamente anatomica, eseguire una polimerizzazione intermedia e quindi il cut-back con una fresa in metallo duro a taglio incrociato fine

> 4. Stratificazione ENAMEL

▶ Stratificazione ENAMEL



1



2

! Informazioni per la lavorazione:

Stratificazione ENAMEL

- Completare la forma del dente con ENAMEL
- fissare con una breve polimerizzazione
- Applicare VITA VM LC GEL in strato coprente, spessore max. 2 mm, direttamente dalla siringa o con uno strumento
- Polimerizzazione finale

> 5. Finalizzazione

➤ Finitura e lucidatura



1



2



3

⚠ Informazioni per la lavorazione:

Finalizzazione


- per la finitura usare frese in metallo duro a taglio incrociato fine
- Prelucidare con un idoneo gommino al silicone, ad es. quello del VITA ENAMIC Polishing Set technical, e uno spazzolino in pelo di capra
- Per la lucidatura a specchio utilizzare VITA Polish Hybrid con un mufloncino di lana/pelle

⚠ Attenzione:

- si raccomanda di lavare la riabilitazione sotto acqua corrente usando poco detergente ed uno spazzolino da denti morbido o semiduro

> Concetto di stratificazione

▶ Esempio: Concetto di stratificazione

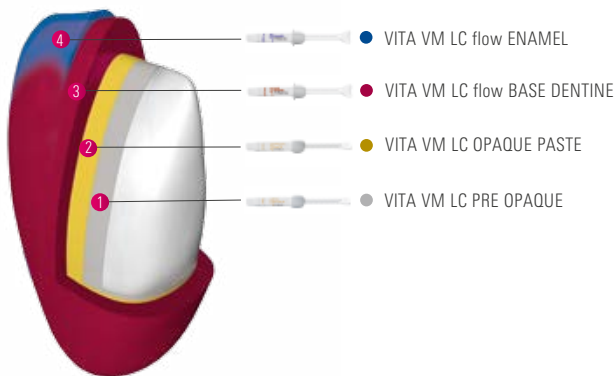

💡 Avvertenza:

- Masse VITA VM LC PRE OPAQUE e OPAQUE PASTE per il mascheramento delle strutture
- Masse VITA VM LC flow BASE DENTINE per l'area cervicale e del corpo
- Masse VITA VM LC flow ENAMEL per l'area incisale

> Schema di stratificazione

➤ Esempio di una stratificazione standard

Operazioni
preliminari



Lavorazione
OPAQUE PASTE



Stratificazione
BASE DENTINE



Stratificazione
ENAMEL



Finalizzazione



Risultato finale



> Hotline e supporto



Siamo a vostra disposizione

▶ Hotline tecnica

Domande sulle soluzioni di prodotto VITA?

Gli odontotecnici e i consulenti tecnici esperti

vi rispondono:

Tel. +49 (0) 7761 / 56 22 22

Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46

8.00 - 17.00

E-mail info@vita-zahnfabrik.com

Per altri contatti internazionali consultarem

www.vita-zahnfabrik.com/contacts

▶ Supporto online

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto? Risposte competenti online in forma di FAQ, video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso complete VITA VM LC flow.

www.vita-zahnfabrik.com

www.facebook.com/vita.zahnfabrik



Rx Only

CE 0124

104051_0424_V03



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

VITA – perfect match.

VITA