


Brenntabelle VM 9 im Austromat

NAME	START		↑	→	VAC LEVEL	°C ↗ Min.	END	→ min. sec.	(V)	↘ 1	2 ↘
Reinigungsbrand	500	2	1	0	0	30	700	5:00		0	0
Therm. Vorbehandlung	500	2	2	0	0	70	1000	15:00		0	0
Washbrand	500	2	1	0	9	50	950	1:00		0	0
MARGIN Brand	500	3	3	0	9	50	960	1:00		0	0
EFFECT LINER	500	3	3	0	9	50	930	1:00		0	0
1. Dentinbrand	500	3	3	0	9	50	910	1:00		0	5
2. Dentinbrand	500	3	3	0	9	50	900	1:00		0	5
Glanzbrand	500	2	2	0	0	60	900	1:00		0	5
Corrective Brand	500	2	2	0	9	60	760	1:00		0	5

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.