

VITA VM 9 auf VITABLOCS Mark II im Dekema Austromat 3001

NAME	BRENNPROGRAMME - EINTRAGSREIHE
Malfarben Fixierbrand	C500 T120 T120. L9 T080.C880 T60 C0 L0 T2 C500
Glanzbrand mit Glasur	C500 T120 T120. L9 T080.C950 T60 C0 L0 T2 C500
Individualisieren mit VM9	
1.Dentinbrand	C500 T120 T120. L9 T120 V9 T055.C930 V0 T60 C0 L0 T2 C500
2. Dentinbrand	C500 T120 T120. L9 T120 V9 T055.C920 V0 T60 C0 L0 T2 C500
Glanzbrand mit Glasur	C500 T120 T120. L9 T080.C920 T60 C0 L0 T2 C500

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.