

VITA SMART.FIRE

Instructions pour effectuer une mise à jour du logiciel



Chère utilisatrice VITA SMART.FIRE,
cher utilisateur VITA SMART.FIRE,

nous vous informons de la nouvelle mise à jour du logiciel de votre VITA SMART.FIRE et vous invitons à mettre à jour le logiciel sur votre appareil en suivant les instructions ci-dessous.

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous nous tenons à votre disposition aux coordonnées suivantes :

Tél. : 0049 77 61 / 562 – 101, -105 ou -106

Fax : 0049 77 61 / 562 – 102

Courriel : instruments-service@vita-zahnfabrik.com

Avec nos sincères salutations,
VITA Zahnfabrik
H. Rauter GmbH & Co. KG
SAV appareils

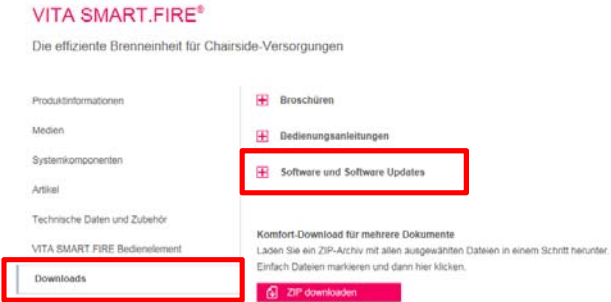
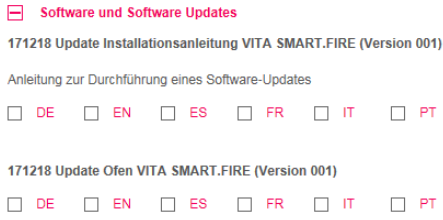

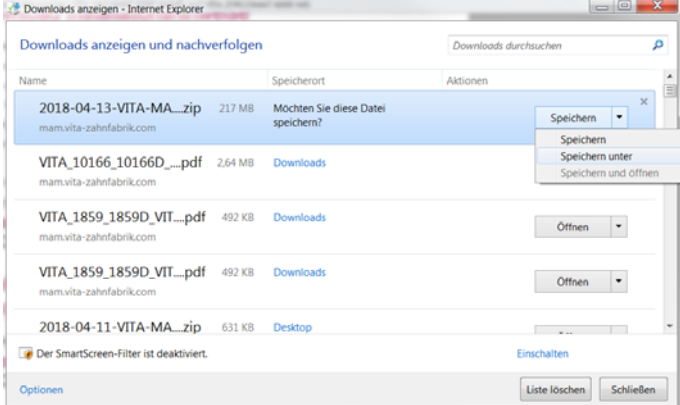
Procédure générale

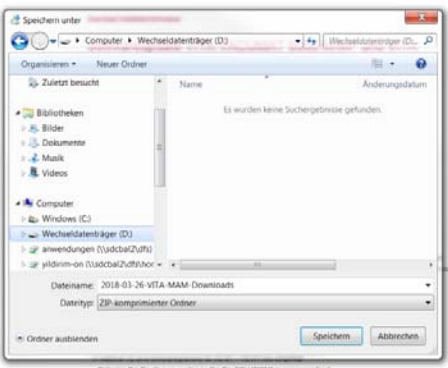
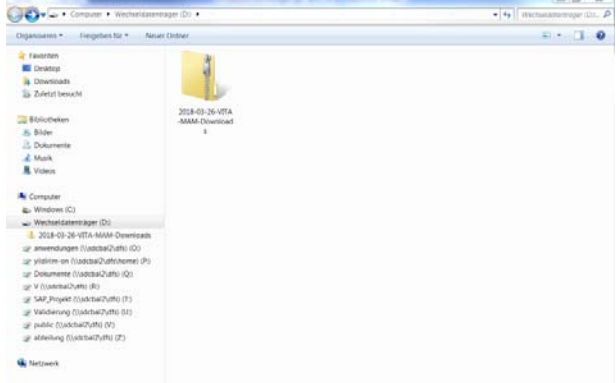
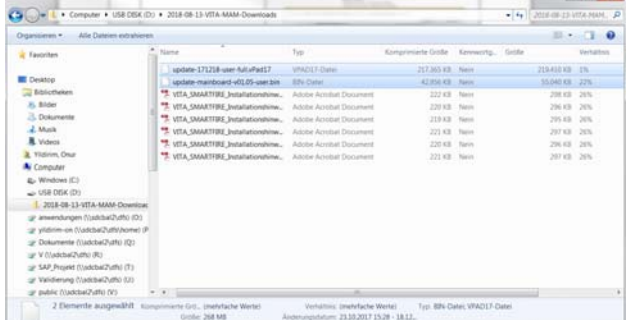
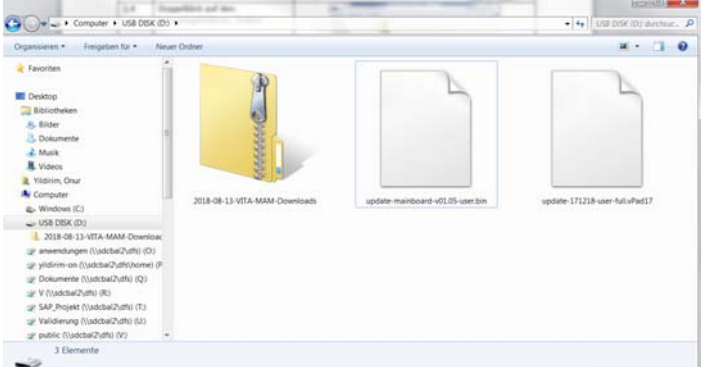
- Télécharger une nouvelle mise à jour logicielle depuis le site VITA ou télécharger une mise à jour depuis Update-Messenger après avoir reçu un message de ce dernier.
- Enregistrer la mise à jour logicielle sur une clé USB.
- Faire une copie de sauvegarde de vos propres profils sur une autre clé USB.
- Installer la mise à jour logicielle pour VITA SMART.FIRE.
- Vérifier la version du logiciel dans vPad.
- Dans la vPad, dans les paramètres figurant sous les données de l'appareil, vérifier si la version du logiciel est actualisée.
- Enregistrement dans le VITA Update-Messenger



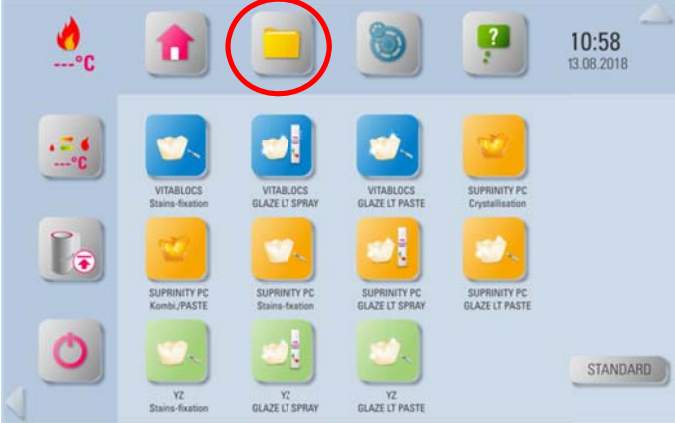

Conditions à remplir pour le téléchargement et l'installation





- Accès Internet
- Clé USB vide

Pour assurer une visibilité globale des mises à jour, une mise à jour correspondante du four portant le même numéro de version logicielle est associée à chaque mise à jour de l'appareil vPad. Vous trouverez ainsi deux fichiers de mise à jour que vous devez transférer ensemble sur la clé USB, puis installer.

1. Téléchargement de la nouvelle mise à jour logicielle sur Internet et enregistrement sur une clé USB																				
Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction																		
1.1	<p>Appelez l'appareil souhaité sous Produits->Fours-> sur le site VITA et téléchargez la mise à jour correspondante sous Téléchargements.</p> <p>Choisissez la mise à jour qui correspond au numéro de série de votre vPad.</p>	 <p>VITA SMART.FIRE® Die effiziente Brenneinheit für Chairside-Versorgungen</p> <p>Produktinformationen Medien Systemkomponenten Artikel Technische Daten und Zubehör VITA SMART FIRE Bedienelement</p> <p>Downloads</p> <p>Broschüren Bedienungsanleitungen Software und Software Updates</p> <p>Komfort-Download für mehrere Dokumente Laden Sie ein ZIP-Archiv mit allen ausgewählten Dateien in einem Schritt herunter. Einfach Dateien markieren und dann hier klicken. ZIP downloaden</p>																		
1.1.1	<p>Faites un double-clic sur la langue de votre choix.</p> <p>Le téléchargement de la mise à jour s'effectue.</p>	 <p>Software und Software Updates</p> <p>171218 Update Installationsanleitung VITA SMART.FIRE (Version 001)</p> <p>Anleitung zur Durchführung eines Software-Updates</p> <p><input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> PT</p> <p>171218 Update Ofen VITA SMART.FIRE (Version 001)</p> <p><input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> PT</p>																		
1.1.2	<p>Solution alternative : cliquez sur le lien « Choisir téléchargement pour VITA SMART.FIRE, version xxxxxx » dans Update-Messenger.</p>	 <p>Software update for VITA SMART.FIRE</p> <p>Version 171218</p> <p>Download software update for VITA SMART.FIRE version 171218</p>																		
1.2	<p>Sélectionnez « Enregistrer » -> « Enregistrer sous ».</p> <p>(Dans l'aperçu, à droite, vous apercevez l'interface de Windows 7 ; l'apparence peut différer en fonction de la version de Windows).</p>	 <p>Downloads anzeigen - Internet Explorer</p> <p>Downloads anzeigen und nachverfolgen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Speicherort</th> <th>Aktionen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018-04-13-VITA-MA...zip mam.vita-zahnfabrik.com</td> <td>217 MB</td> <td>Möchten Sie diese Datei speichern?</td> </tr> <tr> <td>VITA_10166_10166D...pdf mam.vita-zahnfabrik.com</td> <td>2,64 MB</td> <td>Downloads</td> </tr> <tr> <td>VITA_1859_1859D_VIT...pdf mam.vita-zahnfabrik.com</td> <td>492 KB</td> <td>Downloads</td> </tr> <tr> <td>VITA_1859_1859D_VIT...pdf mam.vita-zahnfabrik.com</td> <td>492 KB</td> <td>Downloads</td> </tr> <tr> <td>2018-04-11-VITA-MA...zip</td> <td>631 KB</td> <td>Desktop</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der SmartScreen-Filter ist deaktiviert.</p> <p>Options</p> <p>Liste löschen Schließen</p>	Name	Speicherort	Aktionen	2018-04-13-VITA-MA...zip mam.vita-zahnfabrik.com	217 MB	Möchten Sie diese Datei speichern?	VITA_10166_10166D...pdf mam.vita-zahnfabrik.com	2,64 MB	Downloads	VITA_1859_1859D_VIT...pdf mam.vita-zahnfabrik.com	492 KB	Downloads	VITA_1859_1859D_VIT...pdf mam.vita-zahnfabrik.com	492 KB	Downloads	2018-04-11-VITA-MA...zip	631 KB	Desktop
Name	Speicherort	Aktionen																		
2018-04-13-VITA-MA...zip mam.vita-zahnfabrik.com	217 MB	Möchten Sie diese Datei speichern?																		
VITA_10166_10166D...pdf mam.vita-zahnfabrik.com	2,64 MB	Downloads																		
VITA_1859_1859D_VIT...pdf mam.vita-zahnfabrik.com	492 KB	Downloads																		
VITA_1859_1859D_VIT...pdf mam.vita-zahnfabrik.com	492 KB	Downloads																		
2018-04-11-VITA-MA...zip	631 KB	Desktop																		



1.3	<p>Enregistrez le fichier de mise à jour encore compressé (fichier .zip) directement sur une clé USB vide (lecteur de clé USB : support amovible).</p>	
1.4	<p>Double-cliquez sur le dossier téléchargé.</p>	
1.5	<p>Copiez les fichiers de mise à jour.</p>	
1.6	<p>Collez les fichiers copiés à la racine du support amovible.</p>	
1.7	<p>Retirez la clé USB de l'ordinateur.</p>	


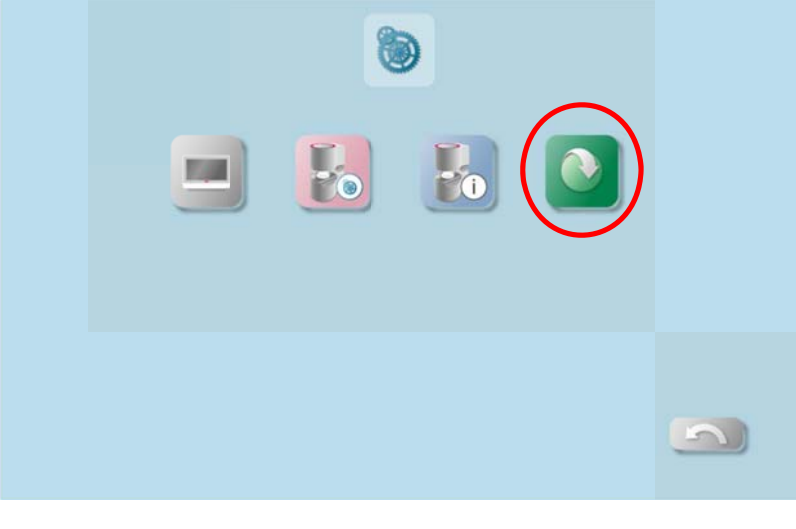


2. Réalisation d'une copie de sauvegarde de votre ou de vos bureaux		
Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
2.1	Allumez l'appareil avec l'interrupteur principal.	Le four exécute une marche de référence.
2.2	Branchez une clé USB vide sur la VITA vPad.	
2.3	Appuyez sur la touche 	
2.4	Sélectionnez le dossier « Bureaux ».	

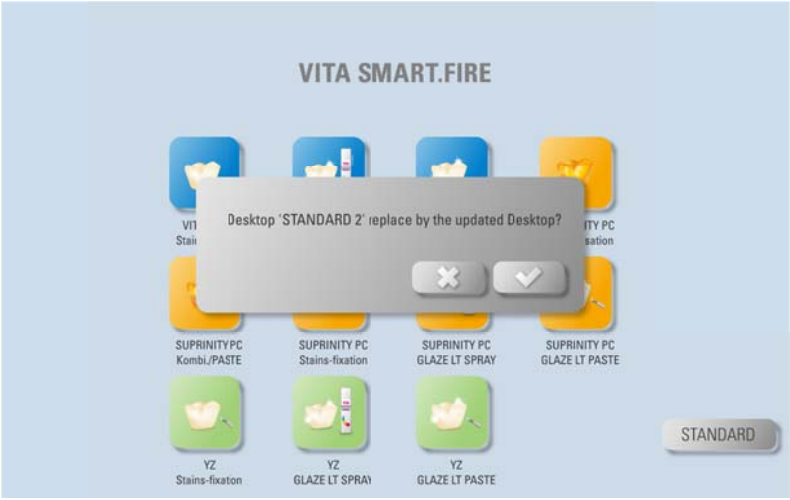
<p>2.5</p>	<p>Sélectionnez le ou les bureaux à exporter. Sélectionnez ensuite le port USB.</p>	
<p>2.6</p>	<p>Exportez le ou les bureaux sur la clé USB avec la touche </p>	
<p>2.7</p>	<p>Le bureau est maintenant sur la clé USB. La clé USB peut maintenant être retirée.</p>	

3. Installation des fichiers de mise à jour

Observation importante :
la tête du four doit être en position haute et aucun programme (y compris la fonction de veille) ne doit être actif.

Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
3.1	Insérez la clé USB où figurent les fichiers de mise à jour dans l'un des ports USB.	
3.2	Appuyez sur la touche  Paramètres.	

<p>3.3</p>	<p>Appuyez sur la touche Update (Mise à jour)</p> 	
<p>3.4</p>	<p>Un message s'affiche lorsque la mise à jour est terminée. Confirmez le message par .</p>	
<p>3.5</p>	<p>Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD-Desktop » actualisé</p> <p><i>Remarque : si le « STANDARD-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.</i></p>	



<p>3.6</p>	<p>Vous devez ensuite indiquer si vous souhaitez remplacer le « STANDARD 2-Desktop » (Bureau standard) actuel par le « STANDARD 2-Desktop » actualisé</p> <p><i>Remarque : si le « STANDARD 2-Desktop » actuel est remplacé, toutes les modifications que vous aurez apportées à ce bureau seront perdues.</i></p>	
------------	--	--

Observation importante
Pendant toute la procédure d'installation il faut laisser la clé USB en place et n'activer aucune touche !

L'installation est terminée lorsque la température réelle dans l'enceinte de cuisson s'affiche à nouveau.




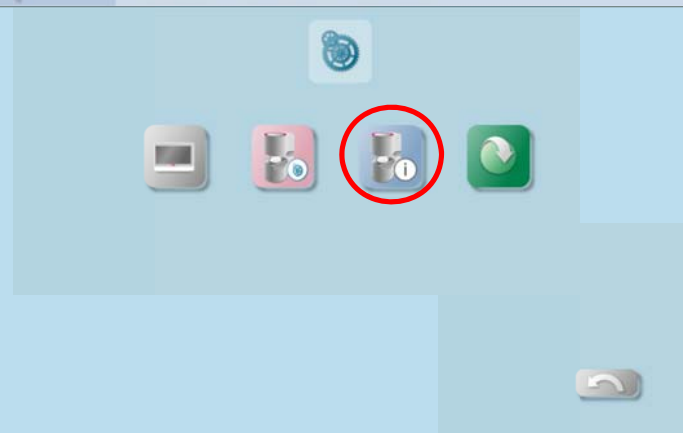
	<p>ATTENTION</p> <p>La température réelle dans l'enceinte de cuisson ainsi que la température de veille pré-réglée doivent être affichées !</p> <p>Si « 0 °C » est affiché pour ces deux valeurs, l'installation de la mise à jour n'est pas encore terminée !</p>
---	---

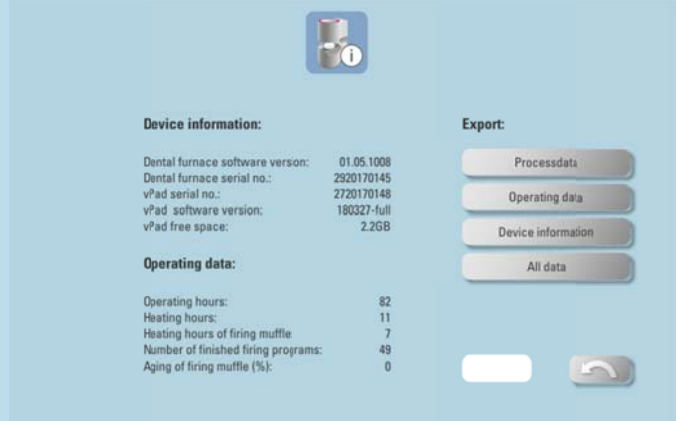
Information:




Si, à la suite de l'activation de la touche , le message « Aucune mise à jour trouvée » s'affiche, confirmer alors ce message et actionner de nouveau la touche .

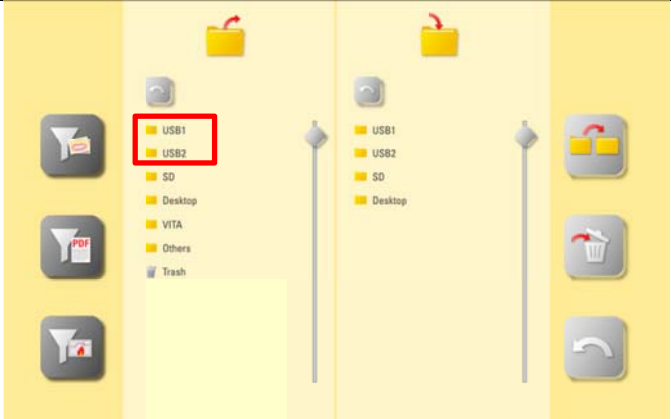




Si la remarque « Aucune mise à jour trouvée » réapparaît une seconde fois, la mise à jour est destinée à un autre type de vPad ou le logiciel n'est pas plus récent que la version logicielle installée.

4. Vérification de la version du logiciel dans vPad

Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
4.1	Appuyez sur la touche 	
4.2	Appuyez sur la touche 	

4.3	<p>Veuillez vérifier à l'aide de la version du logiciel, si le nouveau logiciel a été correctement installé. Si la version actuelle ne s'affiche pas, il faut répéter la mise à jour !</p>	 <p>The screenshot shows a software interface with the following sections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Device information: <ul style="list-style-type: none"> Dental furnace software version: 01.05.1008 Dental furnace serial no.: 2920170145 vPad serial no.: 2720170148 vPad software version: 180327-full vPad free space: 2.2GB Operating data: <ul style="list-style-type: none"> Operating hours: 82 Heating hours: 11 Heating hours of firing muffle: 7 Number of finished firing programs: 49 Aging of firing muffle (%): 0 Export: <ul style="list-style-type: none"> Processdata Operating data Device information All data
-----	--	---

5. Réimportation de son ou ses bureaux		
Étape	Saisie par l'utilisateur	Fonction de l'appareil
5.1	<p>Insérez la clé USB où figurent le ou les bureaux précédemment sauvegardés dans le VITA vPad.</p>	 <p>The image shows the back of a white dental furnace unit. A red circle highlights the USB port located between a circular dial and a network port.</p>
5.2	<p>Appuyez sur la touche .</p>	 <p>The screenshot shows the software interface with a folder icon highlighted. The interface includes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperature display: 167°C Home icon Folder icon (highlighted) Help icon Time and date: 11:01, 13.08.2018 Temperature display: 500°C Grid of program icons: <ul style="list-style-type: none"> VITABLOCS Stains-fixation VITABLOCS GLAZE LTPRAY VITABLOCS GLAZE LT PASTE SUPRINITY PC Crystallisation SUPRINITY PC Combi,PASTE SUPRINITY PC Stains-fixation SUPRINITY PC GLAZE LT SPRAY SUPRINITY PC GLAZE LT PASTE YZ Stains-fixation YZ GLAZE LTPRAY YZ GLAZE LT PASTE STANDARD button

5.3	Choisissez le port USB.	
5.4	Sélectionnez « Exporter bureau ».	
5.5	Sélectionnez le dossier du bureau.	
5.6	<p>Appuyez sur la touche  pour importer le bureau.</p>	

5.8

Le bureau a été importé dans le vPad.

