

VITA

One for All Ceramics and more



VITA LUMEX® AC

La ceramica di rivestimento estetico moderna e affidabile per tutte le comuni ceramiche strutturali e il titanio.





Vantaggi

Versatile

Semplifica il lavoro quotidiano grazie all'ampia gamma di indicazioni.

Affidabile

Riproduzione affidabile del colore dei denti con la FORMULA VITA COLOR-MATCH.

Efficiente

Processi sicuri ed efficienti grazie a un'elevata stabilità alla cottura e una comprovata resistenza.

Ceramica di rivestimento estetico

VITA LUMEX® AC

Versatile. Affidabile. Efficiente.

VITA LUMEX AC è una ceramica di rivestimento estetico con la formula di materiale VITA per risultati precisi dal punto di vista cromatico, naturali e affidabili.

- Per il rivestimento di tutti i correnti materiali strutturali in ceramica integrale (biossido di zirconio, ceramica a base di disilicato di litio e feldspatica)
- Per il rivestimento del titanio
- Per la realizzazione di ricostruzioni senza struttura (ad es. faccette)



Cromaticamente fedele. Aspetto naturale.

Impressionante dinamica di luce in tutte le sfaccettature



Le masse ENAMEL presentano una traslucenza naturale.




Le masse OPAL TRANSLUCENT consentono un gioco di colori brillante e opalescente.



Le masse POWERWASH e FLUO INTENSE sostengono la riproduzione della fluorescenza naturale.

Sfumatura fine per un'estetica naturale

Le masse ENAMEL finemente sfumate, da bianco-opaco a trasparente come vetro, offrono una ceramica adatta a qualsiasi grado di traslucenza ricercato.

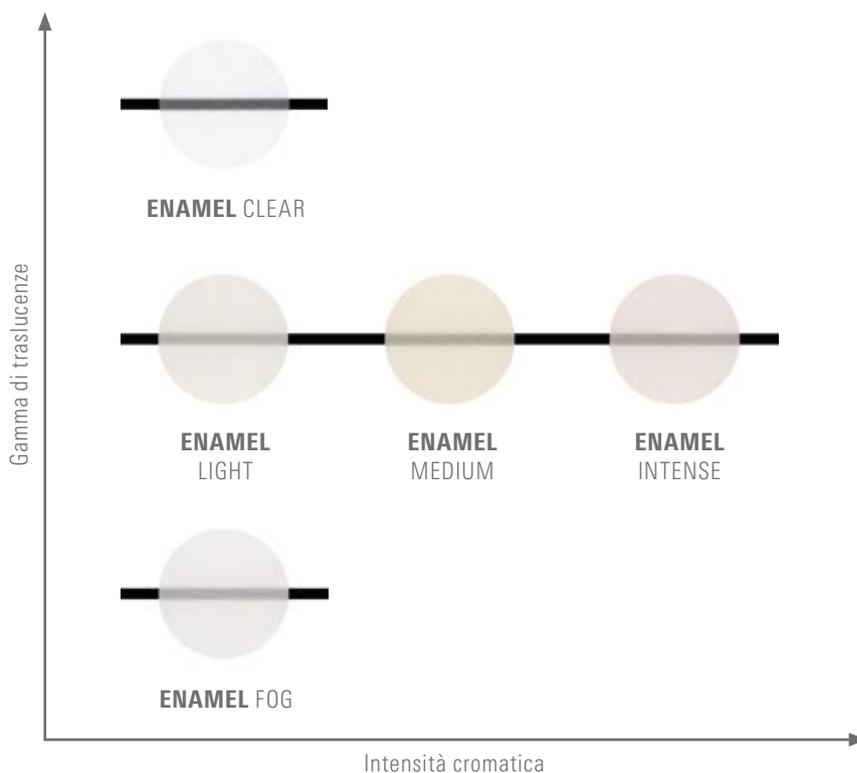





Risultato della cottura fedele.

Impressionante stabilità alla cottura

Con VITA LUMEX AC, i restauri escono dal forno già nello stato finale: risultato fedele alle aspettative grazie a un'impressionante stabilità alla cottura.



Risultati di cottura affidabili

La retrazione minimizzata di VITA LUMEX AC consente risultati di cottura affidabili e di forma stabile grazie ad una struttura merceologica omogenea con elevata densità.

	HeraCeram Zirkonia 750	VITA LUMEX AC
1. Cottura	750 °C	760 °C
2. Cottura	-10 °C	-10 °C
3. Cottura	-10 °C	-10 °C
4. Cottura	720 °C	730 °C

Modellazione altamente precisa

Modellazione altamente precisa con un'elevata stabilità: queste caratteristiche vengono offerte da VITA LUMEX AC grazie a una distribuzione della granulometria ottimale e alla microdentatura delle particelle di ceramica.

Visualizzazione semplificata di esempio della distribuzione della granulometria/microdentatura



Forma. Colore. Luce.


Quali sono i vantaggi della ceramica di rivestimento estetico **VITA LUMEX® AC**?
Risposte direttamente dal lavoro quotidiano in laboratorio!



La ceramica di rivestimento estetico **VITA LUMEX AC** è assolutamente stabile dal punto di vista cromatico e adatta alla scala colori VITA. Se determino sulla scala colori un A2, con **VITA LUMEX AC** posso ottenere precisamente questo VITA A2 originale!”

Dott. Jorge Carro Juárez
Odontoiatra e odontotecnico, Panotla, Tlaxcala, Messico

Restauri altamente estetici senza problemi di stratificazione.

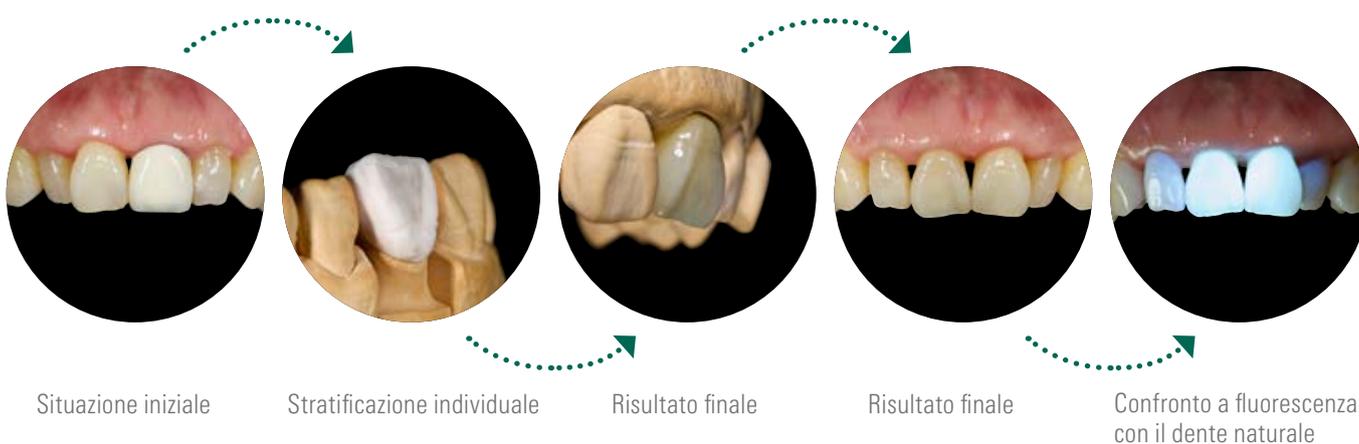

Scopri il
caso clinico






Resistenza comprovata.

Elevata resistenza alla rottura

Grazie all'eccellente resistenza alla rottura, VITA LUMEX AC raggiunge una buona stabilità clinica e valori di rigidità ai test che risultano notevolmente al di sopra dei requisiti di norma.

Resistenza a flessione

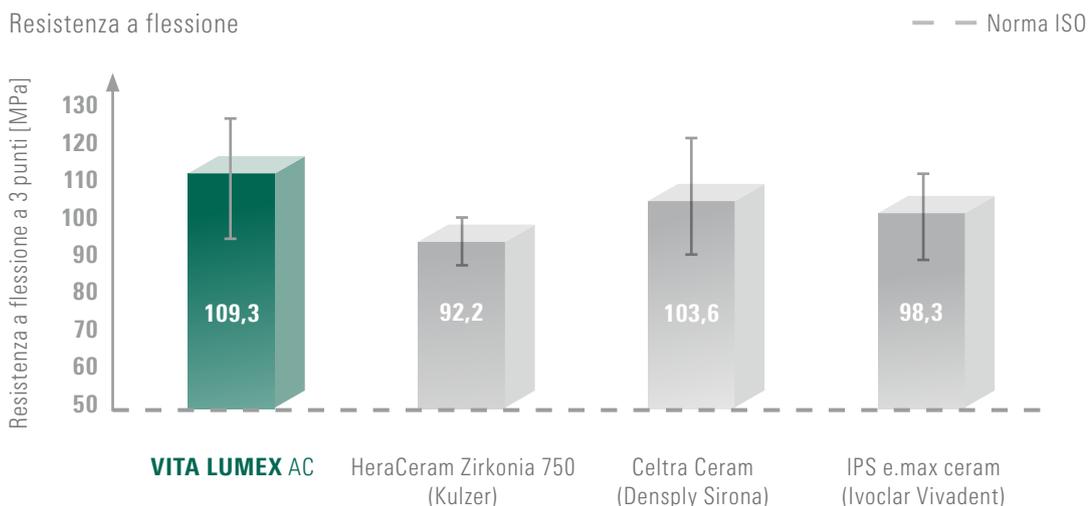


Fonte: Studio interno, VITA R&S, Misura della resistenza a flessione a 3 punti sec. ISO 6872 sui materiali citati, report 08/19, Dott. B. Gödiker, ([1] v. retro prospetto)

Ottima qualità del legame

Un legame affidabile con la ceramica strutturale è garantito dal coefficiente di espansione termica (CET) adeguato. Nei test, VITA LUMEX AC raggiunge valori di resistenza di legame ampiamente superiori ai requisiti di norma.

Resistenza di legame rispetto a biossido di zirconio (VITA YZ HT)

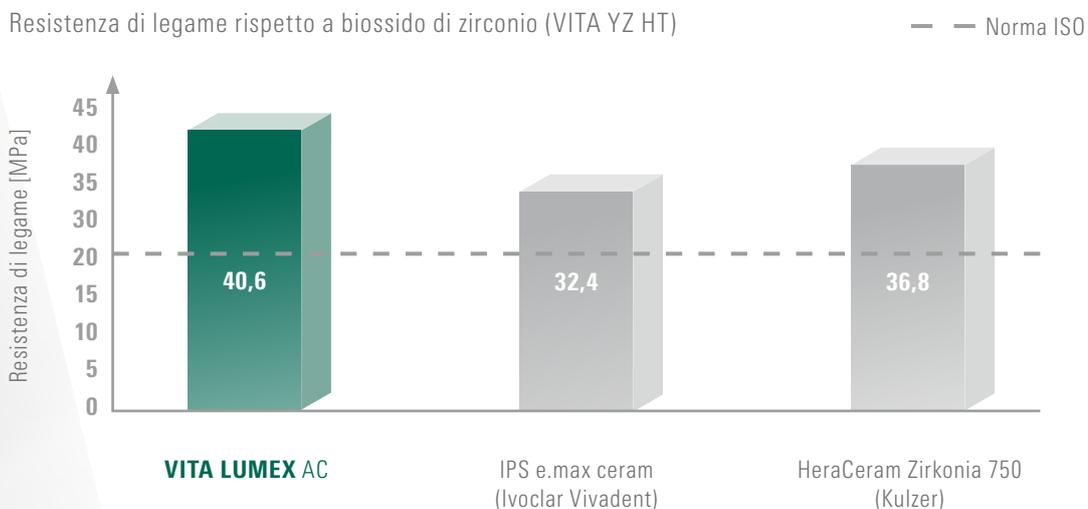

Fonte: Studio interno, VITA R&S, Misura della resistenza di legame secondo ISO 9693 (Test "Schickerath") sui materiali citati, report 08/19, Dott. B. Gödiker, ([1] v. retro prospetto)

Masse e colori.

Masse base

OPAQUE

Per il mascheramento di sottostrutture

Colori

- opaque-0
- opaque-1
- opaque-2
- opaque-3
- opaque-4
- opaque-5

OPAQUE DENTINE

Per la riproduzione del colore base in caso di spessori sottili

Colori

VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER

ENAMEL

Per la riproduzione del gioco cromatico e di luce dello smalto del dente

Colori

- light
- intense
- fog
- medium
- clear

POWER WASH

Per supportare l'intensità del colore del dente e il controllo del grado di fluorescenza o di luminosità

Colori

VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER: valori di luminosità LLO–LL5

DENTINE

Per la riproduzione del colore base nell'area cervicale/del corpo

Colori

VITA classical A1–D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER

GINGIVA

Per la ricostruzione di parti gengivali

Colori

- pale-papilla
- nectarine
- rosewood
- deep-red
- light-rose
- grapefruit
- purple
- dark-red

Masse effetto / aggiuntive DENTINE

DENTINE MODIFIER

Per la riproduzione di effetti opalescenti nell'area cervicale/dentinale

Colori

- cloudwhite
- honey
- caramel
- copper

FLUO INTENSE

Per controllare la fluorescenza in profondità

Colori

- arctic-white
- cappuccino
- sesame
- cream
- sand

MAMELON

Per la riproduzione di mammelloni nella zona incisale

Colori

- saffron
- honey-melon

CHROMA INTENSE

Per incrementare la cromaticità dell'area cervicale, particolarmente nel caso di spessori sottili

Colori

- ivory
- hazelnut
- almond

MARGIN

Per spalle in ceramica e piccole correzioni nella zona marginale

Colori

- straw-yellow
- corn-yellow

Masse effetto/aggiuntive ENAMEL

 <p>Colori</p>	<p>Masse traslucenti di uso universale per la riproduzione di effetti cromatici nell'area incisale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 20px;"> smoky-white <li style="margin-right: 20px;"> light-blonde <li style="margin-right: 20px;"> misty-rose <li style="margin-right: 20px;"> sunlight <li style="margin-right: 20px;"> sun-intense <li style="margin-right: 20px;"> waterdrop <li style="margin-right: 20px;"> deep-blue <li style="margin-right: 20px;"> foggy-grey
 <p>Colori</p>	<p>Per la riproduzione Effetti opalescenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 20px;"> opal-neutral <li style="margin-right: 20px;"> opal-azure <li style="margin-right: 20px;"> opal-sky
 <p>Colori</p>	<p>Per la riproduzione Effetti madreperlacei</p> <ul style="list-style-type: none">  shell
 <p>Colori</p>	<p>Per correzioni dopo la cottura finale con temperatura di cottura ridotta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 20px;"> neutral <li style="margin-right: 20px;"> desert

Assortimenti

STANDARD KIT

Per stratificazione standard



EXPERT KIT

Per stratificazione individualizzata



CUT-BACK KIT

Per Cut-back e microrivestimenti



GINGIVA KIT

Per la ricostruzione di parti gengivali



STARTER KIT

Per il primo approccio



POWERWASH KIT

Per l'intensità cromatica e la fluorescenza



Soluzioni adatte al processo.



Determinazione del colore

VITA Easyshade V / VITA Easyshade LITE
o scale colore VITA



Realizzazione della struttura

VITA YZ ZIRCONIA, ceramica feldspatica VITABLOCS
o ceramica al disilicato di litio VITA AMBRIA



Rivestimento estetico

VITA LUMEX AC



Caratterizzazione

Colori di caratterizzazione e masse glasura VITA AKZENT Plus



Cottura

VITA VACUMAT 6000 M



Lucidatura

VITA CERAMICS POLISHING SET



Fissaggio

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS



Siamo a vostra disposizione.

Hotline Supporto vendite

Telefono +49 7761 / 562-884
Fax +49 7761 / 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono +49 7761 / 562-222
Fax +49 7761 / 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com



Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Edizione di questa brochure di prodotto: 10/23

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile al sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati: **CE 0124 VITA LUMEX® AC**

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

MD

Riferimenti

Studi interni, VITA R&S

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Dipartimento Ricerca & Sviluppo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Germania
Dott. Berit Gödiker, Capoprogetto VITA R&S, VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen

Dati dei test dettagliati

Vedere la documentazione tecnico scientifica
VITA LUMEX AC
Download via www.vita-zahnfabrik.com



Per ulteriori informazioni su
VITA LUMEX AC
www.vita-zahnfabrik.com/lumex



VITA LUMEX® AC

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germania

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

