

VITA TITANKERAMIK im Multimat MC II

Progr.	Temp. °C Vorwärmen	Trocknen	Vorw.	Vac.	Brennen	°C/min.	Endtemp.
Pulver Bonder	400	2	1	2,0	2,0	060	800°
PASTEN BONDER	400	5	1	2,0	2,0	060	800°
Opaque	400	2	1	2,0	2,0	080	790°
Schulterbrand	400	5	1	2,0	2,0	050	770°
1. Dentinbrand	400	5	1	2,0	2,0	050	770°
2. Dentinbrand	400	5	1	2,0	2,0	050	770°
Glanz	400	3	3	2,0	2,0	080	770°
Glanz mit Glasurmasse	400	3	3	2,0	2,0	080	770°

Ab dem Opaque Brand bis zum Glanzbrand muß eine Langzeitabkühlung bis auf 400°C durchgeführt werden.

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.