

VITA ADIVA® LUTING SOLUTIONS

Die materialspezifische Befestigungslösung – intuitiv und prozesssicher!



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 2022-11

VITA – perfect match.

VITA

Produktbeschreibung

VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS sind auf VITA Materialien ideal abgestimmte Befestigungslösungen für die Befestigung von Restaurationen aus Feldspat-, Hybrid- und Glaskeramik, Zirkondioxid, Komposit sowie Metall. Die integrierten materialspezifischen Haftvermittler sorgen für einen verlässlichen Haftverbund. Klar und einfach aufgebaut unterstützt Sie das

intelligente System bei der prozesssicheren und effizienten Befestigung durch seine intuitiv-einfache Handhabung. Mit dem handlichen Befestigungs-Set im Normtrayformat stehen Ihnen und Ihrem Team alle Komponenten stets griffbereit zur Verfügung. VITA ADIVA Befestigungslösungen sind auch für Restaurationsmaterialien anderer Hersteller geeignet.

ALLE LÖSUNGEN AUF EINEN BLICK



VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE

- Das volladhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung von Zahnsubstanz und Restaurationsmaterial.
- Das dualhärtende, volladhäsive Befestigungskomposit VITA ADIVA F-CEM ist in vier Farben (A2 Universal, A3, White opaque, Translucent) erhältlich.

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE*

- Das selbstadhäsive Befestigungssystem mit ideal abgestimmten Komponenten zur Konditionierung des Restaurationsmaterials.
- Das dualhärtende, selbstadhäsive Befestigungskomposit VITA ADIVA S-CEM ist in zwei Farben (A2 Universal, Translucent) erhältlich.

VITA ADIVA® IMPLANT


- VITA ADIVA IA-CEM ist ein dualhärtendes ultraopakes Komposit für die Befestigung von Kronen auf Titanbasen, individuellen Titanabutments und verfärbten Zahnstümpfen.

VITA ADIVA® TEMPORARY

- VITA ADIVA TE-CEM ist ein dualhärtender Kunststoffzement für die temporäre Befestigung. Er ist in der Farbe Translucent erhältlich.

*) VITA ADIVA S-CEM ist nicht FDA zertifiziert.

VORTEILE

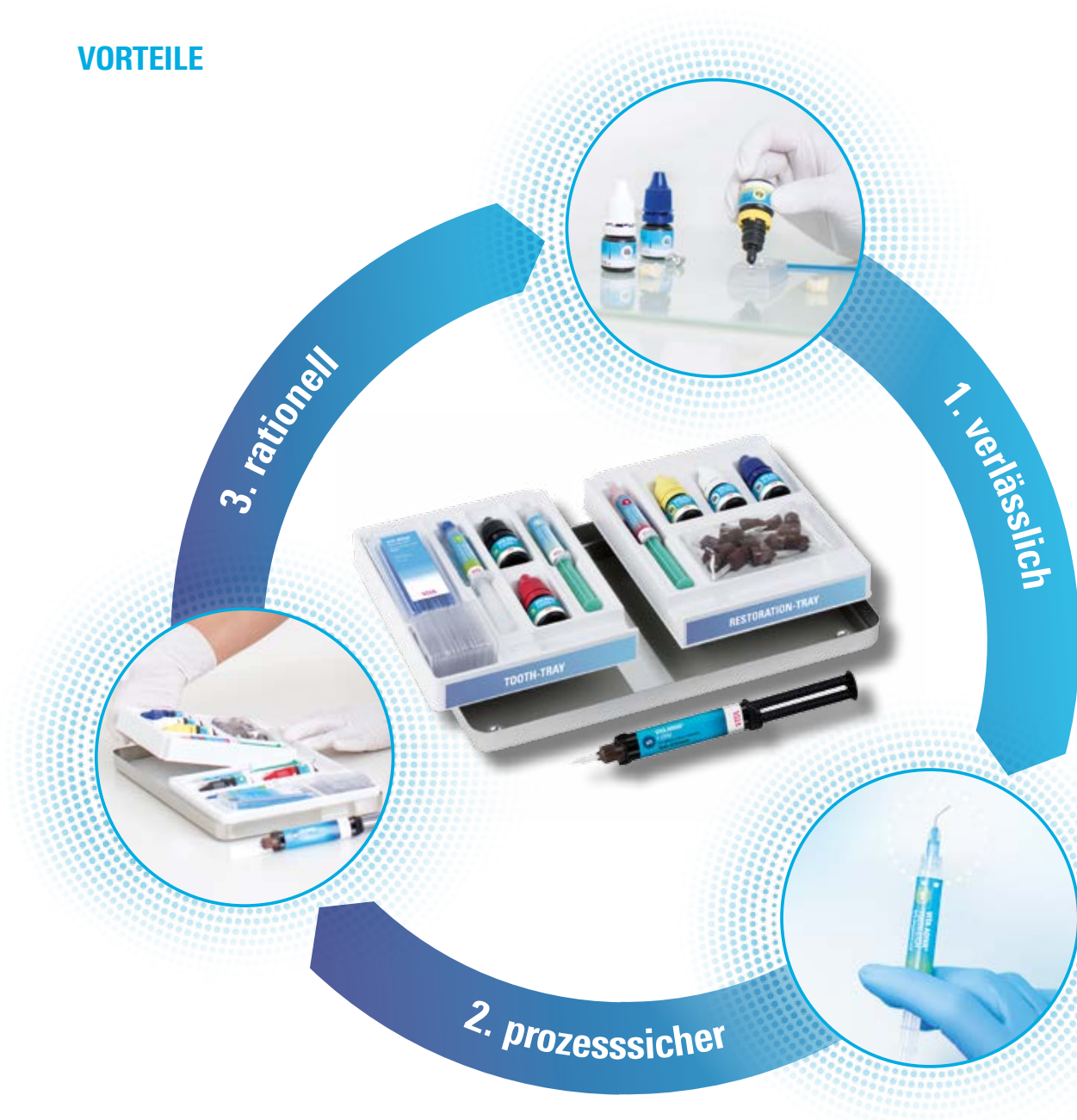

Verlässlich

- Vielfältige Restaurationswerkstoffe mit materialspezifisch abgestimmten Haftvermittlern verlässlich befestigen.

Prozesssicher

- Dank des übersichtlichen Befestigungssets mit systematisch angeordneten und farblich gekennzeichneten Komponenten prozesssicher befestigen.

Rationell

- Mit dem handlichen, zweiteiligen Set im Normtrayformat alle Komponenten stets griffbereit zur Hand.

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET



VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING SET Art.-Nr. FAFAS

Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.*
VITA ADIVA TOOTH-ETCH**	3 ml	Spritze + 15 Application-Tips, blau	–
VITA ADIVA T-BOND I + II	5 ml	Flasche, 2x	FATBS
VITA ADIVA CERA-ETCH**	3 ml	Spritze + 20 Application-Tips, rot	FACE3
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flasche	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flasche	FAZRP5
VITA ADIVA M-PRIME	5 ml	Flasche	FAMP5
VITA ADIVA F-CEM, Farbe: A2 Universal	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAFCEMA25
VITA ADIVA OXY-PREVENT	3 ml	Spritze + 10 Application-Tips, grün	FAOP3V1
VITA ADIVA ACCESSORIES: VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE LUTING VERSIONS

Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.*
VITA ADIVA F-CEM, Farbe: A2 Universal	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAFCEMA25
VITA ADIVA F-CEM, Farbe: A3	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAFCEMA35
VITA ADIVA F-CEM, Farbe: White opaque	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAFCEMW05
VITA ADIVA F-CEM, Farbe: Translucent	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAFCEMT5


VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE ACCESSORIES

Bezeichnung	Füllmenge	Art.-Nr.*
VITA ADIVA Microbrush	25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA T-Mixer 1:1	15 pcs.	FATM11

*) Sämtliche VITA ADIVA Komponenten sind über benannte Art.-Nrn. einzeln (nach-)bestellbar.

**) Hinweis: Refill-Lieferform für VITA ADIVA TOOTH-ETCH: 2 x 3 ml Spritze, Art.-Nr. FATE3; VITA ADIVA CERA-ETCH auch als 6 ml Flasche erhältlich, Art.-Nr. FACE6

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET

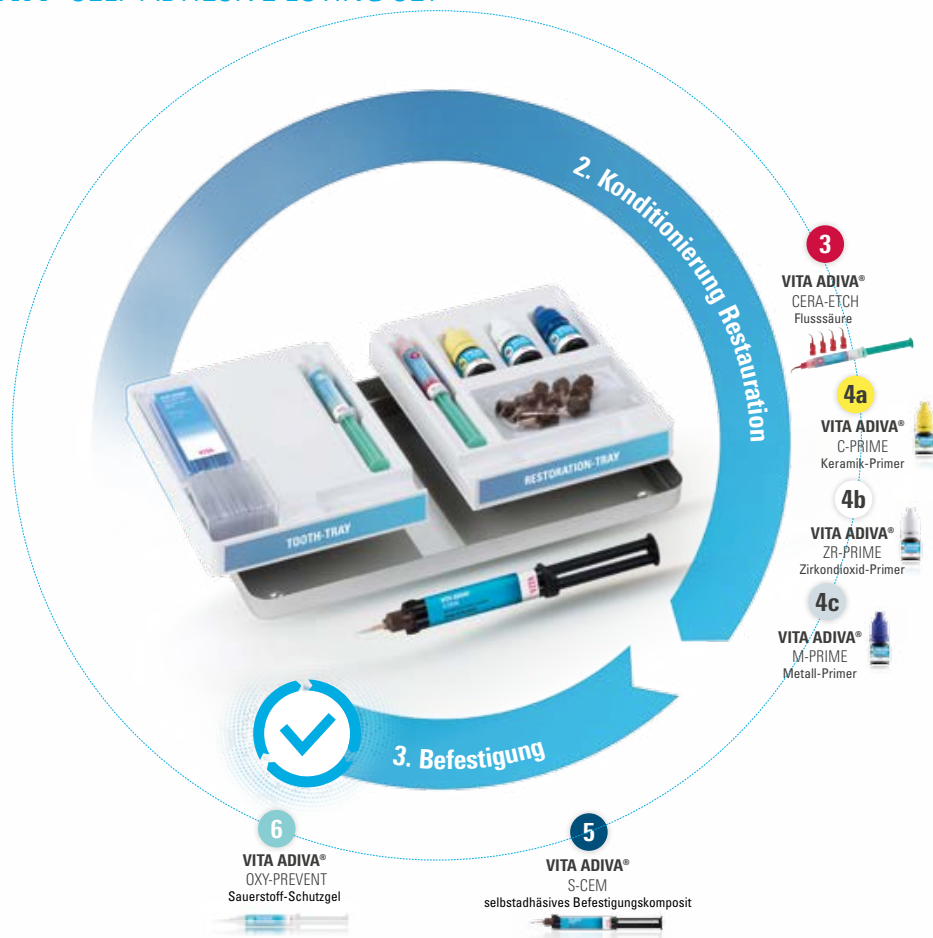

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING SET Art.-Nr. FASAS

Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.*
VITA ADIVA CERA-ETCH**	3 ml	Spritze + 20 Application-Tips, rot	FACE3
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flasche	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flasche	FAZRP5
VITA ADIVA M-PRIME	5 ml	Flasche	FAMP5
VITA ADIVA S-CEM, Farbe: A2 Universal	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 4:1, braun	FASCEMA25
VITA ADIVA OXY-PREVENT	3 ml	Spritze + 10 Application-Tips, grün	FAOP3V1
VITA ADIVA ACCESSORIES: VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE LUTING VERSIONS

Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.*
VITA ADIVA S-CEM, Farbe: A2 Universal	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 4:1, braun	FASCEMA25
VITA ADIVA S-CEM, Farbe: Translucent	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 4:1, braun	FASCENT5

VITA ADIVA® SELF-ADHESIVE ACCESSORIES

Bezeichnung	Füllmenge	Art.-Nr.*
VITA ADIVA Microbrush	25 pcs.	FAMB25
VITA ADIVA Mixing-Trays	25 pcs.	FAAT25
VITA ADIVA T-Mixer 4:1	15 pcs.	FATM41

*) Sämtliche VITA ADIVA Komponenten sind über benannte Art.-Nrn. einzeln (nach-)bestellbar.

**) Hinweis: VITA ADIVA CERA-ETCH auch als 6 ml Flasche erhältlich, Art.-Nr. FACE6

VITA ADIVA® IA-CEM und TE-CEM



VITA ADIVA® IA-CEM SET Art.-Nr. FAIACEMSET


Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.*
VITA ADIVA IA-CEM, Farbe: Ultra opaque	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 1:1, braun	FAIACEMU05
VITA ADIVA CERA-ETCH	6 ml	Flasche	FACE6
VITA ADIVA C-PRIME	5 ml	Flasche	FACP5
VITA ADIVA ZR-PRIME	5 ml	Flasche	FAZRP5
VITA ADIVA IA-CEM ACCESSORIES: VITA ADIVA T-Mixer, VITA ADIVA Microbrush, VITA ADIVA Mixing-Trays			

VITA ADIVA® TE-CEM

Bezeichnung	Füllmenge	Darreichungsform	Art.-Nr.
VITA ADIVA TE-CEM, Translucent	5 ml	Spritze + 15 T-Mixer 4:1, braun	FATECEM5

*) Sämtliche VITA ADIVA-Komponenten sind über benannte Art.-Nrn. einzeln (nach-) bestellbar.

DIE FARBEN UND VARIANTEN

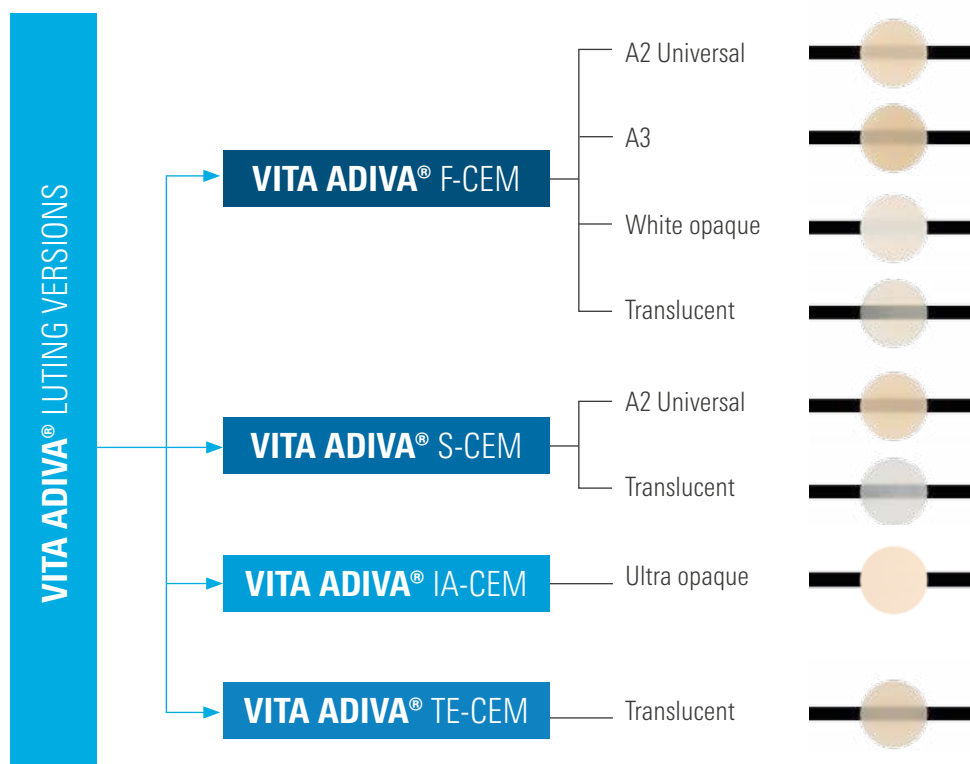







MATERIALSPEZIFISCHE BEFESTIGUNGSEMPFEHLUNG

VITA CAD/CAM Material	Materialklasse	Befestigungsart/-komposit				
		adhäsiv	selbstadhäsiv	adhäsiv	konventionell	temporär
		VITA ADIVA® F-CEM	VITA ADIVA® S-CEM	VITA ADIVA® IA-CEM		VITA ADIVA® TE-CEM
VITABLOCS	Feldspatkeramik	●	● ¹	○	×	×
VITA ENAMIC	Hybridkeramik	●	● ¹	●	×	×
VITA SUPRINITY PC	Zirkondioxidverstärkte Lithiumsilikatkeramik	●	●	●	○ ²	×
VITA YZ T	Zirkondioxid	●	●	●	●	●
VITA YZ HT	Zirkondioxid	●	●	●	●	●
VITA YZ ST	Zirkondioxid	●	●	●	●	●
VITA YZ XT	Zirkondioxid	●	●	●	●	●
VITA CAD-Temp	Komposit	○	×	●	○	●
-	NEM, EM, Titan	●	●	●	●	●

● empfohlen ○ möglich × nicht möglich

INDIKATIONSTABELLE


	VITA ADIVA® F-CEM	VITA ADIVA® S-CEM	VITA ADIVA® IA-CEM	VITA ADIVA® TE-CEM
	Volladhäsives Befestigungskomposit	Selbstadhäsives Befestigungskomposit	Volladhäsives Befestigungskomposit	Temporäres Befestigungskomposit
	●	●	●	●
	●	×	×	×
	●	×	×	×
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●

● empfohlen × nicht möglich

Hinweise:

- ¹) Selbstadhäsive Befestigungskomposite dürfen bei Silikat- und Hybridkeramik ausschließlich für Kronen verwendet werden.
- ²) Konventionelle Befestigungsmaterialien (z.B. Ketac CEM, 3M ESPE; Vivaglass CEM, Ivoclar Vivadent; GC Fuji I, GC Dental) dürfen ausschließlich bei Kronen auf natürlichen Zahnstümpfen verwendet werden. Für die konventionelle Befestigung muss die Präparation retentive Flächen aufweisen und nach den Präparationsrichtlinien auf eine anatomische Form unter Einhaltung der angegebenen Mindeststärken reduziert werden.

Weitere Informationen zu VITA ADIVA LUTING SOLUTIONS
finden Sie unter: www.vita-zahnfabrik.com/adiva

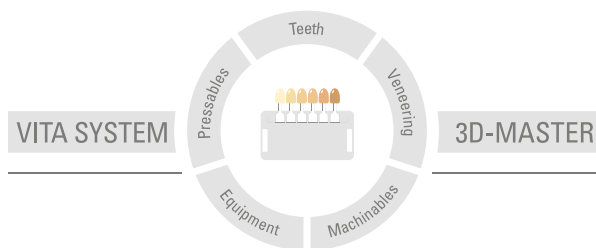

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2022-11

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung:

CE0482

VITA ADIVA® F-CEM, **VITA ADIVA®** S-CEM, **VITA ADIVA®** IA-CEM, **VITA ADIVA®** TE-CEM, **VITA ADIVA®** TOOTH-ETCH, **VITA ADIVA®** T-BOND I + II, **VITA ADIVA®** C-PRIME, **VITA ADIVA®** ZR-PRIME, **VITA ADIVA®** M-PRIME

Die Firma Harvard Dental International GmbH ist nach der Medizinprodukterichtlinie zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung:

CE

VITA ADIVA® Microbrush®, **VITA ADIVA®** T-Mixer™, **VITA ADIVA®** OXY-PREVENT

Microbrush® ist eine Marke von MICROBRUSH® INTERNATIONAL.

T-Mixer™ ist eine Marke von Sulzer Mixpac AG.

In diesem Dokument genannte Produkte/Systeme anderer Hersteller sind eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik