

# VITA Easyshade® V – Bleaching-Modus

Professionelle Dokumentation und einfache Patientenkommunikation bei Bleaching-Behandlungen



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 07.20

VITA – perfect match.

**VITA**

## Funktionsbeschreibung

- Was?**
- Der Bleaching-Modus des VITA Easyshade V ist in Kombination mit der VITA mobileAssist App ein präzises, digitales Kommunikationstool für die Dokumentation, Kontrolle und Kommunikation von Bleaching-Behandlungen.
- Wofür?**
- Er dient der einfachen und schnellen Dokumentation und Kontrolle sowie dem Austausch zwischen Zahnarzt und Patient während der Bleaching-Behandlung.
- Womit?**
- Für die individuelle Anwendung stehen eine 2-Zahn-, eine 4-Zahn- und eine 6-Zahnfarbmessung im Bleaching-Modus zur Verfügung, die mithilfe der VITA mobileAssist App verlässlich übermittelt, dokumentiert und ausgetauscht werden kann.

## FUNKTIONSVORTEILE

### Präzise Zahnfarbbestimmung

- Zuverlässig ermittelte Messergebnisse dank intelligenter, digitaler Messtechnik.

### Professionelle Planung und Kontrolle der Bleaching-Behandlung

- Verlässliche Planung und Kontrolle von Bleachings dank einer präzisen, digitalen 2-Zahn-, 4-Zahn- oder 6-Zahnfarbmessung vor und nach der Bleaching-Behandlung.

### Effiziente Patienten-Kommunikation

- Optimale Patientenkommunikation, da Zahnfarbinformationen und Patientenbilder mittels der VITA mobileAssist App kombiniert werden können.

### Überzeugende Bleaching-Simulation

- Natürliche, digitale Simulation möglicher Bleaching-Ergebnisse dank der stufenweise regelbaren Aufhellungs- und Fotodokumentationsfunktion mit der VITA mobileAssist App.\*

\*) Aktuell bereits für Endgeräte mit iOS- Betriebssystem verfügbar.

## FUNKTIONSEINSATZ

- Der Bleaching-Modus des VITA Easyshade V ermöglicht im Zusammenspiel mit der VITA mobileAssist App und dem VITA Bleachedguide 3D-MASTER eine zuverlässige Systemlösung.



## NEUE FUNKTIONEN

### VITA Easyshade V



1. Bleaching-Modus des VITA Easyshade V.



2. Digitale und präzise 2-Zahn-, 4-Zahn- oder 6-Zahnfarbmessung vor und nach der Bleaching-Behandlung.

### VITA mobileAssist App



1. Automatische Erkennung/Festlegung des Bleaching-Bereiches.\*\*



2. Digitale Simulation möglicher Bleaching-Ergebnisse am Patientenbild.\*\*

\*\* ) für eine bessere Visualisierung wurde das Bildmaterial vergrößert abgebildet.

**VITA**