

VITA Easyshade® V – Modo de blanqueamiento

Documentación profesional y comunicación sencilla con el paciente en tratamientos de blanqueamiento



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 07.20

VITA – perfect match.

VITA

Descripción funcional

- ¿Qué?**
- El modo de blanqueamiento del VITA Easyshade V es, en combinación con la aplicación VITA mobileAssist, una precisa herramienta de comunicación digital para la documentación, el control y la comunicación de tratamientos de blanqueamiento.
- ¿Para qué?**
- Se utiliza para la documentación y el control rápidos y sencillos, así como para el diálogo entre el odontólogo y el paciente durante el tratamiento de blanqueamiento.
- ¿Con qué?**
- Para el uso individual están disponibles mediciones del color dental de 2, de 4 y de 6 dientes en el modo de blanqueamiento, que pueden transmitirse, documentarse e intercambiarse de manera fiable mediante la aplicación VITA mobileAssist.

VENTAJAS FUNCIONALES

Determinación precisa del color dental

- Resultados de medición fiables gracias a la tecnología de medición digital inteligente.

Planificación y control profesionales del tratamiento de blanqueamiento

- Planificación y control fiables de los blanqueamientos gracias a la medición digital precisa del color de 2, de 4 o de 6 dientes antes y después del tratamiento.

Comunicación eficiente con el paciente

- Comunicación óptima con el paciente, ya que la aplicación VITA mobileAssist permite combinar la información sobre el color dental con fotografías del paciente.

Simulación convincente del blanqueamiento

- Simulación digital realista de los posibles resultados del blanqueamiento gracias a la función de blanqueamiento regulable de forma gradual y a la fotodocumentación mediante la aplicación VITA mobileAssist.*

*) Ya disponible actualmente para terminales con sistema operativo iOS.

USO FUNCIONAL

- En combinación con la aplicación VITA mobileAssist y la guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER, el modo de blanqueamiento del VITA Easyshade V proporciona una solución de sistema fiable.



NUEVAS FUNCIONES

VITA Easyshade V



1. Modo de blanqueamiento del VITA Easyshade V.



2. Medición digital precisa del color dental de 2, de 4 o de 6 dientes antes y después del tratamiento de blanqueamiento.

VITA mobileAssist App



1. Identificación y definición automáticas de la zona de blanqueamiento.**



2. Simulación digital de los posibles resultados del blanqueamiento en la fotografía del paciente.**

***) Para una mejor visualización, se han reproducido las imágenes con aumento.

VITA