

VITA Easyshade® V – Mode éclaircissement

Documentation professionnelle et communication simple avec le patient dans les traitements d'éclaircissement



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 08.20

VITA – perfect match.

VITA

Description du fonctionnement

- Quoi ?**
- Le mode éclaircissement du VITA Easyshade V est, combiné avec l'application VITA mobileAssist, un outil de communication numérique précis pour la documentation, le contrôle et la communication des traitements d'éclaircissement.
- Pour quoi ?**
- Il sert à la documentation et au contrôle simples et rapides ainsi qu'à l'échange entre dentiste et patient pendant le traitement d'éclaircissement.
- Avec quoi ?**
- Pour l'utilisation individuelle, la mesure de couleur de 2, de 4 ou de 6 dents est possible en mode éclaircissement, mesure pouvant être communiquée, documentée et échangée de façon fiable au moyen de l'application VITA mobileAssist.

AVANTAGES DE LA FONCTION

Détermination précise de la couleur de dent

- Résultats de mesure établis de façon fiable grâce à une technique de mesure numérique intelligente.

Planification et contrôle professionnels du traitement d'éclaircissement

- Planification et contrôle fiable de l'éclaircissement grâce à la mesure numérique précise de 2, 4 ou 6 dents avant et après le traitement d'éclaircissement.

Une communication efficace avec les patients

- Communication optimale avec les patients puisque les informations sur la couleur de dent et les photos du patient peuvent être combinées au moyen de l'application VITA mobileAssist.


Simulation convaincante de l'éclaircissement

- Simulation numérique naturelle des résultats possibles de l'éclaircissement grâce à la fonction d'éclaircissement réglable et de documentation photo avec l'application VITA mobileAssist.*


*) Actuellement disponible pour les appareils dotés du système d'exploitation iOS.

APPLICATION

- Le mode d'éclaircissement du VITA Easyshade V permet une solution système fiable en conjonction avec l'application VITA mobileAssist et le VITA Bleachedguide 3D-MASTER.

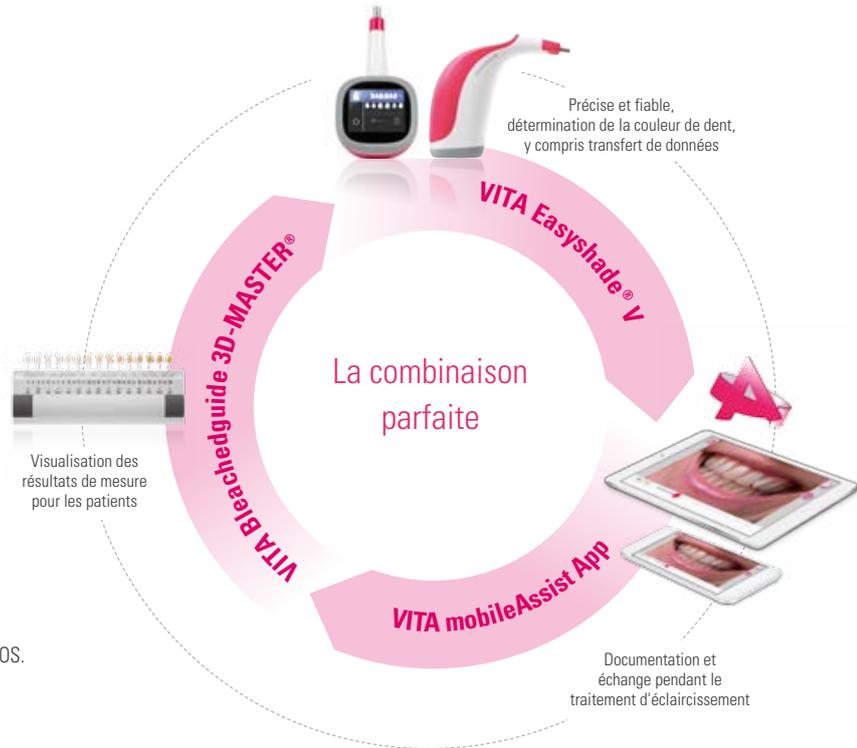

NOUVELLES FONCTIONS

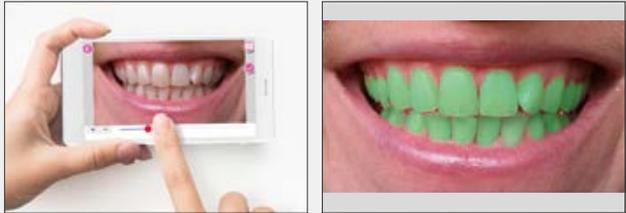VITA Easyshade V	VITA mobileAssist App
 <p>1. Mode éclaircissement de VITA Easyshade V.</p>	 <p>1. Reconnaissance/détermination automatique de la zone d'éclaircissement.**</p>
 <p>2. Mesure numérique précise de la couleur de 2, 4 ou 6 dents avant et après le traitement d'éclaircissement.</p>	 <p>2. Simulation numérique des résultats possibles de l'éclaircissement sur l'image du patient.**</p>

**) Pour une meilleure visualisation, les images ont été représentées grossies.

VITA