

# VITAVM<sup>®</sup>CC

Istruzioni d'uso/ Versione completa



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

VITA - perfect match.

**VITA**

Materiale polimerizzabile a freddo, privo di sostanze di carica per uso extraorale.  
Disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4.




Stratificazione BASIC	4
Tabelle di corrispondenza e masse aggiuntive	9
Assortimenti	10
Informazioni / Dati tecnici	11
Avvertenze	13

VITA VM CC BASE DENTINE



VITA VM CC ENAMEL

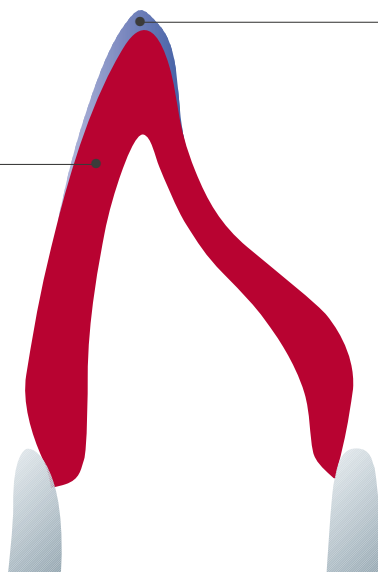

La stratificazione VITA VM CC BASIC prevede l'impiego di due masse: VITA VM CC BASE DENTINE ed ENAMEL.

Con soli due strati l'odontotecnico è in grado di ottenere una riabilitazione provvisoria di grande vitalità. Per la riproduzione ottimale del colore e per una sufficiente stabilità, lo spessore minimo non deve essere inferiore a 0,5 mm.



### Modellazione della ceratura diagnostica (wax-up)

Il wax-up funge da base per il provvisorio. La forma del dente modellata deve corrispondere in modo quanto più preciso possibile all'obiettivo terapeutico, per poter verificare estetica e funzione nella bocca del paziente già in fase preliminare. La funzione va controllata e corretta in articolatore già sulla ceratura diagnostica.

Nei ponti si raccomanda di configurare le connessioni tra corone ed elementi intermedi quanto più ampie possibili.



⚠ **Avvertenza:** un modello anatomicamente simile è molto utile per la modellazione del wax-up in modo da trasferire le caratteristiche tipiche del singolo dente. Si raccomanda di realizzare un modello di lavoro non segato.

Per la successiva fusione realizzare una mascherina in silicone.



Il silicone usato deve essere ad alta definizione ed avere una sufficiente durezza e stabilità di forma.

Togliere con cautela la mascherina in silicone e scerare il wax-up dal modello.



Asciugare il modello con un getto d'aria e scaricare zone in sottosquadro con della cera.

Impregnare quindi il modello con acqua per 5 minuti e applicarvi uno strato sufficiente di isolante gesso/resina a bassa viscosità (isolante a base di alginato). In alternativa si può usare VITA VM LC SEPARATOR. Attenersi alle istruzioni di impiego.

⚠ **Avvertenza:** la lacca distanziatrice eventualmente usata può sciogliersi a contatto con la massa VITA VM CC.



Con il bisturi ridurre la mascherina palatale in silicone e praticare dei canali di alimentazione. Fissare accuratamente la mascherina in silicone al modello per versarvi VITA VM CC.



### Miscelazione

Polvere e liquido vanno miscelati in una scodella di silicone. VITA VM CC deve presentare consistenza fluida. La quantità di LIQUID dipende dalla temperatura ambiente.



### Rapporto di dosaggio

Miscelare un misurino grande (ca. 0,23 g) di polvere VITA VM CC con 4 gocce (ca. 0,13 g) di VITA VM CC LIQUID (valore indicativo). (Valore indicativo)



Dopo aver miscelato in modo omogeneo, l'impasto assume consistenza plastica e dopo averlo lasciato inturgidire (ca. 1 minuto) può essere utilizzato. Il tempo di lavorabilità è di ca. 4 – 5 minuti, in funzione della temperatura ambiente.



Bolle e striature si evitano osservando il corretto rapporto di dosaggio ed impastando uniformemente con lo strumento inserito fin sul fondo della scodella di miscelazione.



Versare VITA VM CC BASE DENTINE approntato nella mascherina in silicone.



**Polimerizzazione:**

La polimerizzazione in idromuffola migliora le caratteristiche merceologiche e viene consigliata, ma non è indispensabile per l'indurimento di VITA VM CC.

**Polimerizzazione in idromuffola:**

temperatura dell'acqua 40°C,  
pressione 2 - 2,5 bar, 10 minuti



Per creare lo spazio per lo smalto, occorre ridurre BASE DENTINE analogamente allo schema di stratificazione. Ridurre leggermente il bordo incisale dei denti utilizzando frese in metallo duro a taglio incrociato ed applicare dei mammelloni. Eliminare la polvere di molaggio con aria compressa priva d'olio. La superficie non va trattata con vapore o venire a contatto con acqua.

Usare sempre la mascherina in silicone per controllo.



Se il restauro viene realizzato con numerosi passaggi di polimerizzazione, irruvidire sempre la superficie con frese in metallo duro (15.000 giri/min)...



... e bagnarla con VITA VM CC LIQUID. Applicare il materiale a completamento con uno strumento e polimerizzare.



Bagnare quindi BASE DENTINE con LIQUID. Con uno strumento applicare una parte della massa ENAMEL approntata sul ponte ridotto e metterne un poco nella metà labiale della mascherina.



Posizionare con precisione la mascherina sul modello ed eliminare eccedenze di materiale. Fissare accuratamente la mascherina sul modello.

Polimerizzare nuovamente.  
(Attenersi alle indicazioni a pagina 7).



Per la finitura e le correzioni della forma usare frese in metallo duro con una velocità di 15.000 giri/min.



Quindi prelucidare il restauro.



Per una lucidatura a specchio ottimale usare mufloncini di lana o pelle con una velocità di 5.000 giri/min.



Adattare il provvisorio sul modello segato.

Provvisorio finito.



Le seguenti corrispondenze sono puramente indicative!

Colori VITA SYSTEM 3D - MASTER	ENAMEL
0M1	ENL
1M1	ENL
2L1.5	ENL
2M1	ENL
2M2	ENL
2M3	ENL
3L1.5	ENL
3L2.5	ENL
3M1	ENL
3M2	ENL
3M3	ENL
3R1.5	ENL
3R2.5	ENL
4L1.5	END
4M2	END
5M1	END

Colori VITA classical A1–D4	ENAMEL
A1	ENL
A2	ENL
A3	ENL
A3,5	END
A4	END
B2	END
B3	END
B4	END
C1	END
C2	END
C3	ENL
C4	ENL
D2	END
D3	END
D4	END

<b>VITAVM®CC EFFECT LINER</b> – per intensificare il colore nella zona cervicale – uso universale per sostenere e intensificare il colore base		EL2	cream	beige
		EL3	tabac	marrone
		EL4	golden fleece	giallo
		EL5	papaya	arancio
		EL6	sesame	verde-giallo
<b>VITAVM®CC WINDOW</b> – massa trasparente per caratteristiche individuali		WIN	trasparente	

VITAVM®CC BASIC KIT 16-COLOR**		
Assortimento base per la stratificazione BASIC		
Q.tà	Contenuto	Materiale
16	30 g	BASE DENTINE*
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	100 ml	VITA VM CC LIQUID
1	–	Misurino
1	–	VITA Toothguide 3D-MASTER
1	–	Istruzioni d'uso

\* nei colori: 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1

\*\* disponibile anche come VITA VM CC BASIC KIT classical in colorazione VITA classical A1-D4 (senza B1)

VITAVM®CC BASIC KIT 5-COLOR		
Assortimento ridotto per la stratificazione BASIC		
Q.tà	Contenuto	Materiale
5	30 g	BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	30 ml	VITA VM CC LIQUID
1	–	Misurino
1	–	VITA Toothguide 3D-MASTER
1	–	Istruzioni d'uso

VITAVM®CC PROFESSIONAL KIT		
Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali		
Q.tà	Contenuto	Materiale
5	30 g	EFFECT LINER EL2–EL6

## Dati tecnici

Caratteristiche fisiche*	Unità di misura	Valore
Resistenza a flessione	MPa	83
Modulo di elasticità	MPa	2100
Assorbimento d'acqua	µg/mm <sup>3</sup>	18
Solubilità	µg/mm <sup>3</sup>	2

\* L'agevole\* ISO 10477/DIN EN 27491/ISO 7491/Altri test  
I valori tecnico/fisici indicati sono tipici risultati di misura e si riferiscono a campioni realizzati e a apparecchiature utilizzate internamente.

I valori rilevati si riferiscono a provini realizzati attenendosi esattamente al rapporto di dosaggio. Se il rapporto di miscelazione non viene osservato esattamente, i valori possono variare.

### Polimerizzazione in idromuffola (raccomandata)

Tempo di polimerizzazione: 10 minuti  
Temperatura dell'acqua: 40°C  
Pressione: 2–2,5 bar

### Polimerizzazione senza idromuffola

Tempo di polimerizzazione: 10 minuti, a seconda della temperatura ambiente

## VITAVM®CC

VITA VM CC è il materiale polimerizzabile a freddo, privo di sostanze di carica, ideale per uso extraorale.

Per la copertura di strutture in metallo si consiglia il materiale fotopolimerizzabile VITA VM LC OPAQUE.

Per provvisori di riabilitazione con o senza struttura metallica si consiglia l'uso di VITA VM LC.

Il provvisorio è una fase importante nel quadro del processo di riabilitazione dei pazienti con protesi fisse. In linea di principio serve da protezione dei denti preparati e per il ripristino temporaneo di estetica e funzione. Utilizzato in maniera corretta il provvisorio ha altri pregi: consente di configurare in modo mirato la forma ottimale del restauro definitivo. Soprattutto nei restauri frontali si possono correggere estetica, fonetica e funzione già con il provvisorio. Si agevola così anche l'accettazione da parte del paziente, che può abituarsi precocemente alla nuova situazione. VITA VM CC ha un ruolo importante: provvisori in VITA VM CC sono caratterizzati da un aspetto estetico piacevole e soddisfano i pazienti.

**VITAVM®CC – Composizione chimica**

Componenti	% in peso
convenzionale	97 – 99,5
Dibenzoilperossido	0,5 – 2
Pigmenti	< 1

**Indicazioni:**

- Realizzazione di corone e ponti provvisori
- Fissaggio di denti protesici VITA, ad es. su scheletrati
- Riparazioni
- Copertura di attacchi in lavori combinati

**Controindicazioni:**

- Rivestimenti definitivi
- Parafunzioni
- Non indicato per restauri a ponte senza struttura

**Destinazione d'uso:**

- I prodotti VITA VM CC sono composti di rivestimento per protesi dentale

**Pazienti target:**

- Nessuna limitazione.

**Utilizzatore previsto:**

- Esclusivamente professionisti del settore: odontoiatri e odontotecnici (Rx only).

**Riferimento ai rischi:**

- Per informazioni sulla segnalazione di eventi gravi in combinazione con dispositivi medici, rischi generali dei trattamenti dentali, rischi residui e (se nel caso) sicurezza e prestazioni cliniche (SSCP) consultare [https://www.vita-zahnfabrik.com/product\\_safety](https://www.vita-zahnfabrik.com/product_safety).



**Conservazione / Smaltimento:**

- Lo smaltimento può essere effettuato con i rifiuti domestici. I prodotti contrassegnati con un pittogramma relativo ad una sostanza pericolosa vanno smaltiti come rifiuti pericolosi. Rifiuti riciclabili (come attachments, carta, plastica) vanno smaltiti in accordo ai rispettivi sistemi di raccolta differenziata. Residui di prodotto contaminati vanno eventualmente trattati e smaltiti separatamente in conformità alle indicazioni regionali.




### Conservazione

Non conservare a temperature superiori ai 25°C.  
Non esporre alla luce solare diretta.

Si raccomanda di conservare VITA VM CC LIQUID sempre al fresco. Per una conservazione ottimale del LIQUID, tenerlo in frigorifero a 5–10°C in confezione perfettamente chiusa. Per adattarlo alla temperatura ambiente togliere il LIQUID dal frigorifero ca. un'ora prima dell'uso. Aprire le confezioni solo immediatamente prima dell'utilizzo.

I seguenti prodotti devono essere contrassegnati:		
VITAVM®CC LIQUID (Contiene: dimetacrilato di etilene (cfr. etilenglicoldimetacrilato) N,N-dimetil-p-toluidina)	H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. H315 Provoca irritazioni della pelle. H 317 Può provocare reazioni allergiche della pelle	 

Per informazioni più dettagliate consultare le schede di sicurezza!

<b>Protezione sul lavoro, Protezione della salute</b>	Durante il lavoro indossare idonei guanti, occhiali / indumenti di protezione. Lavorare sempre sotto aspirazione. Smaltire in conformità alle normative vigenti per i rifiuti pericolosi. Conservare lontano da fiamme e scintille.	  
---	--	---

### Spiegazione delle marcature sulla confezione


Produttore VITA Zahnfabrik		Data di produzione	
Dispositivo medico		Scadenza	
Solo per personale specializzato	Rx only	Codice	
Vedi Istruzioni d'uso		Numero di lotto (Charge)	
Non conservare oltre 25 °C/77 °C		Non esporre alla luce solare diretta.	





VITA VM CC è disponibile in colorazione VITA SYSTEM 3D-MASTER e VITA classical A1–D4. E' assicurata la compatibilità cromatica con tutti i materiali VITA 3D-MASTER e VITA classical A1–D4.

Con l'ineguagliato VITA SYSTEM 3D-MASTER si riproducono in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali.

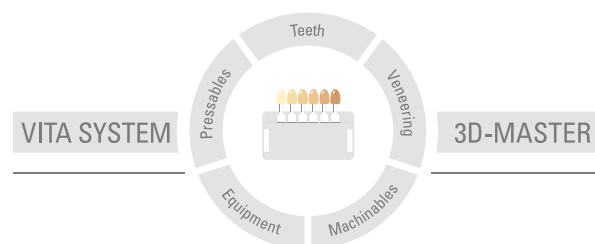

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2024-02

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)


VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati

CE 0124

VITAVM<sub>CC</sub>



Rx Only (solo per uso professionale)

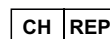

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG · Bad Säckingen (Germania)  
Succursale Basilea c/o Perrig AG, Max Kämpf-Platz 1, 4058 Basilea

# VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG  
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299  
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)