

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

Instrucțiuni de utilizare rapide



culoare de pictură extrem de fluorescentă sub formă de spray, independentă de CTE

Data emiterii: 2021-10

VITA – perfect match.

VITA

VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY – DATE % CARACTERISTICI

VITA AKZENT plus FLUOGLAZE LT SPRAY este:

- o glazură ceramică sub formă de spray extrem de fluorescentă și independentă de CTE pentru toate ceramicile de fațetare standard, din oxid de zirconiu monolitic, ceramică silicatică sau feldspatică.
- potrivit pentru obținerea unei fluorescențe naturale, în special la restaurările monolitice, integral ceramice fără auto-fluorescență
- potrivit pentru sigilarea suprafeței ceramice

La utilizarea VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY, beneficiați de următoarele avantaje:

- redarea simplă a fluorescenței
- glazurare rapidă și sigură
- rezultate deosebit de estetice prin fluorescență naturală

COMPONENTELE SISTEMULUI



VITA AKZENT® Plus FLUOGLAZE LT SPRAY

1 Utilizarea VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY



2 Aplicarea VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT SPRAY:

- Curățați restaurarea
- Agitați bine spray-ul imediat înainte de folosire
- Asigurați-vă că există o distanță de aprox. 10 cm între capul de pulverizare și suprafața de tratat.
- Pulverizați din toate părțile pentru a asigura un strat uniform
- Așezați restaurarea pe un suport de ardere pentru arderea culorilor de pictură și a glazurii și efectuați arderea conform parametrilor de ardere.



> Grosime optimă a stratului



> Strat prea subțire



> Strat prea gros

3 Rugăm notați:

- Dacă luciul nu este suficient, se poate repeta procedura de pulverizare.

4 Parametri de ardere



	Preuscare °C	→ min.	↗ °C/min.	temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITA AKZENT PLUS GLAZE LT paste	400	6.00	50	740-850*	1.00	-	500*

*Temperatura de ardere și/sau răcirea îndelungată depind de ceramica de fațetare sau de materialul folosit la substructură. Respectați instrucțiunile producătorului.

1 Crearea unei fluorescențe naturale

2 Exemplul unei coroane naturale și a unei coroane monolitice frontale din zirconiu


coroane naturale

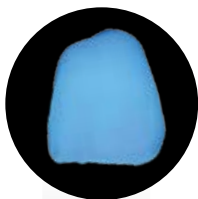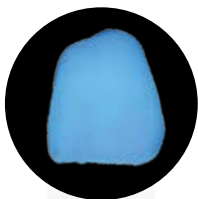

coroane monolitice
din dioxid de zirconiu




> fără auto-
fluorescență

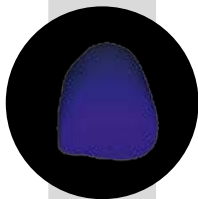


> fluorescență
prea slabă

cu materialul fluorescent compo

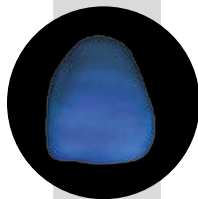

> cu striații din cauza
utilizării pastei

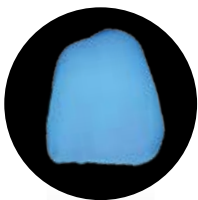

etitiv



> fluorescență
prea puternică



cu VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT



Agent fluorescent și glazură
perfect armonizate și aplicate omogen
> VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

VITA AKZENT® Plus – Portofoliu produse

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- culori de pictură intens colorate și opace
- pentru redarea culorilor individuale și adaptarea culorii la caracteristicile unei culori naturale
- dacă se aplică în strat gros, acestea vor acoperi complet culoarea de bază de dedesubt

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- materiale de finisare translucide care au efectul unei pelicule colorate subțiri pe materialul de bază.
- pentru transformări și deplasări cromatice către roșiatic, gălbui, portocaliu, maroniu și gri-verzui

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS

- culori de pictură de glazurare pentru modificarea cromaticii materialului de bază în cadrul unui grup de culori

VITA AKZENT Plus GLAZE

- material de glazurare pentru suprafețe strălucitoare, sticloase, omogene și dense după ardere

VITA AKZENT Plus GLAZE LT

- LT = Low Temperature: culori de pictură de joasă fuziune pentru ceramici cu temperaturi de ardere 800°C

VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT

- glazură extrem de fluorescentă sub formă de spray, independentă de CTE, pentru a obține fluorescența naturală

VITA AKZENT Plus Finishing Agent

- pentru o textură naturală a suprafeței cu un finisaj mat

VITA AKZENT® Plus – Culori disponibile

VITA AKZENT Plus

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

- ES01  alb
- ES02  crem
- ES03  galben lămâi
- ES04  galben intens
- ES05  oranj
- ES06  ruginiu
- ES07  kaki
- ES08  roz
- ES09  roșu închis
- ES10  lila
- ES11  albastru
- ES12  gri-albăstrui
- ES13  gri
- ES14  negru






VITA AKZENT Plus BODY STAINS

- BS01  galben
- BS02  galben maroniu
- BS03  oranj
- BS04  gri-măsliniu
- BS05  gri-marونی

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA classical A1–D4

- CSA  maroniu roșiat
- CSB  gălbui-roșiat
- CSC  gri
- CSD  gri-roșiat

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS VITA SYSTEM 3D-MASTER

- CSL  gălbui
- CSM2  galben-roșiat
- CSM3  roșu-gălbui
- CSR  roșiat
- CSIO  oranj

VITA AKZENT Plus GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FLUOGLAZE LT
- FINISHING AGENT



HOTLINE TEHNIC

Întrebări cu privire la produsele VITA?

Tehnicienii și consilierii dentari experimentați

vă răspund la:

- ▶ **Tel: +49 (0) 7761 / 56 22 22**
- ▶ **Email: info@vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **8.00 - 17.00 CET**

Informații suplimentare de contact găsiți pe

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com/contacts**



SUPPORT ONLINE

Întrebări despre produse și manipularea lor?

Puteți găsi răspunsurile competente online sub formă de **materiale video, FAQs și tutoriale online.**

Informații mai detaliate găsiți în instrucțiunile de utilizare complete VITA AKZENT Plus.

- ▶ **www.vita-zahnfabrik.com**
- ▶ **www.facebook.com/vita.zahnfabrik**

MD **CE 0124**



 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com