

VITA SMART.FIRE®

Wydajny piec do napalania uzupełnień w gabinecie (chairside)



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

Stan z 2022-06



VITA – perfect match.

VITA

VITA SMART.FIRE® SYSTEM – WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI NA PIERWSZY RZUT OKA




**zintegrowany
zestaw osprzętu**

**Piec do napalania uzupełnień
natychmiastowych (chairside)**



Panel sterowania

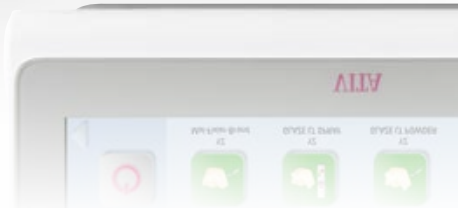

Co?

- VITA SMART.FIRE to specjalny piec do pracy w gabinecie – w tym urządzeniu przeprowadzamy proces krystalizacji, napalanie glazury, niewielkie korekty we wszystkich materiałach Chairside (do wykonywania uzupełnień natychmiastowych).

Do czego?

- VITA SMART.FIRE wspiera optymalny przebieg pracy. W celu wykonania intuicyjnego i prostego napalania, zainstalowano idealnie dobrane do materiałów programy. Profile użytkowników można skonfigurować w celu uzyskania największej możliwej elastyczności działania.

Czym?

- VITA SMART.FIRE SYSTEM składa się z jednostki do napalania ze zintegrowanym zestawem akcesoriów i oddzielnego panelu dotykowego, który może obsługiwać do czterech pieców.

KORZYŚCI

TOUCH & FIRE!

*Wybrać zainstalowany program,
bezpośrednio włączyć program
napalania - gotowe!*



1. intuicyjne sterowanie

2. komfortowe użytkowanie

3. niezawodne funkcje

TOUCH & FIRE

Intuicyjnie

- Klarowne menu posiada samoobjaśniające ikony programów
- Intuicyjna obsługa polegająca na właściwym doborze materiału i startowi programu w jednym etapie

Komfortowo

- Fabrycznie zainstalowane programy do wszystkich standardowych materiałów natychmiastowych (Chairside)
- 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości i wyjątkowej odporności na zarysowania i złamania

Niezawodnie

- Niezawodne funkcjonowanie dzięki niezawodnej technologii wypalania
- Solidna obudowa o trwałej powierzchni

VITA SMART.FIRE® KOMPONENTY –

Piec



Do wszystkich powszechnych programów napalania oraz materiałów

VITA SMART.FIRE® piec

Co?

- Kompaktowy piec do uzupełnień natychmiastowych o komfortowej obsłudze
- Trwała, solidna technologia napalania w celu niezawodnego funkcjonowania
- Solidna obudowa o nieprzepuszczalnej powierzchni
- Wbudowana szuflada serwisowa umożliwia komfortowy dostęp do osprzętu np. podstawek do napalania
- W pełni automatyczna kalibracja temperatury zezwala na uzyskanie niezawodnych wyników

Do czego?

- Do wykonania krystalizacji, glazury, napalania farbek i przeprowadzania korekty

VITA SMART.FIRE® KOMONENTY – Panel sterowania



VITA vPad excellence


Co?

- Panel sterowania z fabrycznie zainstalowanymi programami do wszystkich popularnych materiałów Chairside
- 10-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, perfekcyjnej i łatwej obsłudze oraz obrazie najlepszej jakości
- Intuicyjna koncepcja obsługi w celu właściwego wyboru materiału i startu programu, który odbywa się w jednym etapie
- Przejrzyste menu z samoobjaśniającymi ikonami do szybkiego wyboru programu i 11 indywidualnie konfigurowalnych profili
- Funkcja asystenta w oprogramowaniu do procedur napalania, krok po kroku
- Sterowanie maksymalnie czterema piecami za pomocą tylko jednego panelu sterowania
- Funkcja multimedialna

Do czego?

- Do prostej i intuicyjnej obsługi programu napalania

VITA SMART.FIRE® KOMPONENTY – Osprzęt

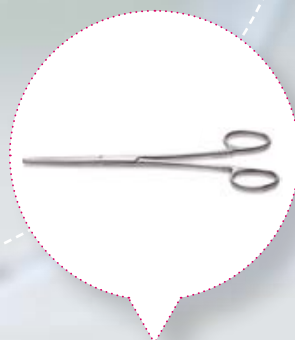

VITA SMART.FIRE® osprzęt

Co?

- Do pieca dołączony jest zestaw osprzętu, który umożliwia komfortową obsługę
- Części składowe: podstawka do napalania, sztyfty platynowe, wata żaroodporna, szczytce i stolik do studzenia napalonych prac

Do czego?

- W ten sposób zespół stomatologiczny nieodzowne narzędzia ma zawsze przy piecu.


OPIS PRODUKTU I SYSTEMU



VITA SMART.FIRE®

Oznaczenie	Wymiary	Dane techniczne	Zakres dostawy	Nr. art.
Piec do napalania uzupełnień natychmiastowych (chairside)	Obudowa ø 230 mm głębokość: 300 mm wysokość: 340 mm Komora napalania ø 80 mm wysokość: 43 mm	Podłączenie do sieci: 230 volt AC, 50 Hz lub 100/110 volt AC, 50/60 Hz Pobór mocy: 950 W Temperatura komory napalania: 1050 °C	1x piec 1x zestaw osprzętu 1x instrukcja obsługi urządzenia	DSF220 (wersja - 230V) DSF100 (wersja - 100V) DSF110 (wersja - 110V)
Panel sterowania	szerokość: 260 mm głębokość: 150 mm wysokość: 200 mm	TFT-Touch-Display – ekran dotykowy 10 cali, 1280 x 800 USB-/SD interfejs	1x przewód do sieci elektrycznej	
Osprzęt	–	–	2x sztyfty platynowe 1x wata żaroodporna 1x podstawka do napalania 1x szczytce do napalonych prac 1x stolik do studzenia napalonych prac	
Pompa próżniowa (opcja)	–	–	1x pompa próżniowa 1x wąż próżniowy	DVPU220
Sterowanie wieloma piecami (opcja)	–	–	1x Multipompa 1x Switchbox	D61000 D65000

Dalsze informacje dotyczące materiału VITA SMART.FIRE znajdują Państwo na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

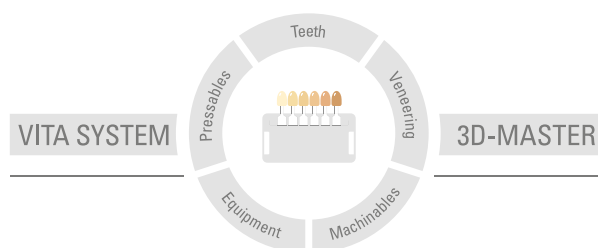

Uwaga: Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia przed użyciem czy produkt jest właściwym do zastosowania w danym polu aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu. Data wydania informacji: 2022-06

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest dostępna na stronie internetowej www.vita-zahnfabrik.com

VITA SMART.FIRE jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/95/WE, 2004/108/WE i 2011/65/WE.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik