

VITA ENAMIC® Polishing Set clinical/technical

Pour le pré-polissage et polissage haute brillance des restaurations en céramique hybride VITA ENAMIC



Détermination de la couleur VITA

Communication de la couleur VITA

Reproduction de la couleur VITA

Contrôle de la couleur VITA

Édition 2022-09

VITA – perfect match.

VITA

Description du produit

Les coffrets de polissoirs VITA ENAMIC ont été conçus pour un traitement de surface des restaurations en céramique hybride adapté au matériau, effectué au cabinet dentaire et au laboratoire.

Les coffrets contiennent divers polissoirs pour le prépolissage et le lustrage. Ces instruments assurent le polissage haute brillance adapté au matériau des faces occlusales, cuspidales, sillons et zones de contact des restaurations tout en préservant le matériau.

Avantages du produit

Bons résultats

Ces instruments permettent à l'utilisateur de conférer rapidement une brillance élevée aux restaurations ENAMIC. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées contribuent aux bons résultats.

Manipulation simple et sûre

Les instruments garantissent un excellent retrait de matière. La bonne manipulation et l'utilisation sans recours obligatoire à une pâte à polir accélèrent et simplifient le polissage. Les instruments cliniques peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement adapté au matériau

Des retouches adaptées au matériau peuvent être effectuées au moyen de ces instruments spécialement conçus pour VITA ENAMIC.

Données sur le produit

VITA ENAMIC Polishing Set clinique : comprend un total de six instruments pour contre-angle. Il contient respectivement trois instruments pour le pré-polissage et quatre autres pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC Polishing Set technique : comprend un total de six instruments pour pièce à main. Il contient respectivement trois instruments pour le pré-polissage et quatre autres pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC® Polishing Sets

Désignation	Explications	Contenu/Pièces	Réf.
VITA ENAMIC Polishing Set clinique	Système de polissage à 2 étapes avec pré-polissage et polissage haute brillance pour contre-angle	6	EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technique	Système de polissage à 2 étapes avec pré-polissage et polissage haute brillance pour pièce à main	6	EENPSETTV1

VITA ENAMIC® Polishing Set clinique – Recharges

Désignation	Explications	Contenu/Pièces	Réf.
Prépolissage (rose)	Instruments SiC (carbure de silicium)		
Brosse, VI-EB14m		3	ERWEB14M3
Lentille, VI-EL10m		6	ERWEL10M6
Cupule, VI-EC7m		6	ERWEC7M6
Polissage haute brillance (gris)	Instruments diamantés		
Brosse, VI-EB14f		3	ERWEB14F3
Lentille, VI-EL10f		6	ERWEL10F6
Cupule, VI-EC6f		6	ERWEC6F6

VITA ENAMIC® Polishing Set technique – Recharges

Désignation	Explications	Contenu/Pièces	Réf.
Prépolissage (rose)	Instruments SiC (carbure de silicium)		
Brosse, VI-EB17m		3	ERHEB17M3
Pointe, VI-ES5m		6	ERHES5M6
Disque, VI-ER15m		6	ERHER15M6
Polissage haute brillance (gris)	Instruments diamantés		
Brosse, VI-EB17f		3	ERHEB17F3
Pointe, VI-ES5f		6	ERHES5F6
Disque, VI-ER15f		6	ERHER15F6

■ EVE Ernst Vetter GmbH · Neureutstr. 6 · 75210 Keltern · Allemagne

La société EVE Ernst Vetter GmbH est certifiée et les produits suivants portent le marquage **CE 0483** :

VITA ENAMIC Polishing Set clinique et recharges correspondantes.



VITA

Vertrieb: VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG · Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany · Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299 · www.vita-zahnfabrik.com