

# VITA AKZENT® Plus

Información de producto



Determinación del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

VITA – perfect match.

**VITA**

Optimizados. Fáciles. Para todo.

Aplicación en capa fina o intensiva y glaseado:

independientemente del coeficiente de expansión térmica (CET)

VITA AKZENT® Plus Optimizados. Fáciles. Para todo.



### Mayor libertad en la clínica y el laboratorio

¿Quiere barnizar, colorear y glasear de forma fácil y eficiente? Entonces VITA AKZENT Plus es el surtido que estaba buscando.

El sistema de maquillajes de aplicación en capa fina, en capa intensiva y para glasear le permiten gozar de la máxima libertad en la clínica y el laboratorio.

Puede utilizarse con todas las cerámicas dentales y todos los CET.

Nuevos colores, nuevas formas de aplicación, nuevas indicaciones: VITA AKZENT Plus siempre le deja llevar la batuta.

Ya sea en forma de polvo, pasta o spray, usted decide cómo prefiere utilizar VITA AKZENT Plus de la forma más rentable para usted.

## VITA AKZENT® Plus SPRAY Pulverización uniforme



### AKZENT Plus SPRAY KIT

Contenido del surtido

Producto	Color	Contenido
GLAZE SPRAY		1 x 75 ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75 ml
Accesorios		



Especialmente indicado para usuarios de clínicas y laboratorios que, p. ej., quieran adaptar cromáticamente restauraciones monolíticas.

Los maquillajes rociables para barnizar y para glasear están listos para usar y son fáciles de aplicar.

FLUOGLAZE LT es un spray para glasear altamente fluorescente para conseguir una fluorescencia natural.

#### Ventajas:

- Aplicación uniforme para un tratamiento de la superficie fácil y uniforme.
- Pulverización precisa y sin desperdiciar material gracias al nuevo cabezal de pulverización especial.



VITA AKZENT® Plus POWDER

Aúna flexibilidad e individualidad con rentabilidad.



<b>AKZENT Plus POWDER KIT</b>		
Contenido del surtido		
Producto	Color	Contenido
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3 g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3 g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3 g
GLAZE		1 x 5 g
GLAZE LT		1 x 5 g
FINISHING AGENT		1 x 5 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml
Accesorios		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master</b>		
Contenido del surtido		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4</b>		
Contenido del surtido		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4 g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Los materiales VITA AKZENT Plus POWDER son ideales para prótesis que quieran caracterizar con ellos cerámicas de recubrimiento clásicas.

**Ventajas:**

- alta Flexibilidad y rentabilidad
- Pueden mezclarse entre sí como se prefiera para obtener más efectos cromáticos personalizados
- Adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad y de la intensidad cromática

## VITA AKZENT® Plus PASTE Personalizaciones rápidas



<b>AKZENT Plus PASTE KIT</b> Contenido del surtido		
Producto	Color	Contenido
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4 g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4 g
GLAZE PASTE		1 x 4 g
GLAZE LT PASTE		1 x 4 g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml
Accesorios		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master</b> Contenido del surtido		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4</b> Contenido del surtido		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4 g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



Los maquillajes VITA AKZENT Plus PASTE son idóneos para la caracterización fácil y rápida de restauraciones de, p. ej., VITABLOCS.



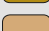

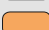







### Ventajas:


- Pasta lista para usar, de consistencia uniforme y pigmentación homogénea, para una aplicación rápida
- Pueden mezclarse entre sí para obtener efectos cromáticos personalizados.
- Pueden diluirse y volverse a mezclar
- Adaptación rápida y sencilla del efecto cromático, de la cromaticidad y de la intensidad cromática

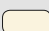

El VITA AKZENT Plus PASTE FLUID proporciona una consistencia óptima si las pastas se han quedado resacas.

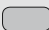

Gama de colores AKZENT Plus						
Surtido						
Producto	Muestra de color	Color	Den. abrev.	Presentación		
				Spray	Powder	Paste
<b>BODY STAINS</b> – Maquillajes translúcidos de aplicación en capa fina – Para modificar el efecto cromático del material de base		amarillo	BS01			
		marrón amarillento	BS02		✓	✓
		naranja	BS03			
		gris oliva	BS04			
		marrón grisáceo	BS05			
<b>CHROMA STAINS classical A1-D4</b> – Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de colores		rojizo-pardusco	CSA			
		rojizo-amarillento	CSB			
		grisáceo	CSC		✓	✓
		grisáceo-rojizo	CSD			
<b>CHROMA STAINS 3D-MASTER</b> – Colores de aplicación en capa fina para modificar la cromaticidad del material de base dentro de un grupo de claridad		amarillento	CSL			
		amarillento-rojizo	CSM2		✓	✓
		amarillo-rojo	CSM3			
		rojizo	CSR			
		naranja	CSIO			
<b>EFFECT STAINS</b> – Maquillajes de aplicación en capa intensiva con gran capacidad de cubrimiento – Para efectos superficiales naturales – Para el coloreado durante la estratificación		blanco	ES01			
		crema	ES02			
		amarillo limón	ES03			
		amarillo sol	ES04			
		naranja	ES05			
		rojo óxido	ES06			
		caqui	ES07		✓	✓
		rosa	ES08			
		rojo oscuro	ES09			
		lila	ES10			
		azul	ES11			
		azul grisáceo	ES12			
		gris	ES13			
		negro	ES14			
<b>GLAZE</b> – Para superficies homogéneas y brillantes				✓	✓	✓
<b>GLAZE LT</b> – Material de glasear de bajo punto de fusión para cerámicas con una temperatura de cocción inferior a 800 °C				✓	✓	✓
<b>FINISHING AGENT</b> – Para superficies satinado mate					✓	✓

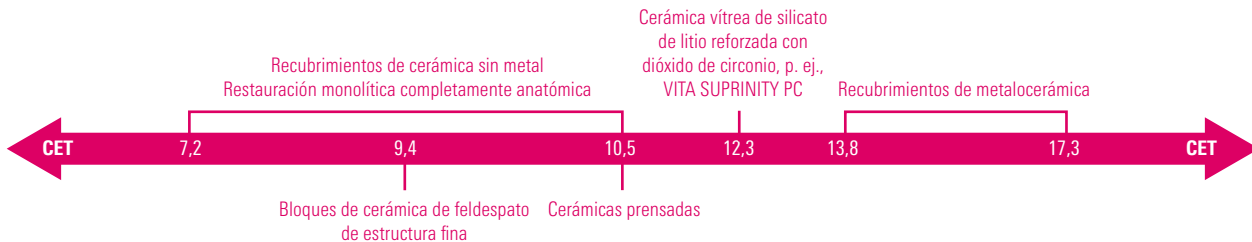

### + El plus de versatilidad

#### Aplicación en capa fina

Novedad en el sistema: maquillajes de aplicación en capa fina (Body Stains).

Los maquillajes translúcidos actúan como un delgado filtro de color.

Por eso son ideales para:

- Pintar la superficie
- Modificar el efecto cromático del material de base

#### Aplicación intensiva

Los maquillajes de aplicación intensiva (Effect Stains) son de grano especialmente fino.

Estos maquillajes se caracterizan principalmente por:

- un efecto cromático intenso y
- una gran capacidad de cubrimiento

Por eso están indicados especialmente para conseguir efectos superficiales naturales y para el coloreado interno.

#### Glaseado


Para un acabado brillante:

- VITA AKZENT Plus GLAZE: el material de glasear para obtener una superficie brillante, homogénea y vítrea tras la cocción
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT: el material de glasear de bajo punto de fusión para cerámicas con una temperatura de cocción inferior a 800 °C
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT: los polvos barniz para obtener superficies de recubrimiento de aspecto satinado mate
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT - spray para glasear altamente fluorescente para conseguir una fluorescencia natural

### + El plus de comodidad de elaboración

Todos los maquillajes son fluorescentes, de grano extraordinariamente fino y cromáticamente estables. Además, la consistencia tixotrópica de los polvos y las pastas redonda en beneficio de una aplicación precisa del respectivo material.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

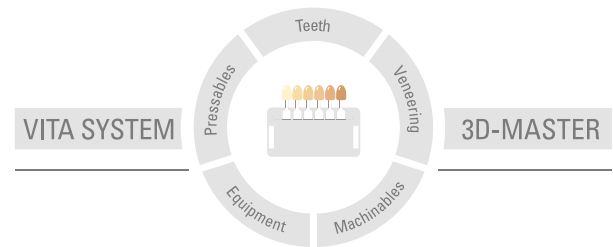

**Nota importante:** nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2023-06

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

**CE 0124**

VITA AKZENT® Plus



# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)