

# VITA AKZENT® Plus

Informacje o produkcie



VITA ustalenie koloru

VITA komunikacja koloru

VITA reprodukcja koloru

VITA kontrola koloru

VITA – perfect match.

**VITA**

Optimalnie. Łatwo, wszystko.

Nałożenie powłoki przezświetlającej, zaznaczenie i glazurowanie - niezależnie od współczynnika rozszerzalności cieplnej (WRC)

VITA AKZENT® Plus **Optymalnie. Łatwo, Wszystko.**



### **Więcej możliwości w gabinecie i pracowni**

Czy chcecie łatwo i wydajnie barwić, lazurować i glazurować?  
Asortyment VITA AKZENT Plus jest na pewno waszym materiałem.

System składający się z farbek lazurujących, znaczących i glazurujących umożliwia  
oraz gwarantuje szeroki zakres zastosowania w gabinecie i pracowni.

Materiał można stosować w połączeniu ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi  
oraz dla każdego WRC.

Nowe kolory, nowe formy użytkowania, nowy zakres zastosowania -  
VITA AKZENT Plus umożliwia wolny wybór.

Czy w postaci proszku, pasty lub sprayu, sami Państwo wybieracie w jakiej postaci  
i najbardziej wydajnie można zastosować VITA AKZENT Plus.

VITA AKZENT® Plus SPRAY

Równomiernie za jednym przyciśnięciem



#### AKZENT Plus SPRAY KIT

Zawartość asortymentu

Produkt	Kolor	Zawartość
GLAZE SPRAY		1 x 75ml
GLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
FLUOGLAZE LT SPRAY		1 x 75ml
Osprzęt		



Szczególnie przydatny w gabinecie i pracowni, jak np. w celu dopasowania kolorystyki uzupełnienia z ceramiki kolorystycznie jednolitej. Glazura i lazura w sprayu są gotowe do użycia i łatwe do aplikacji. FLUOGLAZE LT to wysoce fluorescencyjny spray do glazury w celu stworzenia naturalnej fluorescencji.

#### Korzyści:

- równomierne i łatwe nakładanie dla uzyskania jednolitej powierzchni.
- ukierunkowane napylanie bez utraty materiału dzięki nowej i specjalnej głowicy pyłacej





AKZENT Plus POWDER KIT		
Zawartość asortymentu		
Produkt	Kolor	Zawartość
EFFECT STAINS	ES01 – ES14	14 x 3g
BODY STAINS	BS01 – BS05	5 x 3g
CHROMA STAINS	CSA – CSD	4 x 3g
GLAZE		1 x 5g
GLAZE LT		1 x 5g
FINISHING AGENT		1 x 5g
POWDER FLUID		1 x 20ml
Osprzęt		

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT 3D-Master		
Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml

AKZENT Plus CHROMA STAINS KIT classical A1–D4		
Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS	CSA-CSD	4 x 4g
POWDER FLUID		1 x 20 ml



Masy VITA AKZENT Plus POWDER przeznaczone dla techników dentystycznych, którzy chcą charakteryzować klasyczne ceramiki.

#### Korzyści:

- wysoka elastyczność i wydajność
- możliwość wzajemnego mieszania mas, w celu uzyskania indywidualnych efektów kolorystycznych.
- łatwe i szybkie dostosowanie efektu kolorystycznego, chromatyczności i natężenie barwy



## VITA AKZENT® Plus PASTE

**Bardzo szybko i indywidualnie**



<b>AKZENT Plus PASTE KIT</b> Zawartość asortymentu		
Produkt	Kolor	Zawartość
EFFECT STAINS PASTE	ES01 – ES14	14 x 4g
BODY STAINS PASTE	BS01 – BS05	5 x 4g
GLAZE PASTE		1 x 4g
GLAZE LT PASTE		1 x 4g
FINISHING AGENT PASTE		1 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15ml
Osprzęt		

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT 3D-Master</b> Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS PASTE	CSL/CSR/CSM2/ CSM3/CSIO	5 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml

<b>AKZENT Plus CHROMA STAINS PASTE KIT classical A1-D4</b> Zawartość asortymentu		
CHROMA STAINS PASTE	CSA-CSD	4 x 4g
PASTE FLUID		1 x 15 ml



Farbki w paście VITA AKZENT Plus PASTE nadają się znakomicie do szybkiej, optymalnej i prostej charakteryzacji uzupełnień np. z materiału VITABLOCS

### Korzyści:


- gotowa do użytku pasta posiada homogeniczną pigmentację i jednakową konsystencję.
- możliwość wzajemnego mieszania w celu uzyskania indywidualnych efektów kolorystycznych
- możliwość rozcieńczania lub powtórnego mieszania
- łatwe i szybkie dostosowanie efektu kolorystycznego, chromatyczności i natężenie barwy



Płyn VITA AKZENT Plus PASTE FLUID gwarantuje optymalną konsystencję materiału, również w przypadku wyschnięcia pasty.



AKZENT Plus Wybór kolorów Asortyment						
Produkt	Próbki kolorów	Kolor	Nazwa skrócona	Forma branżowa		
				Spray	Powder	Paste
<b>BODY STAINS</b> – przezierne farby – do zmiany oddziaływania koloru materiału podkładowego - jądra		żółty	BS01			
		żółto-brązowy	BS02		✓	✓
		pomarańczowy	BS03			
		oliwkowo-szary	BS04			
		szaro-brązowy	BS05			
<b>CHROMA STAINS classical A1–D4</b> – półprzezroczyste kolory do zmiany prezentowania się koloru materiału podstawowego w obrębie jednej grupy kolorów		brązowo-czerwonawy	CSA			
		czerwono-żółtawy	CSB		✓	✓
		szarawy	CSC			
		szaro-czerwonawy	CSD			
<b>CHROMA STAINS 3D-MASTER</b> – półprzezroczyste kolory do zmiany prezentowania się koloru materiału podstawowego w obrębie wybranej grupy jasności		żółtawy	CSL			
		czerwono-żółtawy	CSM2		✓	✓
		żółto-czerwony	CSM3			
		czerwonawy	CSR			
		pomarańczowy	CSIO			
<b>EFFECT STAINS</b> – farby znaczące i bardzo dobrze kryjące – dla naturalnych efektów na powierzchni uzupełnienia – przeznaczone do barwienia w czasie nakładania warstw ceramiki		biały	ES01			
		kremowy	ES02			
		cytrynowo-żółty	ES03			
		słoneczno-żółty	ES04			
		pomarańczowy	ES05			
		rdzawo-czerwony	ES06			
		khaki	ES07		✓	✓
		różowy	ES08			
		ciemno-czerwony	ES09			
		liliowy	ES10			
		niebieski	ES11			
		szaro-niebieski	ES12			
		szary	ES13			
		czarny	ES14			
<b>GLAZE</b> – dla homogenicznych, błyszczących powierzchni				✓	✓	✓
<b>GLAZE LT</b> – niskotopliwa masa glazury dla ceramik, których temperatura napalania znajduje się poniżej 800°C				✓	✓	✓
<b>FINISHING AGENT</b> – dla jedwabście-matowych powierzchni					✓	✓

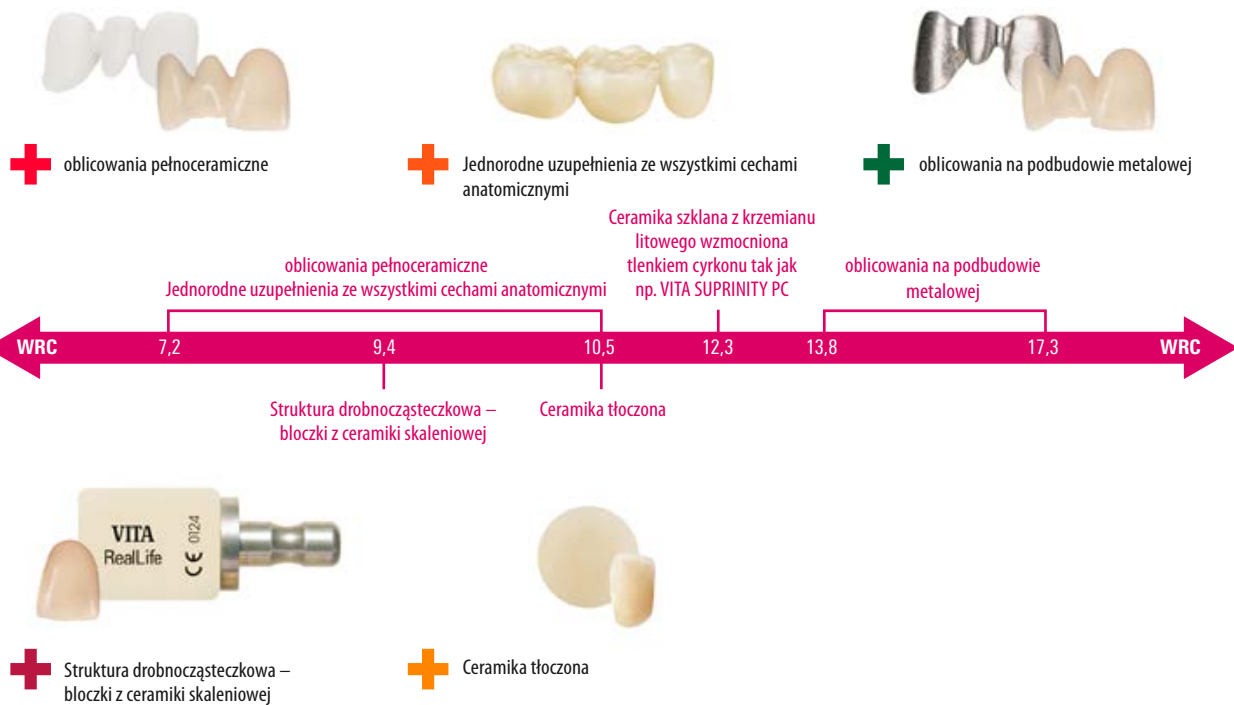

## + Duży Plus dla wszechstronności

### Lazurowanie - nakładanie warstwy prześwitującej

Nowość w systemie: farby przeierne (Body Stains). Farby przeierne funkcjonują jak cienki filtr kolorów.

Dzięki temu czynnikowi farbki nadają się znakomicie do:

- malowania powierzchni
- zmiany oddziaływania koloru materiału podkładowego - jądra

### wyróżnianie

Sz szczególnie drobnoziarniste farby dające efekt wyróżnienia (Effect Stains).

Te farby cechują się w szczególności:

- intensywnym oddziaływaniem koloru
- dokładnym kryciem powierzchni

Dlatego zalecane są do tworzenia naturalnych efektów powierzchniowych i wewnętrznego barwienia.

### Glazurowanie


Dla błyszczącego wykończenia pracy:

- VITA AKZENT Plus GLAZE – masa glazury przeznaczona do tworzenia błyszczącej, homogenicznej i szklistej powierzchni.
- VITA AKZENT Plus GLAZE LT – niskotopliwa masa glazury stosowana w ceramikach, których temperatura napalania znajduje się poniżej 800°C.
- VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT – masa lazury do tworzenia jedwabisto-matowych powierzchni licowanych.
- VITA AKZENT Plus FLUOGLAZE LT – wysoce fluorescencyjny spray do glazury
- w celu tworzenia naturalnej fluorescencji.

## + To Plus dla komfortowej obróbki

Wszystkie farbki posiadają czynnik fluorescencji, wyjątkowo drobne ziarno oraz stabilności koloru. Tikotropowa konsystencja proszku i pasty umożliwia precyzyjne nakładanie wybranej masy.

Za pomocą kolornika VITA SYSTEM 3D-MASTER można odpowiednio i systematycznie dobrać i zreprodukować wszystkie naturalne kolory zębów.

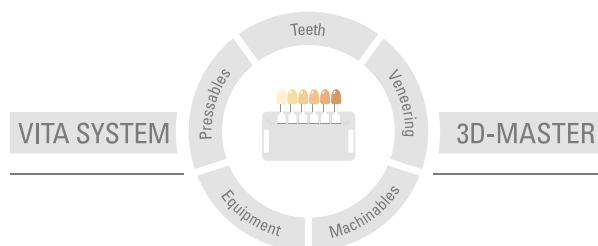

**Uwaga:** Nasze produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego stosowania i obsługi. Poza tym zobowiązuje się użytkownika do sprawdzenia przed użyciem czy produkt jest właściwym do zastosowania w danym polu aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody jeśli produkt jest stosowany w połączeniu i przy użyciu materiałów i urządzeń pochodzących od innych producentów, a które są niekompatybilne lub nie posiadają autoryzacji do stosowania z naszymi produktami. Skrzynka modułowa VITA nie musi koniecznie wchodzić w skład ww zestawu. Data wydania informacji: 2023-06

Wszystkie dotychczasowe wydania tej broszury informacyjnej tracą swoją ważność z dniem pojawienia się w obiegu aktualnego wydania. Aktualna wersja broszury jest dostępna na stronie internetowej [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Firma VITA Zahnfabrik posiada certyfik a następujące produkty noszą znak

CE 0124

VITA AKZENT® Plus



# VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299  
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)