

VITA WiFi-Dongle para fornos VITA

Manual de instruções



VITA – perfect match.

VITA

Avisos de segurança e pictogramas

Explicação dos símbolos		
Voltagem perigosa	Este pictograma adverte sobre voltagem perigosa. Antes de ser aberto, o aparelho deve ser desligado retirando-se a ficha da tomada.	
Aviso	Abriu o corpo do aparelho pode trazer como consequência danos ao próprio..	
Descarte seletivo	Observar as regras de eliminação de aparelhos elétricos/eletrônicos; eliminação não deve ocorrer através do lixo residencial. A barra preta sob o símbolo "lata de lixo" significa que o aparelho foi colocado no mercado depois de 13.08.2005. Observe que este aparelho está sujeito à Diretiva 2012/19/UE (REEE) e às leis nacionais aplicáveis em seu país e que deverá ser descartado de acordo com os procedimentos adequados. Entre em contato com seu revendedor caso o aparelho deva ser descartado.	
Marcação CE	O VITA WiFi-Dongle cumpre os regulamentos da União Europeia (UE). A declaração de conformidade pode ser solicitada à VITA (Dpto. Regulatory Affairs) em: www.vita-zahnfabrik.com	

2 Utilização prevista

2.1 Modos de funcionamento não admissíveis

Não é permitida a utilização do aparelho com fontes de energia e produtos perigosos ou com instalações modificadas que podem ser danosos à saúde.

2.2 Modos de funcionamento admissíveis

A operação do aparelho é permitida somente se as instruções contidas neste Manual do Usuário tiverem sido lidas e compreendidas, bem como observados os procedimentos aqui descritos. É considerado impróprio qualquer outro uso além do indicado, como o processamento de produtos diferentes daqueles previstos para esta finalidade, bem como a manipulação de materiais ou substâncias perigosas. Neste caso, o fabricante/fornecedor não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes.

O risco fica exclusivamente a cargo do usuário.

2.3 Condições ambientais

- Utilização em espaços internos
- Temperatura ambiente de -10 °C a 40 °C
- Umidade relativa do ar de 80% a 40 °C
- Altitude máxima de 3800 m acima do nível do mar
- Flutuações da tensão nominal não superiores a mais de 10% e menos de 15% da tensão nominal.

3 Fornecimento

- VITA WiFi-Dongle
- Manual de instruções

4 Dados técnicos

Faixa de frequência:

- Faixa de frequência de 2,4 GHz

O aparelho atende às seguintes normas:

- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010
- EN 62311:2008
- ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
- ETSI EN 301 389-17 V2.1.1 (2009-05)
- ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

A VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG declara por meio deste que o equipamento de rádio VITA WiFi-Dongle está em conformidade com a diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível através do site: <https://www.vita-zahnfabrik.com/de>

5 Configurar o VITA WiFi-Dongle

5.1 Inserir o VITA WiFi-Dongle

Insira o VITA WiFi-Dongle na entrada USB no lado inferior direito do forno.



Figura 1 - Inserir o VITA WiFi-Dongle

1	Inserir o VITA WiFi-Dongle
---	----------------------------

5.2 Definições do aparelho

Selecione as definições do aparelho.

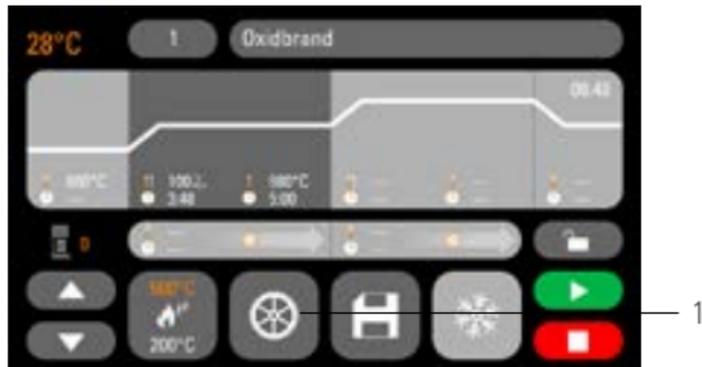


Figura 2 - Tela inicial

1	Configurações do aparelho
---	---------------------------

5.3 Definições do WiFi

Selecione as definições do WiFi.



Figura 3 - Visão geral das definições do aparelho

N.º	Designação
1	Definições do WiFi
2	Opções de atualização
3	Dados dos aparelhos
4	Voltar para a tela inicial

5.4 Selecionar rede WiFi

Selecione sua rede.



Figura 4 - Selecionar rede WiFi

1	Selecionar rede WiFi
2	Desligar WiFi
3	Desconectar WiFi
4	Voltar para as definições do aparelho
5	Pesquisar rede

5.5 Inserir senha

Insira sua senha para a rede selecionada por meio do teclado que surge na tela.



Figura 5 - Inserir senha

1	Inserção da senha do WiFi
2	Excluir último
3	Excluir campo
4	Voltar sem alteração
5	Confirmação

6 Funções do VITA WiFi-Dongle

6.1 Atualização on-line

1. Acesse as definições do aparelho (consulte Definições do aparelho)
2. Acesse as opções de atualização (consulte Definições do WiFi)
3. Selecione Atualização on-line

Em seguida é verificado se uma nova atualização on-line está disponível.

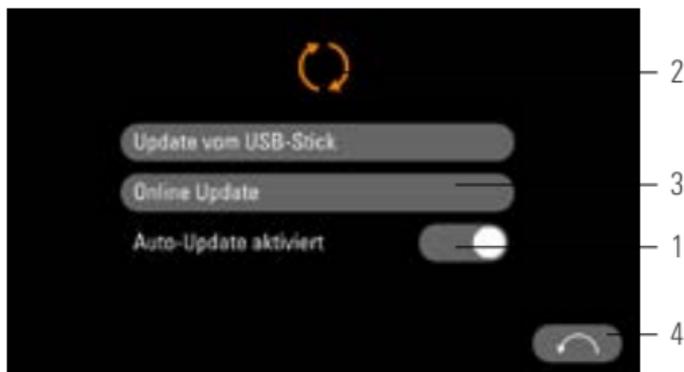


Figura 6 - Ativar atualização on-line

1	Ativar atualização automática
2	Atualizar pelo pen drive
3	Atualização online
4	Voltar para as definições do aparelho

Aviso: se "Auto-Update" estiver ativado, ocorre uma busca por novas atualizações toda vez que o forno for ligado.

6.2 Enviar à VITA dados de processo on-line

1. Acesse as definições do aparelho (consulte Definições do aparelho)
2. Acesse os dados do aparelho (consulte Definições do WiFi)
3. Selecione „An VITA senden“ (Enviar à VITA).



Figura 7 - Enviar dados do aparelho à VITA

1	Enviar dados do aparelho para uma pen drive
2	Enviar dados do aparelho para VITA serviços do dispositivo
3	Voltar para as definições do aparelho

6.3 VITA FurnaceApp

Aviso: o VITA FurnaceApp só pode ser usado em aparelhos Android.

- Fazer o download do VITA FurnaceApp no Google Play Store



Figura 8 - QR code do VITA FurnaceApp



Figura 9 -
Símbolo do Google Play Store



Figura 10 - Tela inicial do VITA FurnaceApp

1	Canal VITA no YouTube
2	Pesquisar novos aparelhos VITA
3	Configurações
4	Seleção da interface de usuário do VITA FurnaceApp
5	Sair do VITA FurnaceApp

6.5 Interface de usuário do VITA FurnaceApp

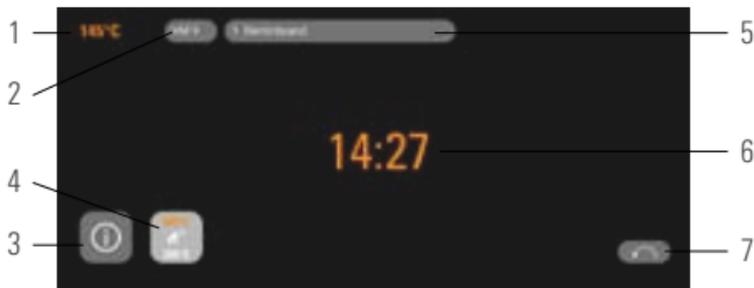


Figura 11 - Exibição do forno no VITA FurnaceApp

1	Exibição de temperatura
2	Nome do material
3	Informações do aparelho
4	Standby
5	Nome do programa
6	Duração do programa
7	Voltar para a tela inicial

Aviso: o VITA FurnaceApp só pode ser usado em uma rede WiFi local. Isso significa que o forno e o dispositivo operando o VITA FurnaceApp devem estar conectados a uma mesma rede WiFi.

6.6 Definições do VITA FurnaceApp

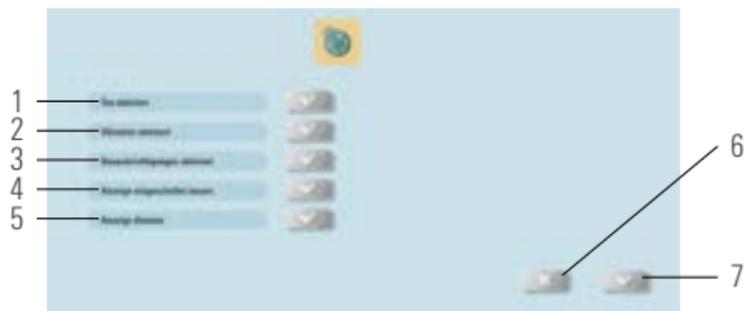


Figura 12 - Definições VITA FurnaceApp

1	Ativar som
2	Ativar vibração
3	Ativar mensagens
4	Deixar visor ligado
5	Regular iluminação do visor
6	Voltar para a tela inicial sem alterações
7	Salvar definições

7 Garantia e responsabilidade

A garantia e a responsabilidade dependem das condições contratuais especificadas. Em caso de mudanças do software sem conhecimento ou autorização da VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, estará invalidada qualquer reclamação de garantia e responsabilidade.

7.1 Contato da VITA

Para mais informações sobre o aparelho, visite o site:

<http://www.vita-zahnfabrik.com>

As atualizações de software estão disponíveis para download em

Products/Firing/Furnaces/VITA V60 i-Line PLUS.

Além disso, em Service/VITA Update-Messenger você tem a possibilidade de se registrar para ser notificado automaticamente por e-mail, através do Update-Messenger, sobre as informações atuais do aparelho. Para questões técnicas sobre o aparelho, bem como para serviços de assistência técnica e garantia, as seguintes opções de contato estão disponíveis:

E-mail: instruments@vita-zahnfabrik.com Tel. +49 (0) 7761 / 562 - 111

Direitos autorais

Este Manual do Usuário deve ser tratado em caráter confidencial.


Deve ser utilizado somente pelas pessoas autorizadas.

A transferência a terceiros é permitida somente mediante aprovação expressa por escrito da VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG. Todos os documentos estão protegidos no âmbito da lei de direitos autorais. A transmissão, bem como a reprodução de documentos, mesmo que parcialmente, a utilização e divulgação de seu conteúdo não está permitida sem autorização expressa por escrito.

A falta de observação das condições acima mencionadas é passível de punição e indenização.

Reservamo-nos todos os direitos de propriedade industrial e intelectual.

Com o excepcional sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER, todas as cores naturais de dentes são selecionadas de forma sistemática e reproduzidas completamente.

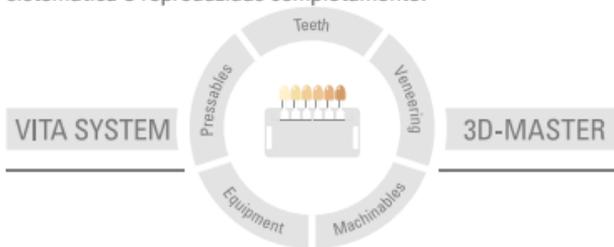

Observação: nossos produtos devem ser utilizados de acordo com as informações de utilização. Não nos responsabilizamos por danos causados em virtude de manuseio ou uso incorretos. O usuário deverá verificar o produto antes de seu uso para atestar a adequação do produto à área de utilização pretendida. Não será aceita qualquer responsabilização se o produto for utilizado juntamente com materiais e equipamentos de outros fabricantes que não sejam compatíveis ou permitidos para uso com nosso produto e assim causem danos. O VITA Modulbox não é um componente obrigatório do produto. Data de publicação deste manual de instruções: 2023-09

Todas as edições anteriores perdem a validade com a publicação destas informações de utilização. A respectiva versão atualizada está disponível através do site www.vita-zahnfabrik.com

O VITA WiFi-Dongle possui a marcação CE em conformidade com as diretivas CE 2014/30/UE, 2011/65/UE e 2014/53/UE.

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/562-0 · Fax +49 (0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/562-222 · Fax +49 (0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik