

VITAVM®LC flow – il brillante composto di rivestimento

Modellazione precisa. Lucidatura semplice.



VITA Determinazione del colore

VITA Comunicazione del colore

VITA Riproduzione del colore

VITA Controllo del colore

VITA – perfect match.


VITA

Descrizione del prodotto

VITA VM LC flow è un composto di rivestimento fotopolimerizzabile, a bassa viscosità per riabilitazioni dentali fisse e mobili. La consistenza fluida e nel contempo l'elevata stabilità del

composito consentono una modellazione precisa. Grazie alla particolare composizione del materiale si lucida facilmente, assicurando superfici omogenee e di lucentezza brillante.

FLUIDO E STABILE

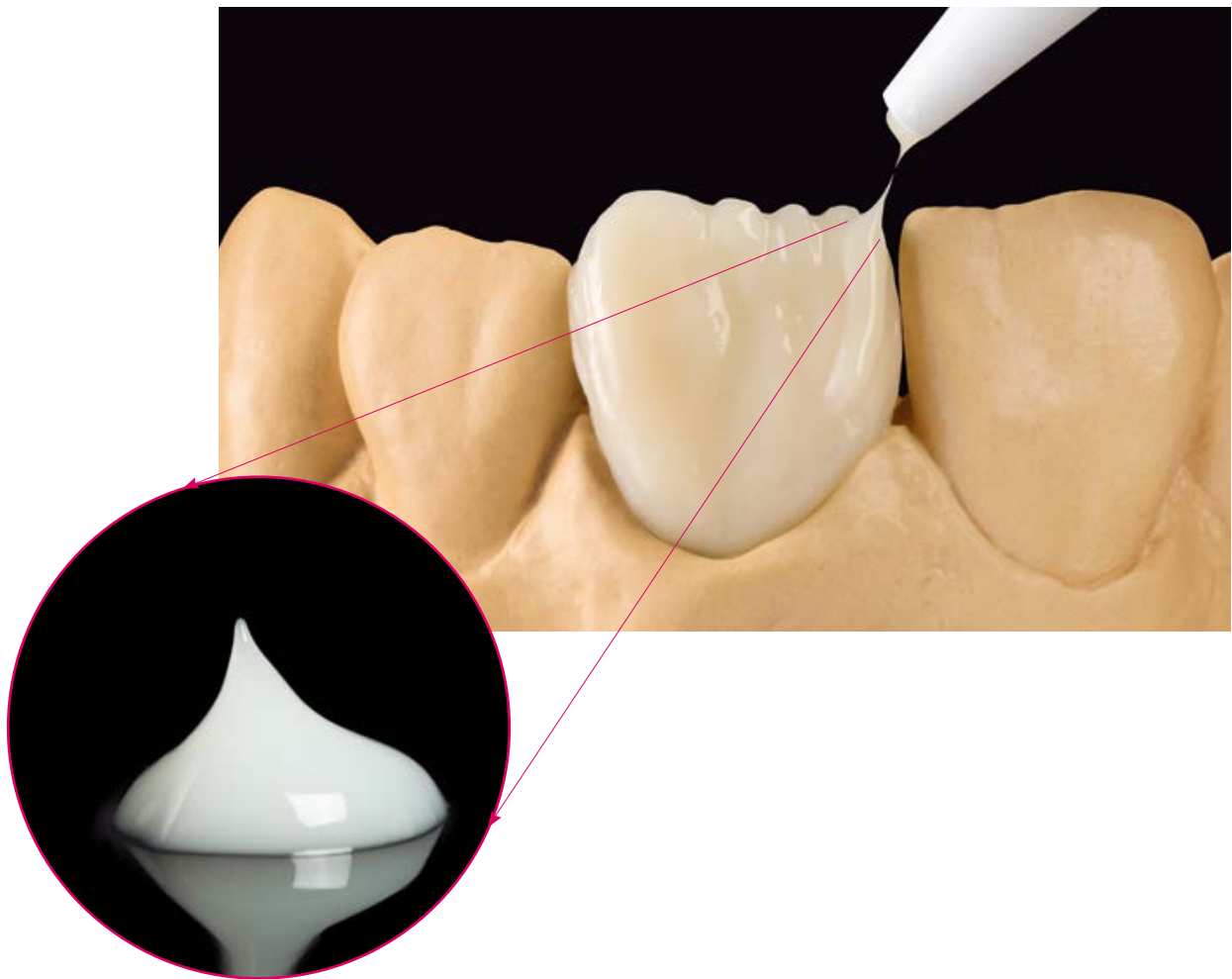

Cosa?

- VITA VM LC flow è un composito di rivestimento fotopolimerizzabile, a bassa viscosità per riabilitazioni dentali fisse e mobili. Il moderno sistema di rivestimento estetico si distingue per un'ottima fluidità e nel contempo per l'elevata stabilità.


Per cosa?

- VITA VM LC flow ha un'ampia gamma di indicazioni:
 - rivestimento estetico di corone, ponti, corone telescopiche, sovrastrutture su impianti
 - individualizzazione di denti protesici
 - ricostruzione di parti gengivali
 - caratterizzazione di basi protesiche

Con cosa?

- I componenti principali del sistema di rivestimento VITA VM LC flow sono: OPAQUE, BASE DENTINE, ENAMEL e numerose masse aggiuntive. E' possibile modellare direttamente con la siringa, oppure con un pennello o uno strumento.

VANTAGGI

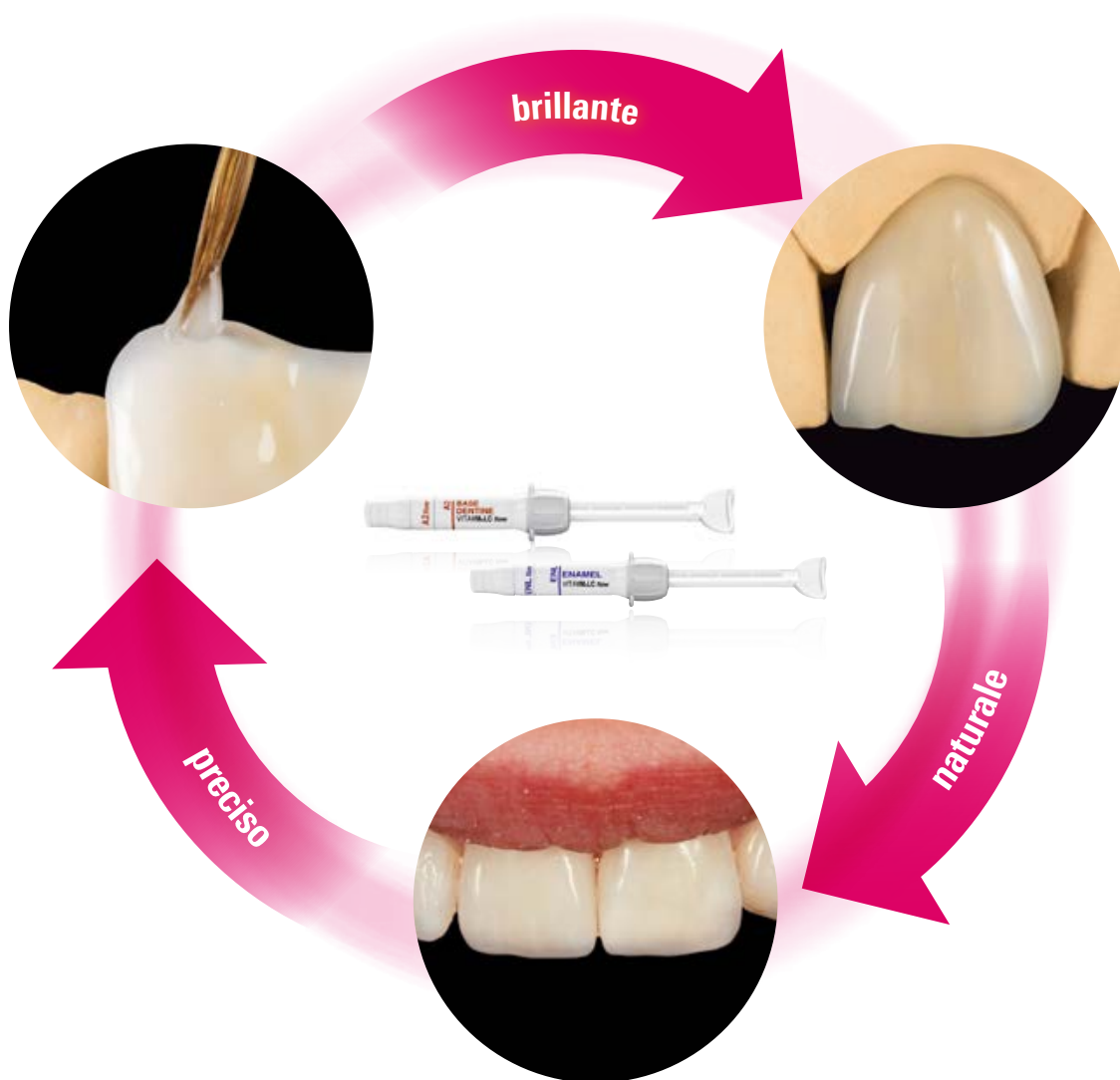

Preciso

- Modellazione precisa grazie alla consistenza tissotropica, che assicura una fluidità ottimale e nel contempo elevata stabilità.

naturale

- Le masse ENAMEL ed EFFECT con traslucenza, opalescenza e fluorescenza integrate assicurano risultati vitali secondo il modello naturale.


brillante

- Superfici omogenee con una brillante lucentezza, grazie alla semplicità di lucidatura imputabile alla matrice polimerica ad alta reticolazione con micro-particelle di carica distribuite omogeneamente.

Resistente

- Caricabilità e resistenza superficiale elevate consentono riabilitazioni di lunga durata grazie ad un materiale con ottime caratteristiche meccaniche.


SISTEMA E CONCETTO

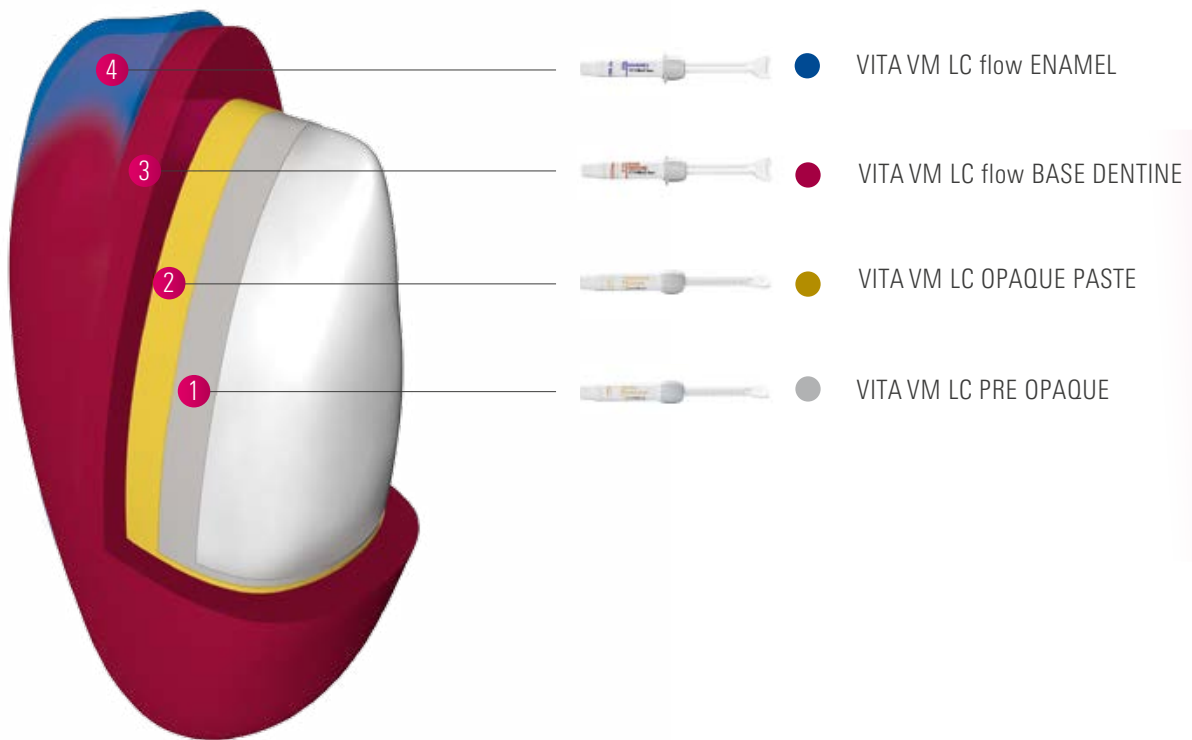

VITAVM®**LC flow SYSTEM**: COMPONENTI BASE

- Masse VITA VM LC PRE OPAQUE e OPAQUE PASTE per il mascheramento delle strutture
- Masse VITA VM LC flow BASE DENTINE per l'area cervicale e del corpo
- Masse VITA VM LC flow ENAMEL per l'area incisale


ESEMPIO

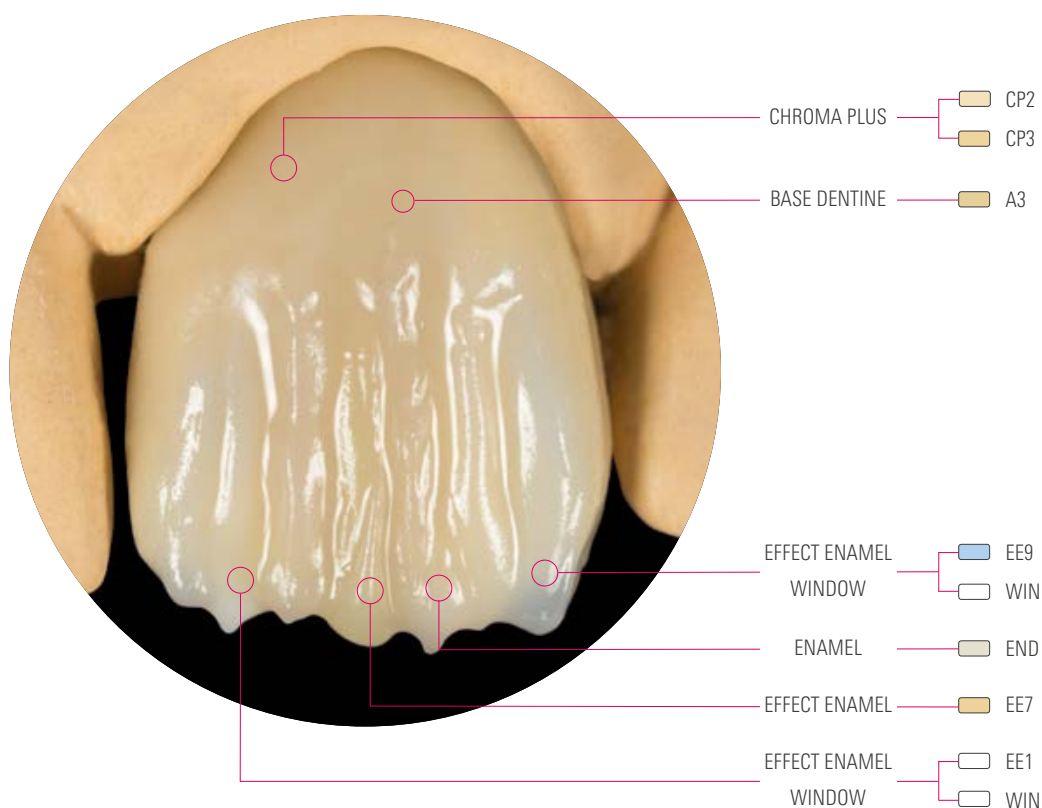

VITAVM[®]LC *flow* SYSTEM: COMPONENTI AGGIUNTIVI


- Masse VITA VM LC flow EFFECT per l'area incisale
- Masse VITA VM LC flow CHROMA PLUS per l'intensificazione cromatica dell'area cervicale e del corpo
- Masse VITA VM LC flow GINGIVA per la ricostruzione di aree gengivali
- Supercolori VITA VM LC PAINT per la riproduzione di effetti cromatici

COMPONENTI

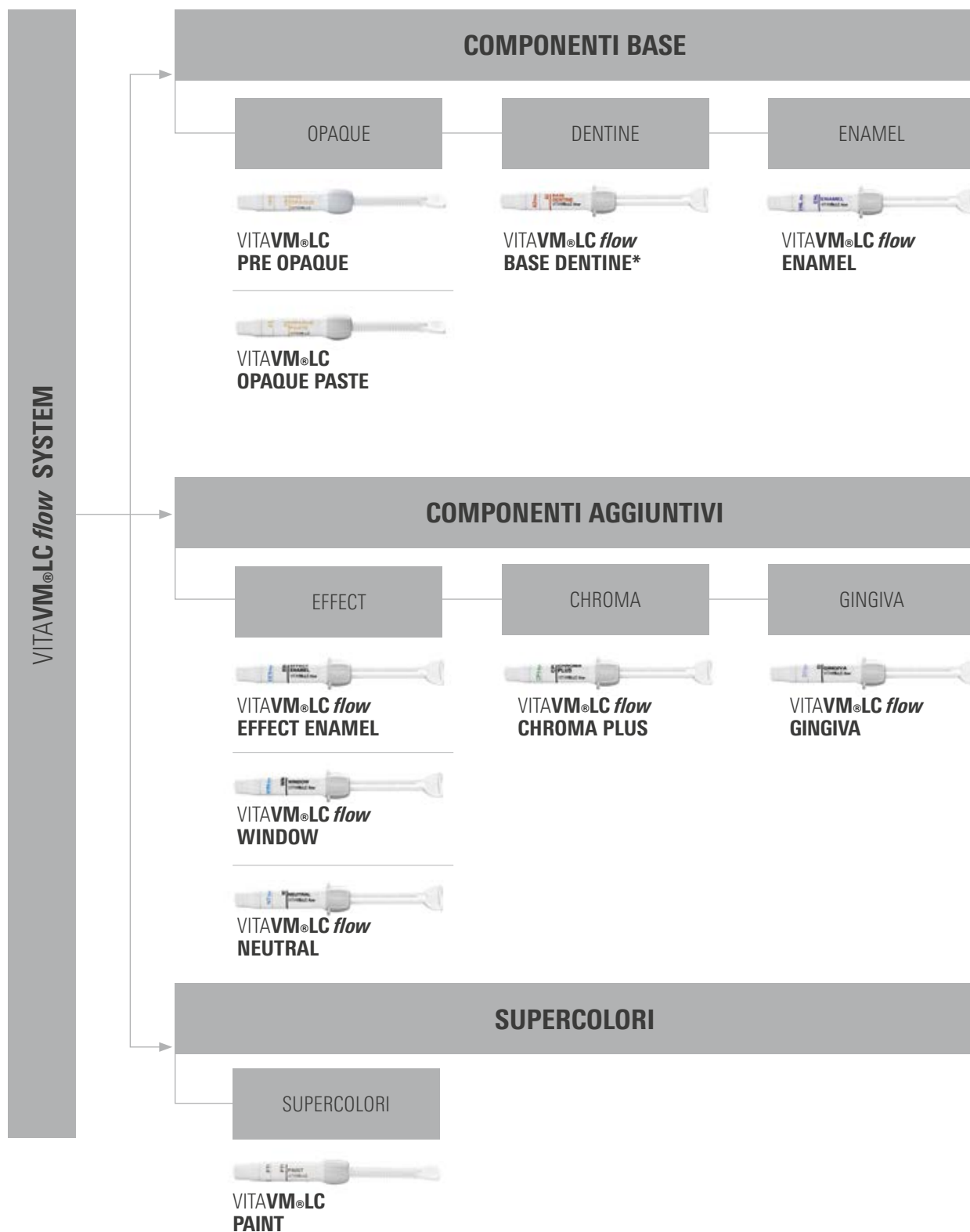


Avvertenza: VITA VM LC flow SYSTEM è compatibile con i fotopolimerizzatori ed i sistemi di legame (es. VITA VMLC PRIMER) in commercio e quindi immediatamente utilizzabile. Per un elenco dettagliato consultare www.vita-zahnfabrik.com. Disponibile in 8 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER e 15 colori VITA classical A1-D4

COLORI DISPONIBILI

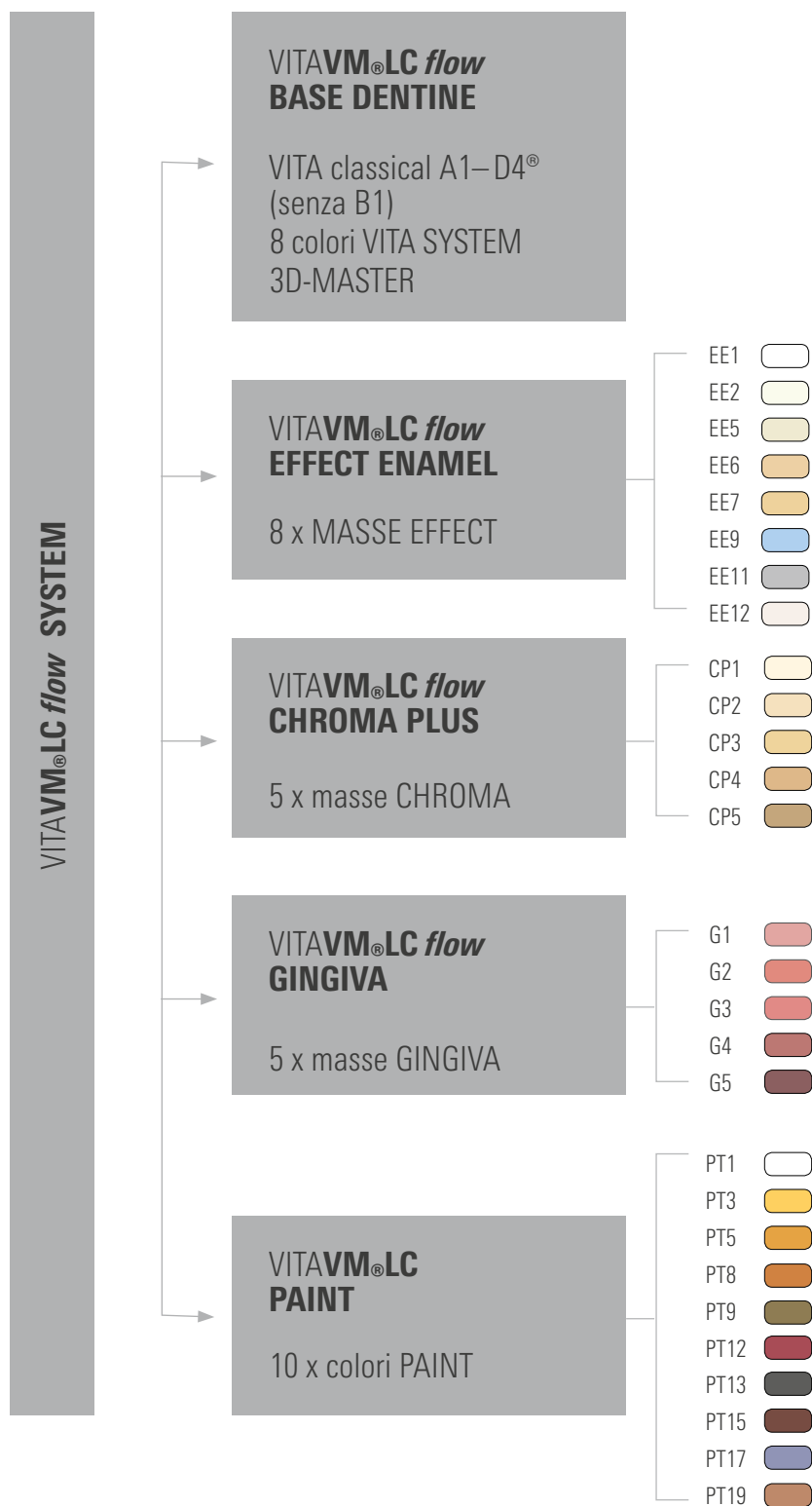

SETTORI DI IMPIEGO E MATERIALI

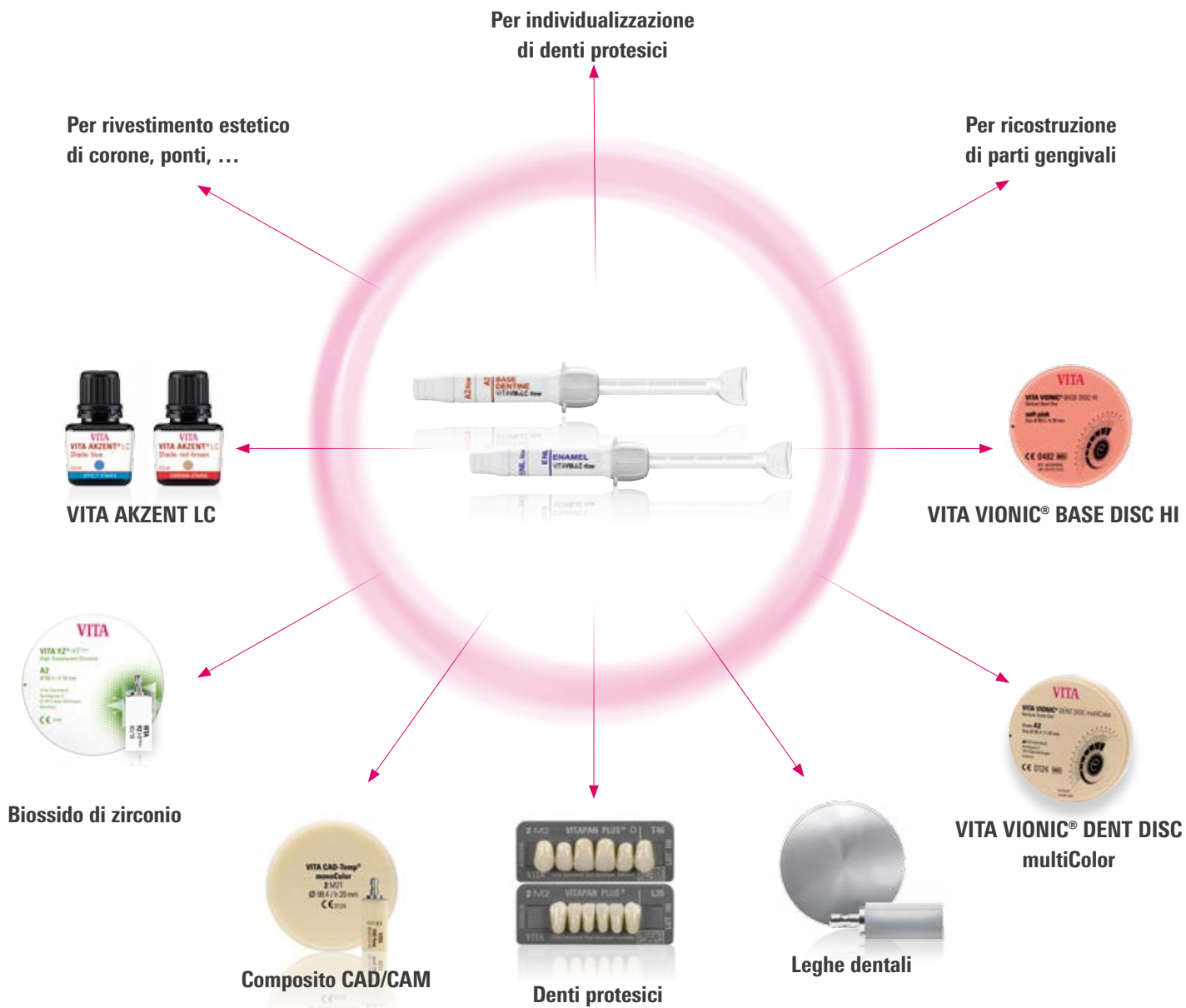

Per quali settori?

- Rivestimento di corone, ponti, corone telescopiche e sovrastrutture su impianti
- Individualizzazione di denti protesici
- Ricostruzione di parti gengivali
- In combinazione con il sistema fotopolimerizzabile di supercolori/glasura VITA AKZENT LC

Per quali materiali?

- Leghe dentali
- Ceramica ibrida
- Biossido di zirconio
- PMMA CAD/CAM
- Composito CAD/CAM, PEEK
- Denti in composito/polimero

STRUMENTI DI LAVORAZIONE



- **Pennelli:**

Per la modellazione sono indicati ad. es. il pennello VITA Nr. 1 (VITA Zahnfabrik) ed il pennello lay:art style (Renfert GmbH).



- **Strumenti per lucidare:**

Per la prelucidatura sono particolarmente indicati gli strumenti del VITA ENAMIC Polishing Set technical (VITA Zahnfabrik).



- **Paste lucidanti:**

Per la lucidatura a specchio è particolarmente indicata la pasta lucidante VITA Polish Hybrid (VITA Zahnfabrik).



- **Fotopolimerizzatori:**

Per la polimerizzazione sono indicati fotopolimerizzatori in commercio come ad es. Speed-Lablight (Hager & Werken), HiLite Power (Heraeus Kulzer), Visio Beta vario (3M ESPE), ed altri.*



- **Sistemi leganti:**

Per il legame adesivo tra la struttura in metallo e VITA VM LC flow raccomandiamo VITAVM[®]LC PRIMER I e II



*) Per un elenco completo dei fotopolimerizzatori e sistemi di legame consigliati consultare www.vita-zahnfabrik.com.

ASSORTIMENTI



VITAVM®**LC flow** BASIC KIT VITA classical A1–D4® (Cod. CVLCFBKCV3)

Assortimento base per la stratificazione BASIC (DENTINE paste / ENAMEL & masse aggiuntive flow)

Q.tà	Indice	Prodotto
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE
15	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1-D4 (senza B1)
15	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A1-D4 (senza B1)
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1 – CP5
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER

Accessori: piastra di miscelazione, manico portapennelli, pennellini, pennello

VITAVM®**LC flow** BASIC KIT SMALL* VITA classical A1-D4® (Cod. CVLCFBKSCV3)

Assortimento base ridotto per la stratificazione BASIC (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive flow)

Q.tà	Indice	Prodotto
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE
6	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A1, A2, A3, A3.5 B3, D3
6	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A1, A2, A3, A3.5 B3, D3
2	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL, END
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1	30 ml	VITA VM LC SEPARATOR
1	50 ml	VITA VM LC CLEANER

Accessori: piastra di miscelazione, manico portapennelli, pennellini, pennello

*Disponibile anche in VITA SYSTEM 3D-MASTER (cod. CVLCFBKSV1)



VITAVM®LC flow TEST KIT* A3 (Cod. CVLCFTKA3)

Assortimento un colore per i primi test (DENTINE, ENAMEL & masse aggiuntive flow)

Q.tà	Indice	Prodotto
1	3 g	VITA VM LC PRE OPAQUE
1	3 g	VITA VM LC OPAQUE PASTE A3
1	4 g	VITA VM LC flow BASE DENTINE A3
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
1	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP2
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
1		Astina campione colore A3
Accessori: pennello		

VITAVM®LC flow PROFESSIONAL KIT (Cod. CVLCFPKV1)

Per la realizzazione di effetti e caratteristiche naturali

Q.tà	Indice	Prodotto
8	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE1, EE2, EE5, EE6, EE7, EE9, EE11, EE12
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1		Guida colori VITA VM „Individual“

VITAVM®LC flow CREATIVE KIT (Cod. CVLCFCKV1)

Per la caratterizzazione di restauri CAD-Temp e per l'individualizzazione di denti in resina VITA

Q.tà	Indice	Prodotto
4	2 g	VITA VM LC PAINT PT1, PT5, PT15, PT17
1	4 g	VITA VM LC flow ENAMEL ENL
2	3 g	VITA VM LC flow EFFECT ENAMEL EE6, EE9
1	4 g	VITA VM LC flow NEUTRAL NT
1	3 g	VITA VM LC flow WINDOW WIN
1	5 ml	VITA VM LC GEL
1	10 ml	VITA VM LC MODELLING LIQUID
Accessori: pennello		

VITAVM®LC flow CHROMA KIT (Cod. CVLCFCHK)

Assortimento per l'intensificazione cromatica dell'area cervicale / del corpo

Q.tà	Indice	Prodotto
5	3 g	VITA VM LC flow CHROMA PLUS CP1–CP5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL


VITAVM®LC flow GINGIVA KIT (Cod. CVLCFGK)

Assortimento per la ricostruzione di parti gengivali

Q.tà	Indice	Prodotto
1	3 g	VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
5	3 g	VITA VM LC flow GINGIVA G1–G5
1		Guida colori VITA VM INDIVIDUAL

*Disponibile anche in VITA SYSTEM 3D-MASTER 2M2 (cod. CVLCFTK2M2)

Per ulteriori informazioni su VITA VM LC flow
consultare: www.vita-zahnfabrik.com

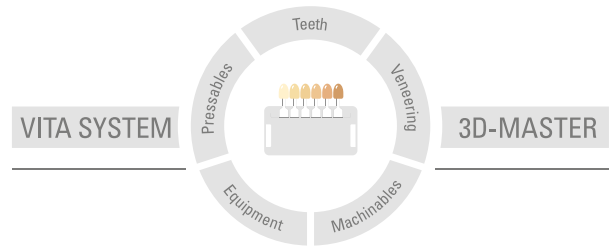

Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2024-02

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati

CE 0124

VITAVM[®]LC flow, VITAVM[®]LC PRIMER

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik