

# VITA AKZENT® Plus

Guida rapida all'uso – GLAZE/GLAZE LT



Colori di caratterizzazione e glasura per ceramica,  
indipendenti dal CET per lasura, accentuazione e glasatura.

VITA – perfect match.

**VITA**

## > Fatti & Caratteristiche


### Le masse di caratterizzazione e glassura VITA AKZENT Plus sono:

- Colori di caratterizzazione per ceramica, indipendenti dal CET
- per lasura, accentuazione e glassatura
- per sigillatura della superficie ceramica

### I VITA AKZENT Plus offrono:

- semplice adattamento cromatico nei corrispondenti gruppi di colore
- Ottime proprietà di lavorazione al massimo livello, come semplicità di applicazione
- risultati altamente estetici mediante pittura superficiale

### COMPONENTI DI SISTEMA

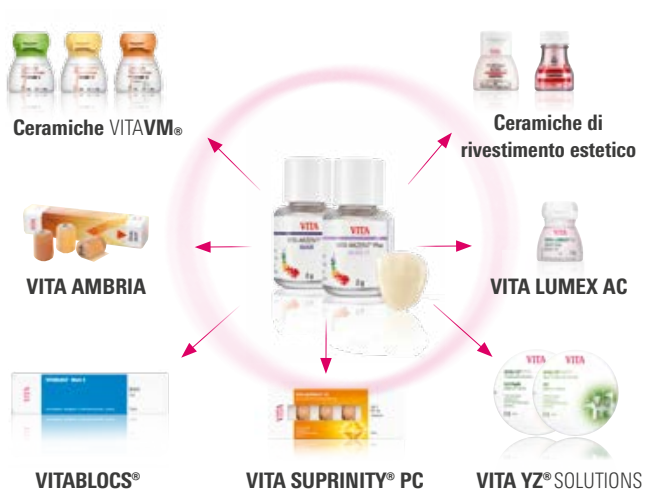

## > 1. VITA AKZENT® Plus – GLAZE/GLAZE LT

### Impiego di GLAZE/GLAZE LT



### Informazioni per la lavorazione:

#### Applicazione di GLAZE

- impastare la polvere con POWDER FLUID in consistenza cremosa.
- con un pennello stendere la massa glasura in strato uniforme su tutta la superficie del restauro.
- sistemare la corona da glasare sul supporto di cottura
- posizionare il restauro con il supporto di cottura al centro del forno ed eseguire il corrispondente programma di cottura (indipendentemente dal materiale strutturale)

### Cotture raccomandate

	Prees. °C	min.	↗ min.	↗ °C/min.	Temp. ca °C	min.	VAC min.	↘ °C
VITA SUPRINITY PC	400	4:00	5:00	80	800	1:00	-	-
VITABLOCS	500	4:00	5:15	80	920	1:00	-	-
VITA YZ SOLUTIONS	500	4:00	5:37	80	950	1:00	-	-
VITA YZ GLAZE LT	400	4:00	5:37	80	850	1:00	-	-
VITA VM 9	500	4:00	5:00	80	900	1:00	-	600*
VITA VM 11	400	4:00	5:00	80	800	1:00	-	-
VITA VM 13	500	4:00	4:45	80	880	1:00	-	-
VITA VMK Master	500	4:00	5:15	80	920	1:00	-	-
VITA LUMEX AC GLAZE LZ	400	6:00	7:00	50	750	1:00	-	-
VITA AMBRIA GLAZE LT	400	6:00	4:22	80	750	1:00	-	500*
VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder	400	4:00	7:00	50	750	1:00	-	500*

Per la cottura di altri materiali vale la seguente regola generale:  
Con temperature di cottura ≤ 850 °C si raccomanda l'uso di GLAZE LT,  
con temperature > 850°C si possono usare tutte le masse glasura.

## >2. Portfolio prodotti

---

### **EFFECT STAINS**

- colori particolarmente cromatici e coprenti
- Per la riproduzione di tonalità individuali e adattamenti di colore a qualsiasi caratteristica cromatica naturale
- in spessore elevato coprono completamente il colore base sottostante

### **BODY STAINS**

- Masse lasura, che lasciano trasparire, agenti come un sottile filtro cromatico sul materiale base
- Modifiche e scostamenti cromatici verso il rosso, giallo, arancio, marrone o grigio-verde

### **CHROMA STAINS**

- colori di lasura per modificare la cromaticità del materiale base all'interno di un gruppo di colori

### **GLAZE**

- massa glasura per superfici lucenti, omogenee, simili al vetro e chiuse dopo la cottura

### **GLAZE LT**

- LT = Low Temperature: massa glasura a basso punto di fusione per ceramiche con temperature di cottura inferiori a 800 °C

### **FINISHING AGENT**

- per una tessitura superficiale naturale ed una lucentezza opaca

### **FLUOGLAZE LT SPRAY**

- per una fluorescenza e glasura naturali in un unico step

## > 3. Colori disponibili

VITA AKZENT Plus

### EFFECT STAINS

ES01		bianco	ES06		rosso ruggine	ES11		blu
ES02		crema	ES07		cachi	ES12		grigio-blu
ES03		giallo limone	ES08		rosa	ES13		grigio
ES04		giallo sole	ES09		rosso scuro	ES14		nero
ES05		arancio	ES10		lilla			

### BODY STAINS

BS01		giallo
BS02		giallo-marrone
BS03		arancio
BS04		oliva-grigio
BS05		grigio-marrone

### CHROMA STAINS

#### VITA classical A1-D4

CSA		rossiccio-marrone
CSB		rossiccio-giallo
CSC		grigio
CSD		grigio-rosso

#### VITA SYSTEM 3D-MASTER

CSL		tendente al giallo
CSM2		giallastro-rossiccio
CSM3		giallo-rosso
CSR		tendente al rosso
CSIO		arancio

### GLAZE

- GLAZE
- GLAZE LT
- FINISHING AGENT
- FLUOGLAZE LT

## > Hotline e supporto

---

 **Siamo a vostra disposizione**

### ▶ **Hotline tecnica**

Per domande tecniche sulle soluzioni di prodotto VITA potete contattare l'assistenza tecnica.

**Tel. +49 (0) 7761 / 56 22 22**

**Fax +49 (0) 7761 / 56 24 46**

**8.00 - 17.00**

**E-mail [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)**

**Per altri contatti internazionali consultarem**

**[www.vita-zahnfabrik.com/contacts](http://www.vita-zahnfabrik.com/contacts)**

### ▶ **Supporto online**

Domande sulla lavorazione e sulle soluzioni di prodotto? Risposte competenti online in forma di FAQ, video e unità didattiche elettroniche.

Per ulteriori informazioni dettagliate consultare le istruzioni d'uso complete VITA AKZENT Plus.

**[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)**

**[www.facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)**

**CE 0124**

**MD**



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany

Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299

Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

105511\_0624\_Y02