

VITA AMBRIA® Checkliste


Um Ihnen einen erfolgreichen Start mit VITA AMBRIA zu ermöglichen, empfehlen wir folgende Punkte vor der ersten Anwendung zu beachten:

➤ Modellation:


Zum Modellieren ausschließlich rückstandlos verbrennbare, organische Wachse verwenden. Fräswachse, Fräskunststoffe oder Kunststoffe für den 3D-Druck sind zuvor auf ihre rückstandsfreie Verbrennung zu prüfen. Bei der Verwendung von Kunststoffen sind die Empfehlungen hinsichtlich des Einbettens zu beachten.

➤ Anstiften:

Um ein störungsfreies Fließen während des Pressvorgangs zu erreichen, muss das Anstiften immer in Fließrichtung erfolgen. Bei 100 g-Muffeln die Restauration an der Muffelbasis in einem Winkel von 80 – 90° anstiften, bei 200 g-Muffeln im 45 – 60°-Winkel anstiften. 10 mm Mindestabstand der Wachsobjekte zum Silikonring sind einzuhalten.

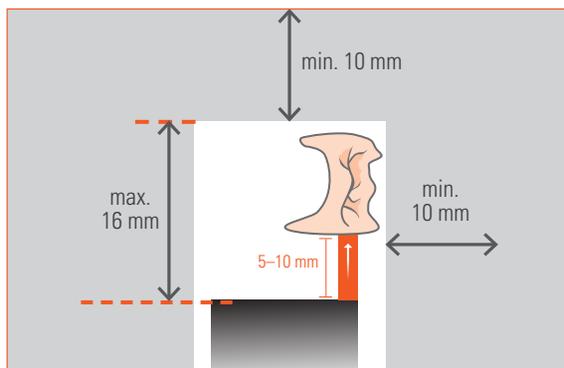

100 g-Muffelsystem

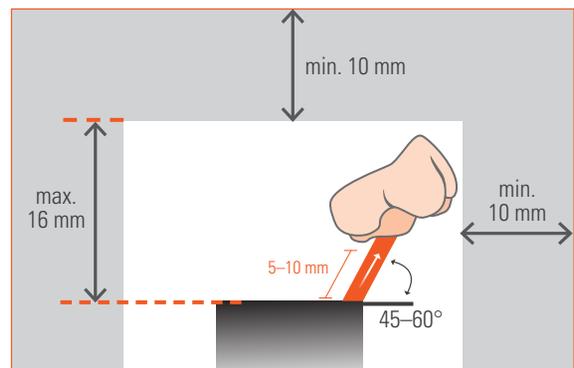

200 g-Muffelsystem


➤ Kalibrierung des Pressofens:

Bei der ersten Pressung empfehlen wir ein Wachsgitter zusammen mit der Restauration einzubetten. Anhand des Aussehens können Sie das Pressergebnis mithilfe des Kalibrierungscharts beurteilen und die Presstemperatur bei Bedarf entsprechend anpassen. Beachten Sie dazu das Calibration Chart Nr. 10642.


➤ **Pressparameter:**

Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und dienen ausschließlich als Anhaltspunkt. Abweichungen der Brennergebnisse sind möglich. Die Richtwerte müssen daher individuell angepasst werden.

➤ **Pressparameter VITA AMBRIA ST- HT- T-Pellets:**

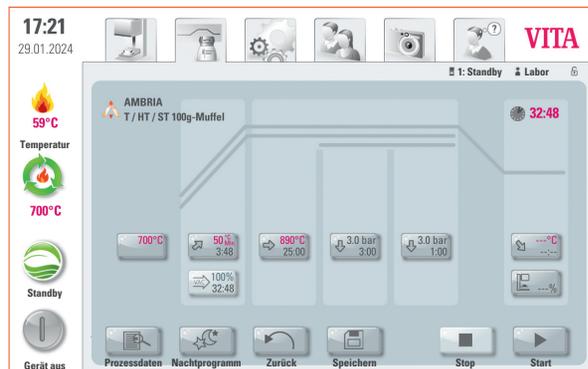


100 g-Muffelsystem

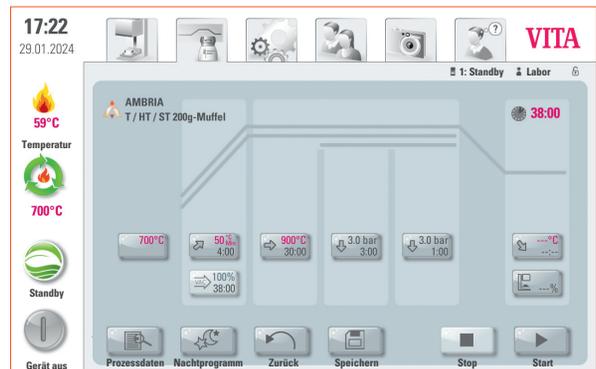


200 g-Muffelsystem

➤ **Pressparameter VITA AMBRIA MO-Pellets**

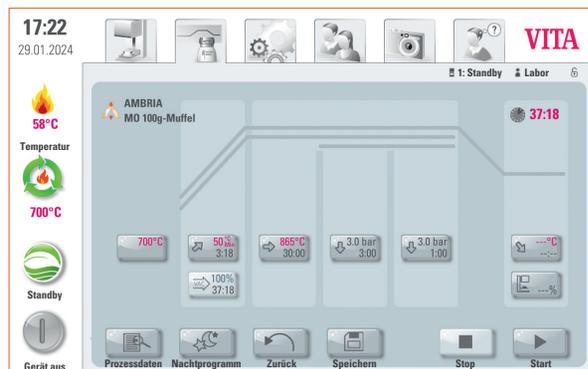

100 g-Muffelsystem

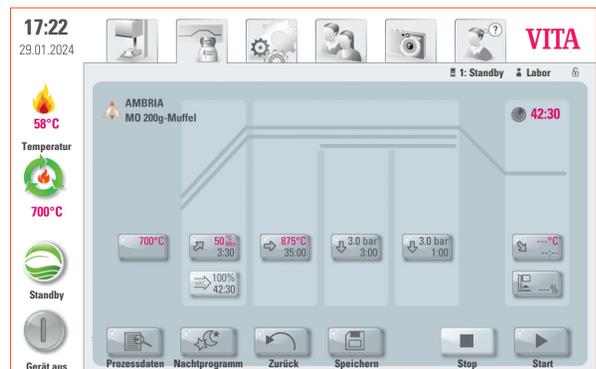

200 g-Muffelsystem

➤ **Pressvorgang:**

Pellets dürfen nicht gestapelt werden. Bei einem Wachsgewicht > 0,75 g ein L-Pellet verwenden.
Um eine Abkühlung der Muffel zu vermeiden die Muffel unterhalb des geöffneten Ofens bestücken.
Pellet und Pressstempel nicht vorwärmen.

Nur Einwegpressstempel verwenden.

Detaillierte Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der VITA AMBRIA Gebrauchsanweisung Nr. 10611. Für Informationen der dazugehörigen Systemkomponenten lesen Sie die im jeweiligen Kapitel angegebene Gebrauchsinformation der Systemkomponente durch.



Find more languages online:
www.vita-zahnfabrik.com/ambria

CE 0124 MD VITA