



VITA Farbbestimmung

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

VITA – perfect match.

VITA

Füllstofffreies Kaltpolymerisat zur extraoralen Herstellung von provisorischen Versorgungen und Reparaturen . In VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A–D Farben erhältlich.

VITAVM[®].CC Auf alle Indikationen abgestimmt




VITA VM CC ist ein füllstofffreies Kaltpolymerisat. Es ist das ideale Material zur extraoralen Herstellung provisorischer Versorgungen und Reparaturen.

Indikationen

- Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken
- Befestigung von VITA Kunststoffzähnen, z. B. auf Modellgussarbeiten
- Reparaturen
- Abdecken von Geschieben bei kombinierten Arbeiten



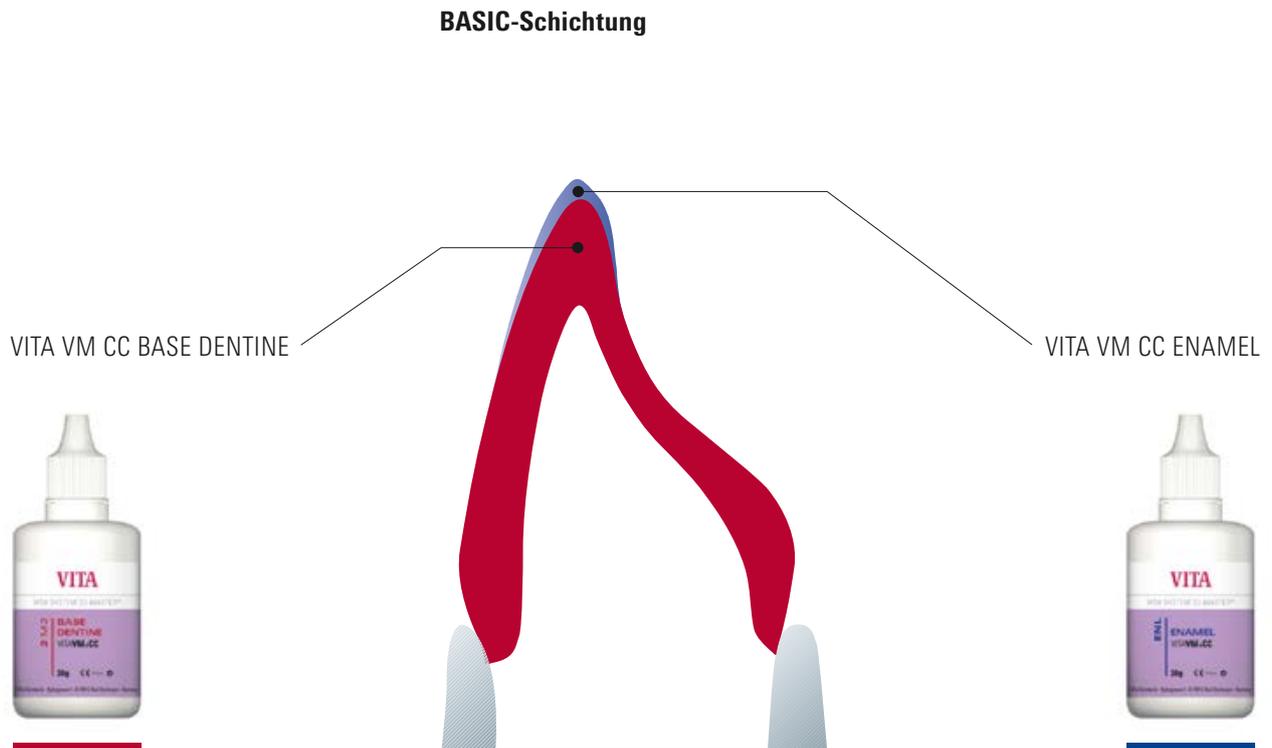

BASIC-Schichtung

Die farbintensive VITA VM CC BASIC-Schichtung setzt sich aus zwei Massen zusammen:

- BASE DENTINE
- ENAMEL

Der Anwender kann bereits mit zwei Schichten eine natürlich wirkende provisorische Versorgung erstellen.

Individualisierung

Mit den Zusatzmassen lassen sich natürliche Effekte und Charakteristika leicht und authentisch erzielen.



Das Provisorium als Basis zum Erfolg

Das Provisorium ist ein wichtiger Bestandteil im Behandlungsprozess von Patientenversorgungen mit festsitzendem Zahnersatz. Grundsätzlich dient es zum Schutz der präparierten Zähne und zur vorübergehenden Wiederherstellung der Ästhetik und Funktion.



Richtig genutzt, leistet ein Provisorium aber noch mehr: Mit seiner Hilfe lässt sich die optimale Gestaltung der endgültigen Restauration gezielt vorbereiten. Besonders bei der Restauration von Frontzähnen können schon beim Provisorium Korrekturen in der Ästhetik, Phonetik und Funktion durchgeführt werden.




Darüber hinaus erleichtert ein Provisorium die Akzeptanz des Zahnersatzes beim Patienten, da er sich schon früh an die neue Situation gewöhnen kann. Bei all dem spielt VITA VM CC eine wichtige Rolle. Mit seiner Hilfe erhalten zufriedene Patienten bereits beim Provisorium eine natürlich anmutende Ästhetik.

Abb. 1: Situation vor der Rehabilitation

Abb. 2: Provisorische Versorgung und Frontgestaltung mit VITA VM CC

Abb. 3: Die Frontzahnsituation unmittelbar nach dem Einsetzen. (VITA In-Ceram YZ verblendet mit VITA VM 9)

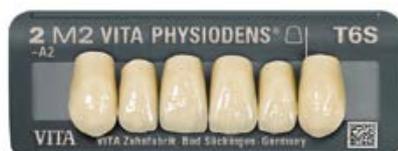



Zur Gestaltung eines Provisoriums bietet sich an, die Form und Farbe typgerecht mit Hilfe von Konfektionszähnen zu ermitteln.

Zur Bestimmung der passenden Zahnform und Zahnfarbe ist eine Lebende Formenkarte mit z.B. VITA PHYSIODENS besonders gut geeignet.

So kann sich der Patient ein Bild von der zukünftigen Situation machen und bei der Auswahl mitentscheiden.

	<p>VITA VM[®]CC BASIC KIT 16-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] oder VITA VM[®]CC BASIC KIT VITA classical A1–D4[®] Basis-Sortiment für die BASIC-Schichtung</p>
	<p>VITA VM[®]CC BASIC KIT 5-COLOR VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] Kleines Basis-Sortiment für die BASIC-Schichtung mit reduziertem Masseangebot</p>
	<p>VITA VM[®]CC CLASSICAL COLOR KIT Erweiterungssortiment für VITA VM CC 3D-MASTER Anwender, die ihr bestehendes Sortiment um VITA classical A1–D4 (ohne B1) erweitern möchten</p>
	<p>VITA VM[®]CC PROFESSIONAL KIT* Für natürliche Effekte und Charakteristika</p>


* verwendbar für VITA SYSTEM 3D-MASTER[®] und VITA classical A1–D4[®]

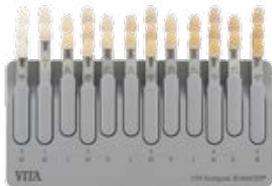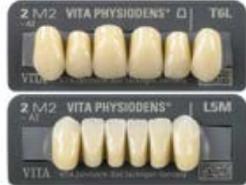	<p>VITA Easyshade[®] V Verwenden Sie für die digitale Farbbestimmung das VITA Easyshade V und für die visuelle Farbbestimmung z. B. den Vita Linearguide 3D-MASTER oder VITA classical A1-D4.</p>
	<p>VITA Easyshade LITE Ermöglicht die einfache und schnelle digitale Farbbestimmung natürlicher Zähne in den etablierten Farbsystemen VITA classical A1–D4 und VITA SYSTEM 3D-MASTER.</p>
	<p>VITA Toothguide 3D-MASTER[®] Mit dem VITA SYSTEM 3D-MASTER bestimmen Sie zügig und präzise die korrekte Zahnfarbe.</p>
	<p>VITA classical Farbskala A1–D4 Das Original – zur Bestimmung der Zahnfarbe in den VITA classical A1–D4 Farben. Mit den zusätzlichen VITA Bleached Shades ist es möglich, Zahnfarben gebleachter Zähne sicher zu bestimmen.</p>
	<p>VITA Kunststoffzähne VITA PHYSIODENS[®], VITAPAN EXCELL[®], VITAPAN[®] LINGOFORM, VITAPAN[®], VITA MFT[®]. Alle vier Zahnlinien bieten für jede Indikation die passende Lösung. Ihr jahrzehntelang bewährtes Material verfügt erwiesenermaßen über das beste Abrasionsverhalten. VITAVM CC und VITA Kunststoffzähne können optimal kombiniert werden.</p>
	<p>VITACOLL[®] Haftvermittler Der VITACOLL-Haftvermittler bewirkt eine zuverlässige chemische Bindung von Kunststoffzähnen mit Heiß- und Kaltpolymerisaten, wie z.B. VITA VM CC und verhindert das Ausbrechen der Zähne.</p>

Mehr Informationen unter www.vita-zahnfabrik.com

Der VITAVM CC Verblendkunststoff ist in VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical Farben A–D erhältlich. Farbliche Kompatibilität mit allen VITA SYSTEM 3D-MASTER und VITA classical A–D Materialien ist gewährleistet.

Mit dem einzigartigen VITA SYSTEM 3D-MASTER werden alle natürlichen Zahnfarben systematisch bestimmt und vollständig reproduziert.

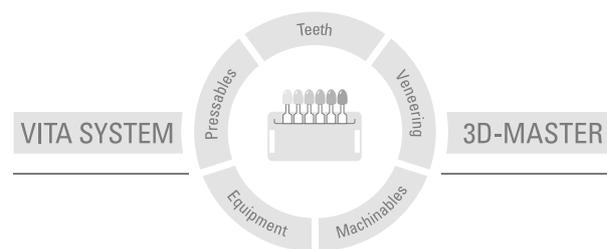

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 2024-02

Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnung

CE0124:

VITAVM[®]CC · VITA PHYSIODENS[®] · VITAPAN[®] · VITAPAN PLUS[®]
VITAPAN[®] LINGOFORM · VITACOLL[®]

MD

VITA

 VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · 79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik