



## VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

### Informazioni per fresatori CNC

#### Modalità: FRESAGGIO

- VITA VIONIC DENT DISC multiColor può essere fresato a secco con raffreddamento ad aria oppure ad acqua.

#### Strumenti consigliati:

- Sono necessari frese diamantate a pallina (sinonimo: rivestimento carbonio o DLC).
- Si raccomanda di utilizzare le stesse per il molaggio del biossido di zirconio.
- Utilizzare strumenti odontoiatrici appropriati, ad es. [www.emuge-franken.com](http://www.emuge-franken.com) o [www.imes-icore.com](http://www.imes-icore.com).

#### Parametri raccomandati:

Sgrossatura:		
Strumento	Ø 2,5 mm	Ø 1 mm
Numero di giri [giri/min]	18000	45000
Avanzamento X Y [mm/min]	2000	500
Avanzamento Z [mm/min]	1500	500
Accostamento X Y [mm]	1,875 (75% del diametro della fresa)	0,4 (40% del diametro della fresa)
Accostamento Z [mm]	1,25	0,2

Finitura:		
Strumento	Ø 2,5 mm	Ø 1 mm
Numero di giri [giri/min]	18000	45000
Avanzamento X Y [mm/min]	2000	1500
Avanzamento Z [mm/min]	1500	1000
Accostamento X Y [mm]	0,5	0,1 – 0,15
Accostamento Z [mm]	0,5	0,1