

VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Startup

Inbetriebnahme

1. Startup
Inbetriebnahme

2. Starting firing process
Brennvorgang starten

VITA

1

Device connection
Geräteanschluss



Connect the firing unit and control unit with the connection cable.

Brenneinheit und Bedienelement mit Verbindungskabel verbinden.

2

Mains power connection
Netzanschluss



Connect the firing unit to the mains voltage

Brenneinheit an Netzspannung anschließen.

3

Switching on firing unit
Brenneinheit einschalten



Press the main switch.

Hauptschalter betätigen.

4

Take out the plastic foam
Schaumstoff entnehmen



Carefully pull the plastic foam upward and remove it.

Schaumstoff vorsichtig nach oben ziehen und entfernen.

5

Open accessory compartment
Zubehörfach öffnen



To open, press the panel inward, and remove the firing tray.

Zum Öffnen Blende nach innen drücken, Brenngutträger entnehmen.



For "Starting firing process"/please turn over!
Für „Brennvorgang starten“/bitte wenden!

VITA SMART.FIRE® ADVANCED

Start firing process

Brennvorgang starten

1. Startup
Inbetriebnahme

2. Starting firing process
Brennvorgang starten

