

# VITA SMART.FIRE® ADVANCED

## Messa in funzione

Mise en route

**1. Messa in funzione**  
Mise en route

**2. Avviare il procedimento di cottura**  
Démarrer le cycle de cuisson.

VITA

**1** Collegamento dell'apparecchio  
Raccordement des appareils



**Collegare unità di cottura e unità di comando con il relativo cavo.**

Connecter le four et l'unité de commande au moyen du câble de liaison.

**2** Allacciamento a rete  
Branchement au réseau électrique



**Collegare l'apparecchio alla rete.**  
Brancher le four au réseau électrique.

**3** Accendere l'unità di cottura  
Allumer le four



**Azionare l'interruttore principale.**  
Actionner l'interrupteur principal.

**4** Togliere il materiale espanso  
Retirer la mousse



**Tirare delicatamente verso l'alto la gommapiuma e rimuoverla.**

Tirer délicatement la mousse vers le haut et la retirer.

**5** Aprire il cassetto porta-accessori  
Ouvrir le compartiment à accessoires



**Per aprire spingere verso l'interno il pannello frontale, quindi prelevare il supporto di cottura.**

Pour ouvrir, pousser le panneau vers l'intérieur et retirer le plateau de cuisson.



Per „Avviare il procedimento di cottura“/ **girare!**  
Pour « Démarrer le cycle de cuisson »/ **voir au verso !**

# VITA SMART.FIRE® ADVANCED

## Avviare il procedimento di cottura

Démarrer le cycle de cuisson

1. Messa in funzione  
Mise en route

2. Avviare il procedimento di cottura  
Démarrer le cycle de cuisson.

### 1 Preparazione della cottura

Préparation de la cuisson



**Attivare la temperatura di stand-by.**

Activer la température de veille.

### 2 Selezione del programma

Choix du programme



**Selezionare il programma di cottura.**

Sélectionner le programme de cuisson.

### 3 Posizionamento del restauro

Positionnement de la restauration



**Posizionare il supporto di cottura con il restauro sullo zoccolo di cottura.**

Placer le plateau de cuisson avec la restauration sur le socle de cuisson.

4

### Avvio della cottura

Début de la cuisson



**Avviare il procedimento di cottura.**

Démarrer le cycle de cuisson.

5

### Fine della cottura

Fin de la cuisson



**Appare la segnalazione di fine cottura.**

Un message indiquant la fin de la cuisson s'affiche.

6

### Prelevare il restauro

Retrait de la restauration



**Prelevare il supporto di cottura col restauro e posizionarlo sul piano di raffreddamento.**

Retirer le plateau de cuisson avec la restauration et les placer sur la tablette de refroidissement.

