

# VITA SMART.FIRE® ADVANCED

## Puesta en servicio

Colocação em funcionamento

**1. Puesta en servicio**  
Colocação em funcionamento

**2. Iniciar el proceso de cocción**  
Iniciar o procedimento de queima

**VITA**

**1** Conexión de los aparatos  
Conexão do aparelho



**Conectar el aparato de cocción a la unidad de mando mediante el cable de conexión.**

Conectar a unidade de queima e o painel de controle com o cabo de conexão.

**2** Conexión a la red eléctrica  
Conexão de rede



**Conectar el aparato de cocción a la red eléctrica.**

Ligar a unidade de queima na tensão de rede.

**3** Encender el aparato de cocción  
Ligar a unidade de queima



**Pulsar el interruptor principal.**

Ligar o interruptor principal.

**4** Retirar la espuma  
Remover a espuma



**Tirar con cuidado de la espuma hacia arriba y retirarla.**

Puxar a espuma cuidadosamente para cima e removê-la.

**5** Abrir el cajón de accesorios  
Abrir o compartimento de acessórios



**Presionar la moldura hacia dentro para abrir el cajón y extraer el soporte de cocción.**

Para abrir, empurrar o painel para dentro e retirar a bandeja de queima.



Para "Iniciar el proceso de cocción" / **ver al dorso.**  
Para „Iniciar procedimento de queima“ / **vire verso!**

# VITA SMART.FIRE® ADVANCED

1. Puesta en servicio  
Colocação em funcionamento

2. Iniciar el proceso de cocción  
Iniciar o procedimento de queima

## Iniciar el proceso de cocción

Iniciar procedimento de queima



Activar la temperatura de espera.

Ativar temperatura de espera.

Seleccionar el programa de cocción.

Selecionar o programa de queima.

Colocar el soporte de cocción con la restauración en el zócalo de cocción.

Colocar a bandeja de queima com a restauração sobre a base de queima



Iniciar el proceso de cocción.

Iniciar o procedimento de queima.

Se muestra un mensaje indicando el fin de la cocción.

A mensagem do fim da queima é exibida.

Retirar el soporte de cocción con la restauración y depositarlos sobre la mesa de enfriamiento.

Retirar a bandeja de queima com a restauração e posicionar sobre a mesa de resfriamento.