

VITA

Easy Transformation.
Make it UNIQUE.



VITA LUMEX® UNIQUE

Die Liquid Ceramic für einfache
3D-Charakterisierung und
ultradünnes Microveneering.
Macht aus monolithisch einzigartig.



Mehr erfahren!



Liquid Ceramic

VITA LUMEX® UNIQUE

Ein System. Einzigartige Möglichkeiten.

VITA LUMEX UNIQUE verleiht monolithischen Restaurationen den finalen Touch – einfach, schnell und wirkungsvoll. Das Liquid Ceramic System besteht aus fluoreszierenden, gebrauchsfertigen Pasten, die eine einzigartige Ästhetik und dreidimensionale Tiefenwirkung ermöglichen. So werden monolithische Restaurationen auf ein neues Niveau gehoben. Sofort sichtbares Ergebnis: Form, Farbe und Effekte bleiben vor und nach dem Brennen gleich. Die niedrige Brenntemperatur von 750°C bewahrt die gestaltete Oberflächencharakteristik, wodurch zuverlässige und ästhetische Ergebnisse selbst mit nur einem Brand erzielt werden können.

VITA LUMEX UNIQUE bietet maximale Ästhetik bei minimalem Aufwand. Ob effiziente 3D-Charakterisierung oder ultradünnes Microveneering auf Zirkondioxid, Lithiumdisilikat oder Feldspatkeramik: VITA LUMEX UNIQUE erzielt eine faszinierende Farbwirkung, beeindruckende Texturen und einen natürlichen Oberflächenglanz. Alles mit nur einem System, das monolithische Restaurationen einzigartig macht.

Einfaches Handling


Form, Farbe und Effekte sind sofort beim Auftragen der Pasten sichtbar und bleiben nach dem Brennen unverändert. Für zuverlässige Ergebnisse.

Einzigartige Ästhetik

Monolithische Restaurationen erhalten eine faszinierende Ästhetik, eine dreidimensionale Tiefenwirkung und einen natürlichen Glanz.

Enorme Flexibilität

Feine Farbnuancen, detaillierte Strukturen und filigrane Details lassen sich präzise realisieren dank flexibler Konsistenzen. Ideal für die 3D-Charakterisierung und ultradünnes Microveneering.

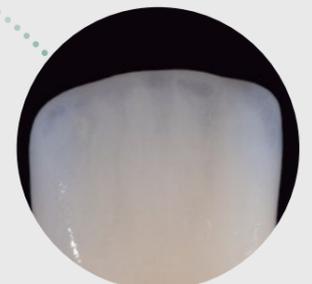

3D-Charakterisierung
Tiefenwirkung und natürlicher Glanz ohne Cut-Back.



Pink Ästhetik
Naturgetreue Reproduktion der Gingiva.



Mixed Technique
Vom traditionellen Cut-Back bis hin zur Vollverblendung mit VITA LUMEX AC und VITA LUMEX UNIQUE.



Ultradünnes Microveneering
Mit nur 0,1 - 0,2 mm Schichtstärke ohne traditionellem Cut-Back.

Einzigartige Ästhetik.

Kreative Gestaltungsräume für eine beeindruckende Ästhetik

Natürliche Effekte wie inzisale Transluzenz, Halo-Effekte, Mamelons, Schmelzrisse und mehr lassen sich mit den fluoreszierenden EFFECT PASTE Massen schnell und einfach reproduzieren.



Die Helligkeit kann angehoben oder abgesenkt, sowie systematische Farbanpassungen in den beiden Farbstandards VITA classical A1-D4 und VITA SYSTEM 3D-MASTER vorgenommen werden.



Lower Value



Higher Value


Perfekte Farbkorrekturen

Mit den CHROMA PASTE Massen gelingt die einfache Chromaanpassung in den zugehörigen Farbgruppen. Ob zur Korrektur der Zahnfarbe oder Anpassung an die Farbstandards VITA classical A1-D4 und VITA SYSTEM 3D-MASTER – mit den CHROMA PASTE Massen gelingt die einfache Chromaanpassung.



Das perfekte Finish

Die FLUO-GLAZE PASTE sorgt für ein natürliches Finish, das sowohl bei Tageslicht als auch unter UV-Schwarzlicht beeindruckt. Die Glasurmasse ist leicht aufzutragen und sorgt für eine faszinierende Ästhetik. Da die mukogingivale Anatomie nicht fluoresziert, steht für eine natürliche pinke Ästhetik die nicht fluoreszierende GLAZE PASTE zur Verfügung.

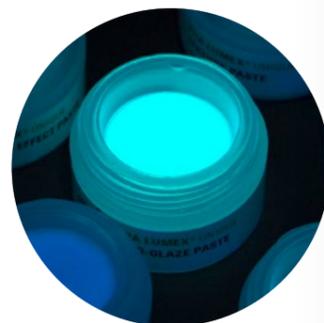

ohne Glasur



mit Glasur

Einfaches Handling. Enorme Flexibilität.

Sofortige Sichtbarkeit der Effekte



Die Textur und Farbe bleiben sowohl während des Modellierens als auch nach dem Brennen stabil, was den Aufwand erheblich reduziert.

Ready to Use


Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für vielfältige Anwendungstechniken.

Dreidimensionale Charakterisierung mit gebrauchsfertigen Pasten bestehend aus fein abgestimmten Keramikpartikeln sowie das ultradünne Microveneering mit detailreichen Texturen lassen sich präzise, zeiteffizient und mit beeindruckender Wirkung realisieren.



Optimale Konsistenz für eine schnelle, effiziente Applikation.

Die Massen lassen sich mit der „Wet on Wet“-Technik applizieren, ohne dass die Farben sich vermischen. Alle Massen sind mit LIQUID verdünnbar – für flexible, praxisnahe Auftragstechniken. Das LIQUID kann außerdem abgesaugt werden, um die Konsistenz zu verfestigen. Dies erleichtert sowohl großflächiges als auch feindosiertes plastisches Modellieren.

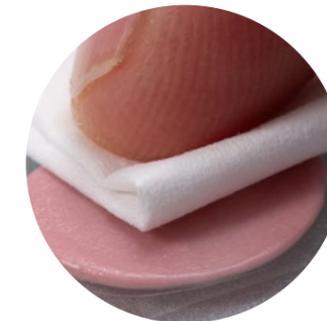



VITA LUMEX® UNIQUE

Bitte beachten Sie

Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn

das Produkt in nicht verträglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Herausgabe dieser Produktbroschüre: 2025-05. Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

