

VITA

Easy Transformation.
Make it UNIQUE.



VITA LUMEX® UNIQUE

La ceramica liquida per la semplice caratterizzazione 3D e microveneering ultrasottili. Rende uniche le applicazioni monolitiche.



Scopri di più!



Ceramica Liquida

VITA LUMEX® UNIQUE

Un solo sistema. Possibilità uniche.

VITA LUMEX UNIQUE dona il tocco finale ai restauri monolitici – in modo semplice, rapido ed efficace. Liquid Ceramic System è composto da paste fluorescenti pronte all'uso che consentono un'estetica unica ed effetti di profondità tridimensionale. Portate i restauri monolitici a un livello successivo. Risultato immediatamente visibile: forma, colore ed effetti restano inalterati dopo la cottura. La bassa temperatura di cottura, pari a 750 °C, preserva le caratteristiche superficiali impostate, con la possibilità di ottenere risultati affidabili ed esteticamente accattivanti con una sola cottura.

VITA LUMEX UNIQUE offre la massima resa estetica con il minimo sforzo. Che si tratti di caratterizzazione 3D o microveneering ultrasottile in biossido di zirconio, disilicato di litio o ceramica feldspatica, con VITA LUMEX UNIQUE è possibile ottenere effetti cromatici affascinanti, texture impressionanti e una lucentezza superficiale naturale. Tutto con un solo sistema, che rende unici i restauri monolitici.

Semplicità d'uso

Forma, colore ed effetti sono immediatamente visibili dopo l'applicazione delle paste e restano invariati anche dopo la cottura. Per risultati affidabili.

Estetica unica

Restauri monolitici con un'estetica affascinante, un effetto di profondità tridimensionale e una lucentezza naturale.

Elevatissima flessibilità

Sottili sfumature cromatiche, strutture complesse e dettagli delicati possono essere realizzati con precisione grazie alle consistenze flessibili. Ideale per la caratterizzazione 3D e microveneering ultrasottile.




Estetica rosa

Riproduzione naturale della gengiva.

Tecnica Mista

Dal tradizionale cut-back fino al rivestimento completo con VITA LUMEX AC e VITA LUMEX UNIQUE.

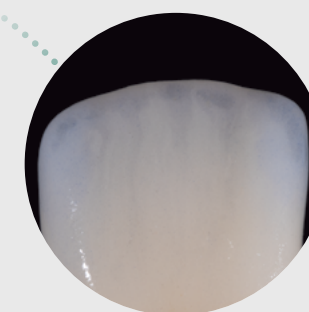

Caratterizzazione 3D

Effetto di profondità e lucentezza naturale senza cut-back.




Microveneering ultrasottile

Con uno spessore dello strato di soli 0,1-0,2 mm senza cut-back tradizionale.

Estetica unica.

Possibilità creative per un'estetica impressionante


Le masse fluorescenti EFFECT PASTE consentono di riprodurre in modo semplice e veloce effetti naturali come traslucenza incisale, effetti alone, mammelloni, crepe dello smalto e molto altro ancora.

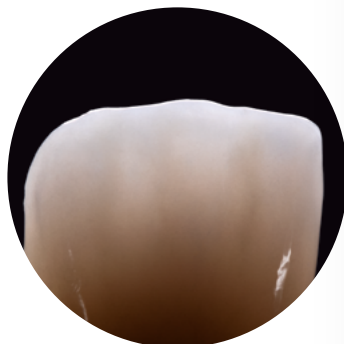

È possibile aumentare o ridurre la luminosità, così come effettuare adeguamenti cromatici sistematici negli standard VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Valore più basso

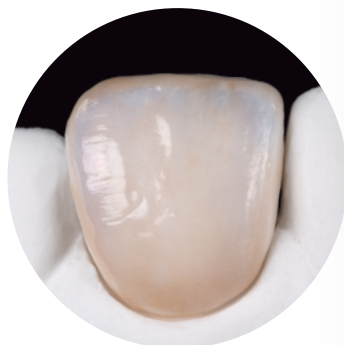

Valore più alto


Correzioni cromatiche perfette

Le masse CHROMA PASTE consentono di adattare con facilità il croma nei diversi gruppi di colori. Che si vogliano eseguire correzioni del colore del dente o adattamenti agli standard cromatici VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER, l'adattamento del croma diventa semplice con le masse CHROMA PASTE.



La perfetta finitura

La FLUO-GLAZE PASTE offre una finitura naturale, impressionante sia alla luce naturale che alla luce nera ultravioletta. La massa glasura è semplice da applicare e garantisce un'estetica affascinante. Poiché l'anatomia mucogengivale non è fluorescente, per ottenere un'estetica naturale di colore rosa è disponibile una GLAZE PASTE non fluorescente.

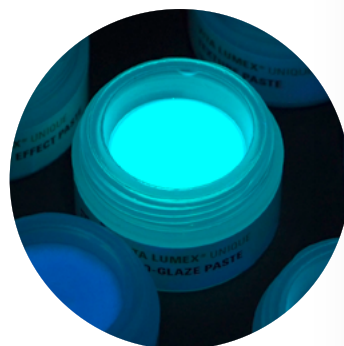

senza glasura





con glasura



Semplicità d'uso. Elevatissima flessibilità.

Visibilità immediata degli effetti

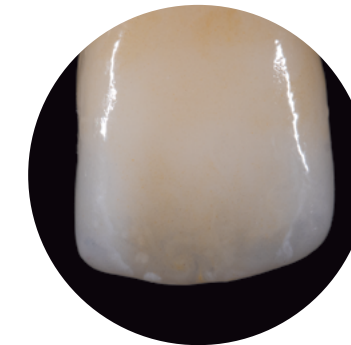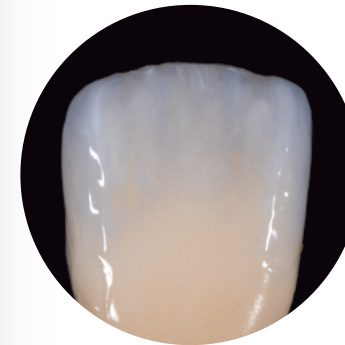

Texture e colore restano stabili sia durante la modellazione che dopo la cottura, riducendo notevolmente la necessità di interventi manuali.

Pronta all'uso


Possibilità praticamente illimitate per diverse tecniche di applicazione.

La caratterizzazione tridimensionale con paste pronte all'uso, composte da particelle di ceramica perfettamente bilanciate, e il microveneering ultrasottile con texture ricche di dettagli consentono di realizzare effetti impressionanti, precisi e con tempi ridotti.



Consistenza ottimale per un'applicazione rapida ed efficiente.

Le masse possono essere applicate con la tecnica "wet-on-wet" senza miscelazione dei colori. Tutte le masse sono diluibili con LIQUID, per tecniche di applicazione flessibili e pratiche. È inoltre possibile rimuovere il LIQUID per una consistenza più soda. Ciò semplifica la modellazione sia su ampie superfici che con dosaggi di precisione.

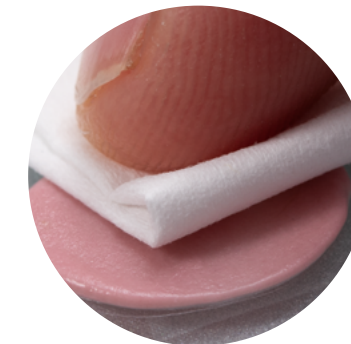



VITA LUMEX® UNIQUE

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non ci assumiamo responsabilità per danni che si verifichino in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni

non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. Data di questa brochure di prodotto: 2025-05. Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

