

VITA

Easy Transformation.
Make it UNIQUE.



VITA LUMEX® UNIQUE

La cerámica líquida para la
caracterización 3D sencilla y
microrecubrimientos ultrafinos.
Convierte lo monolítico en único.





Cerámica líquida

VITA LUMEX® UNIQUE

Una cerámica líquida. Posibilidades únicas.

VITA LUMEX UNIQUE otorga el toque final a las restauraciones monolíticas, de manera sencilla, rápida y eficaz. El innovador sistema de cerámica líquida consta de pastas fluorescentes listas para usar, y posibilita una estética excepcional con un efecto de profundidad tridimensional.

De este modo se elevan las restauraciones monolíticas a un nuevo nivel, con un resultado visible de inmediato: la forma, el color y los efectos permanecen estables antes y después de la cocción. La baja temperatura de cocción preserva las características superficiales incorporadas, lo que permite obtener resultados fiables y estéticos con una sola cocción.

Ya se trate de una caracterización 3D eficiente o de un microrecubrimiento ultrafino sobre dióxido de circonio, disilicato de litio o cerámica de feldespato, VITA LUMEX UNIQUE ofrece una estética máxima con un esfuerzo mínimo. El resultado: un efecto cromático fascinante, unas texturas impresionantes y un brillo superficial natural. Todo ello con un solo sistema que convierte las restauraciones monolíticas en únicas.

Manipulación sencilla

La forma, el color y los efectos resultan visibles de inmediato al aplicar las pastas, y permanecen inalterados tras la cocción. Para obtener resultados fiables.

Estética excepcional

Otorga a las restauraciones monolíticas una estética fascinante, un efecto de profundidad tridimensional y un brillo natural.

Enorme flexibilidad

Permite conseguir con precisión sutiles matices cromáticos, estructuras detalladas y detalles altamente estéticos, gracias a su consistencia flexible. Ideal para la caracterización 3D y microrecubrimientos ultrafinos.




Estética rosa

Reproducción natural de la encía.

Técnica mixta

Desde el cut back convencional hasta el recubrimiento completo con VITA LUMEX AC y VITA LUMEX UNIQUE.

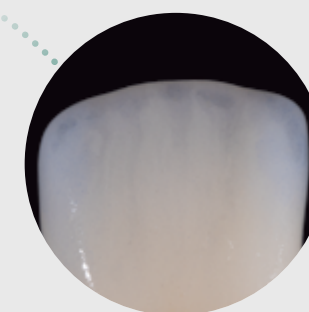

Caracterización 3D

Efecto de profundidad y brillo natural sin cut back.




Microrecubrimiento ultrafino

Con un grosor de capa de solo 0,1-0,2 mm sin cut back convencional.

Estética excepcional.

Libertad creativa para una estética impresionante


Los materiales fluorescentes EFFECT PASTE permiten reproducir con rapidez y facilidad efectos naturales tales como translucidez incisal, efectos de halo, mamelones o grietas en el esmalte.

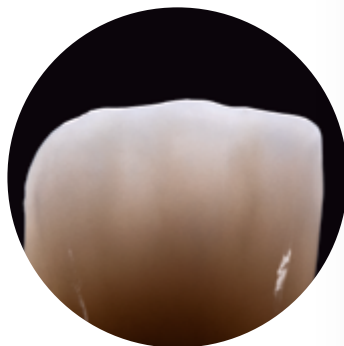

Es posible incrementar o reducir la luminosidad, así como llevar a cabo ajustes sistemáticos del color en los dos estándares de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Menor luminosidad

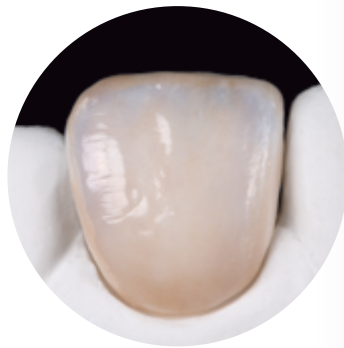

Mayor luminosidad


Correcciones del color sencillas

Con los materiales CHROMA PASTE puede llevarse a cabo un ajuste sencillo del croma en los grupos de colores correspondientes. Ya sea para la corrección del color dental o para la adaptación a los estándares de colores VITA classical A1-D4 y VITA SYSTEM 3D-MASTER, los materiales CHROMA PASTE posibilitan el ajuste sencillo del croma.



El acabado perfecto

El material FLUO-GLAZE PASTE proporciona un acabado natural, que impresiona tanto a la luz del día como bajo luz negra UV. El material de glaseado es fácil de aplicar y proporciona una estética fascinante. Dado que la anatomía mucogingival no emite fluorescencia, está disponible el material GLAZE PASTE no fluorescente para lograr una estética rosa natural.

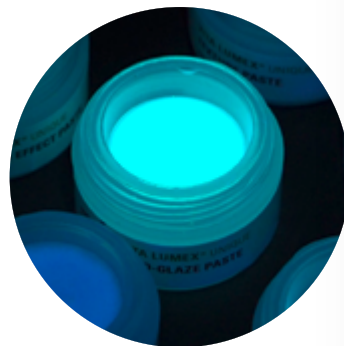

sin glaseado





con glaseado



Manipulación sencilla. Enorme flexibilidad.

Visibilidad inmediata de los efectos

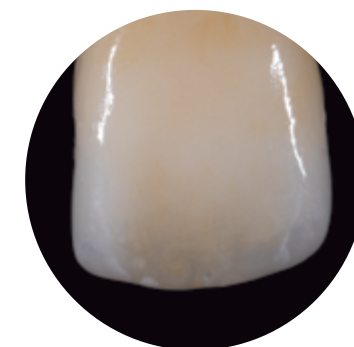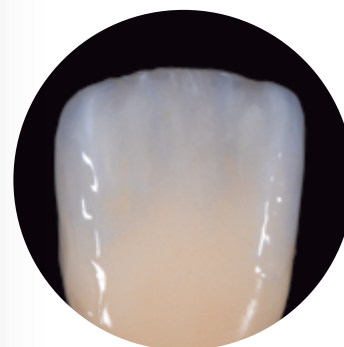

La textura y el color permanecen estables tanto durante el modelado como tras la cocción, lo que reduce considerablemente el esfuerzo.


Listo para usar

Posibilidades prácticamente ilimitadas para múltiples técnicas de aplicación.

Tanto la caracterización tridimensional con pastas listas para usar, consistentes en partículas cerámicas exactamente armonizadas, como el microrecubrimiento ultrafino con texturas detalladas pueden llevarse a cabo de forma precisa, ágil y con un efecto impresionante.

Consistencia óptima para una aplicación rápida y eficiente.

Los materiales pueden aplicarse mediante la técnica húmedo sobre húmedo sin que los colores se mezclen. Todos los materiales pueden diluirse con LIQUID, lo que posibilita técnicas de aplicación flexibles y prácticas. Además, se puede secar el LIQUID para solidificar la consistencia. Esto facilita el modelado de superficies extensas, así como el modelado plástico exactamente dosificado.

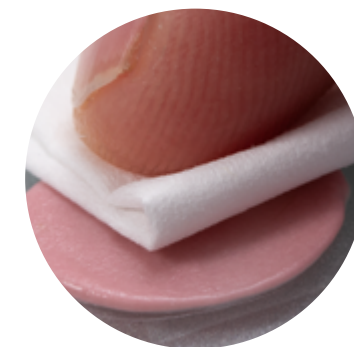

Estética rosa: caracterización 3D.

Sinopsis de flujos de trabajo

Flujo de trabajo	Grado de dificultad	Recomendación de uso	
Flujo de trabajo BASIC GINGIVA	● ○ ○ ○ ○ ○ ○	Caracterización gingival	
Microrecubrimiento ultrafino – Flujo de trabajo CREATIVE GINGIVA: TEXTURE PASTE tras el flujo de trabajo BASIC	● ● ○ ○ ○ ○ ○	Efecto de profundidad adicional	
Microrecubrimiento ultrafino – Flujo de trabajo CREATIVE GINGIVA: TEXTURE PASTE como punto de partida	● ● ● ○ ○ ○ ○	Para la combinación rápida y personalizada de colores y textura	

Ir a los tutoriales



Ámbitos de aplicación: pastas de cerámica líquida.

Sinopsis de materiales VITA LUMEX® UNIQUE

Pastas COLOR		
	Incremento del valor de luminosidad o acentuación de crestas y cúspides.*	
LUMIN TRANSLUCENT EFFECT	crystal-white	
	Para imitar mamelones naturales y el efecto halo en la zona incisal.*	
MAMELON EFFECT	saffron honey-melon	
	Para obtener efectos translúcidos naturales y crear mayor profundidad, y para reducir el valor de claridad.*	
TRANSLUCENT EFFECT	deep-blue midnight foggy-grey lilac	
	Para intensificar la zona cervical e imitar estructuras de mamelones intensivas. También indicado para imitar decoloraciones en la zona interdental y zonas abrasionadas.*	
TRANSLUCENT EFFECT	copper	
	Para el mezclado y para efectos en la zona de los dientes y de la encía.*	
TRANSLUCENT EFFECT	lemon deep-red	
	Para imitar defectos oscuros en el esmalte, fosas y manchas de nicotina, así como decoloraciones en la zona cervical y en los bordes incisales. Para intensificar las áreas proximales y para neutralizar colores dentales rojizos.*	
TRANSLUCENT EFFECT	khaki	

* Los ejemplos y las propuestas tienen carácter orientativo. La aplicación de las pastas tiene lugar de acuerdo con su propósito y con el efecto deseado.

Pastas EFFECT y CHROMA		
	Para imitar puntas de cúspides de color tiza, fisuras en el esmalte o calcificaciones, para la acentuación de cúspides y crestas. Para aumentar el valor de claridad.*	
HIGHLIGHTING EFFECT	white	
	Para imitar fosas oscuras y defectos en el esmalte, decoloraciones incisales y zonas proximales oscuras.*	
HIGHLIGHTING EFFECT	brown	
	Para reducir el valor de claridad. Para imitar translucidez intensa y para oscurecer otros colores.*	
HIGHLIGHTING EFFECT	black	
	Para el ajuste sencillo del croma y para la adaptación al color dental natural.*	
CHROMA		
Colores VITA classical A1-D4	red-brown (A) red-sun (B) grey-brown (C) grey-red (D)	
Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER	corn-yellow (L) red-yellow (M) light-red (R)	
	Para imitar efectos gingivales naturales. Sugerencia: Estas tonalidades también pueden utilizarse para efectos mínimos en la zona de los dientes.	
EFFECT GINGIVA	pale-papilla** light-rose** nectarine** deep-pink** deep-purple**	

* Los ejemplos y las propuestas tienen carácter orientativo. La aplicación de las pastas tiene lugar de acuerdo con su propósito y con el efecto deseado.

** No fluorescente

Ámbitos de aplicación: pastas de cerámica líquida.

Sinopsis de materiales VITA LUMEX® UNIQUE

Pastas TEXTURE

	Microrecubrimiento ultrafino: Para pequeñas modificaciones de la forma y la textura con un grosor aproximado de 0,1-0,2 mm, para el recubrimiento cromático y la texturización de zonas gingivales.* Sugerencia: TEXTURE clear + misty-rose para crear una textura superficial más transparente sobre efectos ya existentes y para la coloración en la zona gingival.*	
TEXTURE GINGIVA	light-pink** pink**	TEXTURE clear misty-rose
	Permite introducir pequeñas modificaciones de la forma y la textura, así como incorporar puntos de contacto. Microrecubrimiento ultrafino con un grosor aproximado de 0,1-0,2 mm, para intensificar el efecto de profundidad.*	
TEXTURE	ENAMEL light opal-sky	clear misty-rose

GLASEADO

	Para el recubrimiento de zonas dentales y gingivales. También se puede mezclar.*	
GLAZE PASTE	FLUO-GLAZE GLAZE (no fluorescente)	
GLAZE POWDER	GLAZE (no fluorescente)	



* Los ejemplos y las propuestas tienen carácter orientativo. La aplicación de las pastas tiene lugar de acuerdo con su propósito y con el efecto deseado.

** No fluorescente

Soluciones óptimas en el proceso.

Determinación del color

VITA Easyshade V / VITA Easyshade LITE
o guías de colores VITA



Confección de la estructura

VITA YZ ZIRCONIA, cerámica de feldespato VITABLOCKS
o cerámica de disilicato de litio VITA AMBRIA



Recubrimiento

VITA LUMEX AC



Caracterización 3D y microrecubrimiento ultrafino

VITA LUMEX UNIQUE Liquid Ceramic



Proceso de cocción

VITA VACUMAT 6100 M
VITA SMART.FIRE ADVANCED



Pulido

VITA CERAMICS Polishing Sets
y pasta de pulido VITA Polish Cera



Estamos encantados de ayudarle.

Línea directa de apoyo a las ventas

Tel.: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA North America

EE. UU.: +1 800-828-3839
Asistencia técnica EE. UU.:
+1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Línea directa de asistencia técnica

Tel.: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA Canada

Canadá: +1 800-263-4778
Asistencia técnica Canadá:
+1 800-324-6224

Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Publicación de este folleto de producto: 2025-07

Con la publicación de este folleto de producto pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos

llevan el marcado **CE 0124**.
VITA LUMEX® UNIQUE · VITA LUMEX® AC

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.

Rx only  


Referencias

Análisis internos, Dpto. de I+D de VITA:

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Departamento de Investigación y Desarrollo
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen (Alemania)

Información adicional:

10887 VITA LUMEX UNIQUE: cerámicas de recubrimiento aprobadas, véase **VITA LUMEX® UNIQUE**
Descarga desde www.vita-zahnfabrik.com

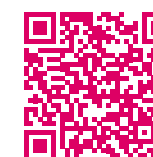

Para más información sobre VITA LUMEX UNIQUE,
simplemente escanee el código QR.
http://www.vita-zahnfabrik.com/lumex_unique



VITA LUMEX® UNIQUE

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

