

Une transformation **simplement unique !**



VITA LUMEX® UNIQUE

La céramique liquide pour une
caractérisation 3D simple et
une micro-stratification ultrafine.
Rend le monolithique unique.





Céramique liquide

VITA LUMEX® UNIQUE

Une céramique liquide. Des possibilités uniques.

VITA LUMEX UNIQUE apporte la touche finale aux restaurations monolithiques : simple, rapide et efficace. Le système innovant de céramique liquide se compose de pâtes fluorescentes prêtes à l'emploi et permet d'obtenir une esthétique unique offrant un effet de profondeur tridimensionnel.

Les restaurations monolithiques sont ainsi portées à un niveau inédit, avec un résultat immédiatement visible : la forme, la couleur et les effets restent stables avant et après la cuisson. La faible température de cuisson préserve les caractéristiques de surface conçues, ce qui permet d'obtenir des résultats fiables et esthétiques même avec une seule cuisson.

Qu'il s'agisse d'une caractérisation 3D efficace ou d'une micro-stratification ultrafine sur dioxyde de zirconium, disilicate de lithium ou céramique feldspathique, VITA LUMEX UNIQUE offre une esthétique optimale en un minimum d'efforts. Le résultat : un rendu chromatique fascinant, des textures impressionnantes et une brillance de surface naturelle. Le tout grâce à un seul et même système qui rend les restaurations monolithiques uniques.

Manipulation facile

La forme, la couleur et les effets sont visibles dès l'application des pâtes et restent inchangés après la cuisson. Pour des résultats fiables.

Une esthétique unique

Les restaurations monolithiques obtiennent une esthétique fascinante, un effet de profondeur tridimensionnel et une brillance naturelle.

Flexibilité énorme


Des nuances de couleurs fines, des structures détaillées et des détails en filigrane peuvent être réalisés avec précision, grâce à une manipulation flexible des consistances. Idéale pour la caractérisation 3D et la micro-stratification ultrafine.



Esthétique rose
Reproduction fidèle de la gencive.

Technique mixte

Du cut-back traditionnel à la stratification complète avec VITA LUMEX AC et VITA LUMEX UNIQUE.

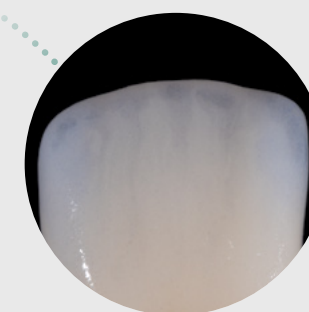

Caractérisation 3D
Effet de profondeur et brillance naturelle sans cut-back.




Micro-stratification ultrafine

Avec une épaisseur de couche de seulement 0,1 - 0,2 mm sans cut-back traditionnel.

Une esthétique unique.

Des espaces de conception créatifs pour une esthétique impressionnante

Les effets naturels tels que la translucidité incisale, les effets de halo, les mamelons, les fissures d'émail et autres peuvent être reproduits rapidement et facilement avec les masses fluorescentes EFFECT PASTE.

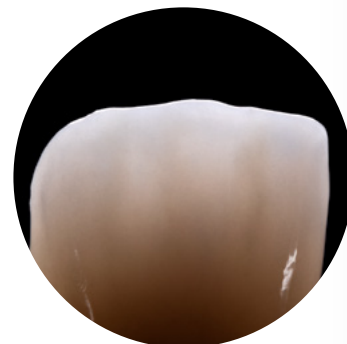

Il est possible d'augmenter ou de diminuer la luminosité et de procéder à des ajustements systématiques de couleur dans les deux standards de couleur VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Valeur inférieure



Valeur supérieure


Correction simple des couleurs

Les masses CHROMA PASTE permettent de réussir facilement l'adaptation chromatique dans les groupes de couleurs correspondants. Que ce soit pour corriger la couleur de la dent ou pour l'adapter aux standards de couleur VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER, les masses CHROMA PASTE permettent de réussir facilement l'adaptation chromatique.



La finition parfaite

La FLUO-GLAZE PASTE assure une finition naturelle qui impressionne aussi bien à la lumière du jour que sous la lumière noire des UV. La glaçure est facile à appliquer et assure une esthétique fascinante. L'anatomie muco-gingivale n'étant pas fluorescente, la pâte non fluorescente GLAZE PASTE est disponible pour une esthétique rose naturelle.

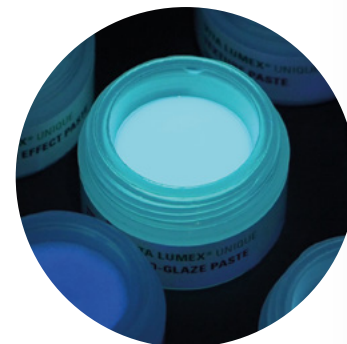

sans glaçure





avec glaçure



Manipulation facile. Flexibilité énorme.

Visibilité immédiate des effets

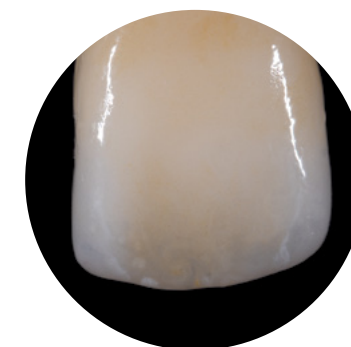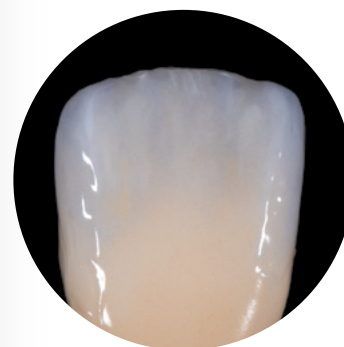

La texture et la couleur restent stables aussi bien pendant le modelage qu'après la cuisson, ce qui réduit considérablement les efforts.


Prêtes à l'usage

Des possibilités quasiment illimitées pour de multiples techniques d'application.

La caractérisation tridimensionnelle grâce à des pâtes prêtes à l'emploi composées de particules céramiques finement ajustées, ainsi que des micro-stratifications ultrafines offrant des textures riches en détails peuvent être réalisées de manière précise et rapide, avec un effet impressionnant.

Consistance optimale pour une application rapide et efficace.

Les masses peuvent être appliquées avec la technique « Wet-on-Wet » (humide sur humide), sans que les couleurs ne se mélangent. Toutes les masses peuvent être diluées avec LIQUID - pour des techniques d'application flexibles et pratiques. Le LIQUID peut en outre être aspiré afin d'en solidifier la consistance. Cela facilite aussi bien le modelage plastique sur de grandes surfaces que le modelage plastique finement dosé.

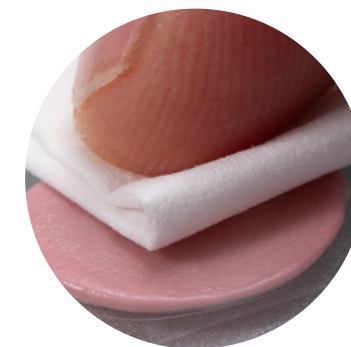

Esthétique rose – Caractérisation 3D.

Vue d'ensemble du flux de travail

Flux de travail	Degré de difficulté	Recommandation d'utilisation	
Flux de travail BASIC GINGIVA	● ○ ○ ○ ○ ○ ○	Caractérisation gingivale	
Micro-stratification ultrafine – Flux de travail CREATIVE GINGIVA : TEXTURE PASTE après flux de travail BASIC	● ● ○ ○ ○ ○ ○	Effet de profondeur supplémentaire	
Micro-stratification ultrafine – Flux de travail CREATIVE GINGIVA : TEXTURE PASTE comme point de départ	● ● ● ○ ○ ○ ○	Pour une combinaison rapide et personnalisée des couleurs et de la structure	

Accéder aux tutoriels





Domaines d'application : pâtes céramiques liquides.

Présentation des masses VITA LUMEX® UNIQUE

Pâtes COLOR		
	Augmentation de la valeur de luminosité ou mise en évidence des crêtes et zones de bosses.*	
LUMIN TRANSLUCENT EFFECT	crystal-white	
	Pour imiter les mamelons naturels et l'effet de halo dans la zone incisale.*	
MAMELON EFFECT	saffron honey-melon	
	Pour créer des effets translucides naturels, une plus grande profondeur et pour réduire la valeur de luminosité.*	
TRANSLUCENT EFFECT	deep-blue midnight foggy-grey lilac	
	Pour intensifier la partie cervicale et imiter les structures mamelonnées intenses. Convient en outre pour imiter les colorations dans la zone interdentaire et les zones abrasées.*	
TRANSLUCENT EFFECT	copper	
	Pour le mélange et les effets dans les zones dentaire et gingivale.*	
TRANSLUCENT EFFECT	lemon deep-red	
	Pour imiter les défauts foncés de l'émail, les fissures, les colorations dues à la nicotine ainsi que les colorations dans la zone cervicale et sur les bords incisifs. Pour intensifier les zones proximales et neutraliser les couleurs de dents rougeâtres*.	
TRANSLUCENT EFFECT	khaki	

* Exemples et propositions à titre indicatif. L'application des pâtes se fait selon leur destination et l'effet souhaité.

Pâtes EFFECT et CHROMA		
	Pour imiter les pointes de cuspidés crayeuses, les fissures de l'émail, les taches de calcium, l'accentuation des cuspidés et des crêtes. Pour augmenter la valeur de luminosité.*	
HIGHLIGHTING EFFECT	white	
	Pour imiter les fissures et les défauts d'émail foncés, les décolorations incisales et les zones proximales foncées.*	
HIGHLIGHTING EFFECT	brown	
	Pour diminuer la valeur de luminosité, Pour imiter une translucidité intense et assombrir d'autres couleurs.*	
HIGHLIGHTING EFFECT	black	
	Pour un ajustement simple de la chromaticité ou pour une adaptation à la couleur naturelle des dents.*	
CHROMA		
Couleurs VITA classical A1-D4	red-brown (A) red-sun (B) grey-brown (C) grey-red (D)	
Couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER	corn-yellow (L) red-yellow (M) light-red (R)	
	Pour imiter les effets naturels de la gencive. Conseil : ces teintes peuvent également être utilisées pour créer des effets minimes au niveau des dents.	
EFFECT GINGIVA	pale-papilla** light-rose** nectarine** deep-pink** deep-purple**	

* Exemples et propositions à titre indicatif. L'application des pâtes se fait selon leur destination et l'effet souhaité.

**non fluorescent

Domaines d'application : pâtes céramiques liquides.

Présentation des masses VITA LUMEX® UNIQUE

Pâtes TEXTURE

	Micro-stratification ultrafine : Pour de petites modifications de forme et de structure d'une épaisseur d'environ 0,1 – 0,2 mm, pour le recouvrement de couleur et la texturation des zones gingivales.* Conseil : TEXTURE clear + misty-rose pour une structuration de surface plus transparente sur des effets déjà existants et une coloration dans la zone gingivale.*	
TEXTURE GINGIVA	 light-pink**  pink**	TEXTURE  clear  misty-rose
	De petites modifications de la forme et de la structure ainsi que l'ajout de points de contact sont possibles. Micro-stratification ultrafine d'une épaisseur d'environ 0,1 à 0,2 mm pour renforcer l'effet de profondeur.*	
TEXTURE	 ENAMEL light  opal-sky	 clear  misty-rose

GLAÇURE

	Pour la stratification des zones dentaires et gingivales. Peut aussi être mélangé.*	
GLAZE PASTE	 FLUO-GLAZE  GLAZE (non fluorescent)	
GLAZE POWDER	 GLAZE (non fluorescent)	



* Exemples et propositions à titre indicatif. L'application des pâtes se fait selon leur destination et l'effet souhaité.

**non fluorescent

Des solutions adaptées en cours de processus.

Détermination de la couleur

VITA Easyshade V/VITA Easyshade LITE
ou teintiers VITA



Réalisation d'armature

en dioxyde de zirconium VITA YZ, céramique feldspathique VITABLOCS
ou en céramique dopée au dioxyde de zirconium VITA AMBRIA



Stratification

VITA LUMEX AC



Caractérisation 3D et micro-stratification ultrafine

Céramique liquide VITA LUMEX UNIQUE



Protocole de cuisson

VITA VACUMAT 6100 M
VITA SMART.FIRE ADVANCED



Polissage

Kits de polissage VITA CERAMICS
et pâte de polissage VITA Polish Cera



Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire.

Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884
Fax +49 7761 562-299
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Ligne d'assistance technique

Téléphone +49 7761 562-222
Fax +49 7761 562-446
8 h - 17 h (HEC)
info@vita-zahnfabrik.com

Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839
Assistance technique États-Unis :
+1 888-249-1640
info@vitnorthamerica.com

Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778
Assistance technique Canada :
+1 800-324-6224

N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Publication de cette brochure produit : 2025-10

Cette nouvelle édition la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants

portent le marquage **CE 0124** :
VITA LUMEX® UNIQUE · VITA LUMEX® AC

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

Rx uniquement  

Références

Recherches internes, VITA R&D

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Département recherche et développement
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Allemagne

Informations complémentaires :

10887 VITA LUMEX UNIQUE – Céramiques cosmétiques homologuées, voir VITA LUMEX®
UNIQUE Téléchargement via www.vita-zahnfabrik.com



Pour de plus amples informations sur VITA AKZENT UNIQUE,
scannez le code QR.
http://www.vita-zahnfabrik.com/lumex_unique



VITA LUMEX® UNIQUE

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

