

VITA

Quickstart Guide



VITA Easyshade® V

Optimale Farbbestimmung.
Maximale Sicherheit.





Inhaltsübersicht

- 1 Installation**
 - 1.1 VITA mobileAssist+ App installieren 4
- 2 Berechtigungen**
 - 2.1 Berechtigungen für Bluetooth, Standort und Kamera erteilen 5
 - 2.2 Standort- und Bluetooth-Berechtigung erteilen 6
 - 2.3 Kamera-Berechtigung erteilen. 6
 - 2.4 Foto- und Videospeicher-Berechtigung erteilen 7
- 3 Bluetooth**
 - 3.1 Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren 8
 - 3.2 Bluetooth auf dem Android-Gerät aktivieren. 8
- 4 Verbindung**
 - 4.1 VITA Easyshade V mit der App verbinden 9
- 5 Messdaten übertragen**
 - 5.1 Messdaten übertragen. 10

1. Installation

1.1 VITA mobileAssist+ App installieren

- Öffnen Sie den Google Play Store auf Ihrem Android-Gerät.
- Suchen Sie nach „**VITA mobileAssist+**“.
- Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

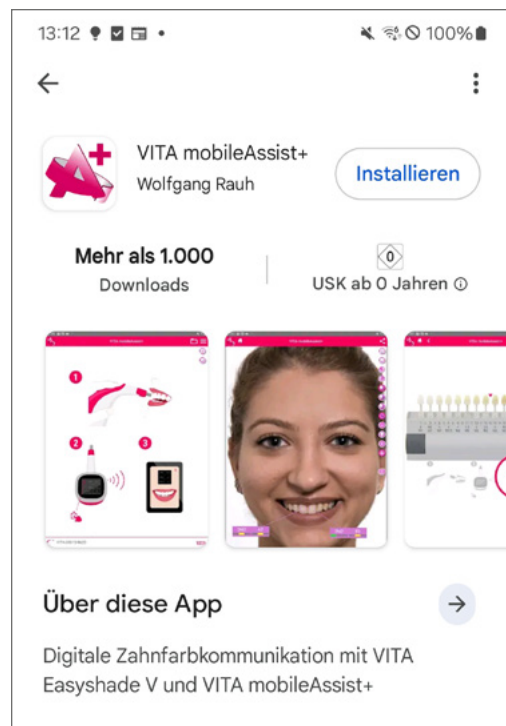


Abbildung 1

2. Berechtigungen

2.1. Berechtigungen für Bluetooth, Standort und Kamera erteilen

Beim Start der **VITA mobileAssist+ App** werden Sie um verschiedene Berechtigungen gebeten. Diese sind erforderlich, damit die App Ihr VITA Easyshade V über Bluetooth finden und sich mit ihm verbinden kann.

2.2. Standort- und Bluetooth-Berechtigung erteilen

Nachdem Sie die App geöffnet und unten auf die VITA Easyshade V Abbildung getippt haben, erscheinen folgende Anfragen:

- Es erscheint ein Fenster mit der Frage: „**mobileAssist+ erlauben, den Gerätestandort abzurufen?**“
- Tippen Sie auf „**Bei Nutzung der App**“, damit die App Ihr VITA Easyshade V finden kann.
- Alternativ können Sie „**Nur dieses Mal**“ wählen, wenn Sie jedes Mal gefragt werden möchten.
- Automatisch erscheint danach ein weiteres Fenster mit der Frage: „**Zulassen, dass mobileAssist+ Geräte in der Nähe finden, sich mit ihnen verbinden und ihre relative Position bestimmen kann?**“
- Tippen Sie auf „**Zulassen**“, damit die App Ihr VITA Easyshade V über Bluetooth finden und verbinden kann.

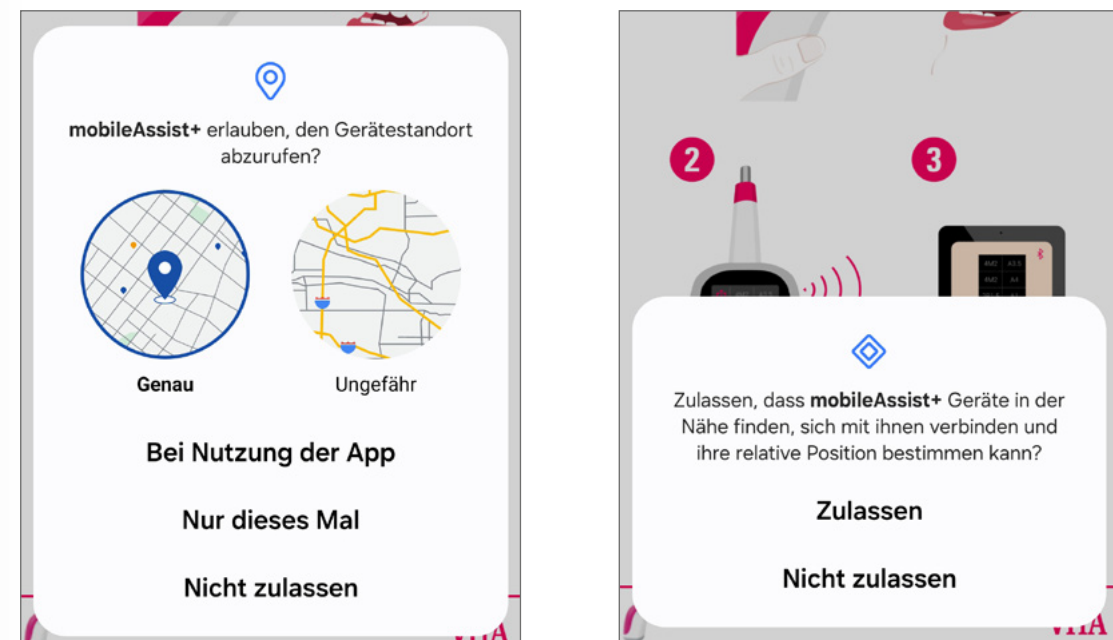


Abbildung 2: Standort- und Bluetooth-Berechtigung erteilen

2. Berechtigungen

2.3. Kamera-Berechtigung erteilen

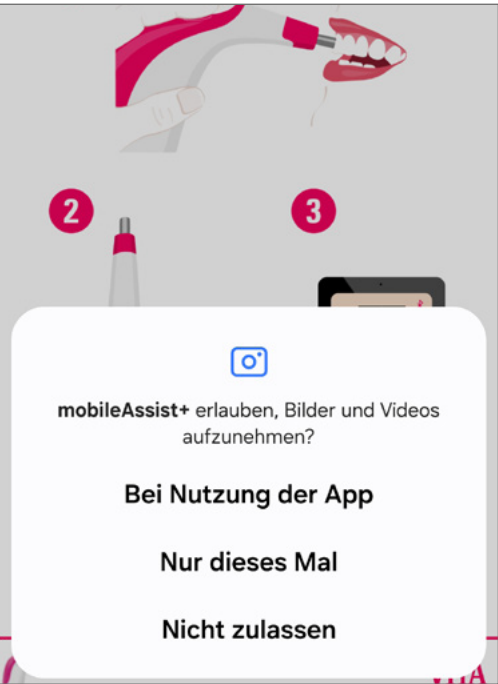


Abbildung 3: Kamera-Berechtigung erteilen

- Die Anfrage erscheint erst, wenn Sie innerhalb der App auf das Kamera-Symbol tippen, um eine Aufnahme zu machen.
- Sobald Sie auf das Kamera-Symbol tippen, erscheint die Frage: „**mobileAssist+ erlauben, Bilder und Videos aufzunehmen?**“
 - Tippen Sie auf „**Bei Nutzung der App**“, damit die App Zugriff auf die Kamera erhält und Fotos aufnehmen kann.

2. Berechtigungen

2.4. Foto- und Videospeicher-Berechtigung erteilen

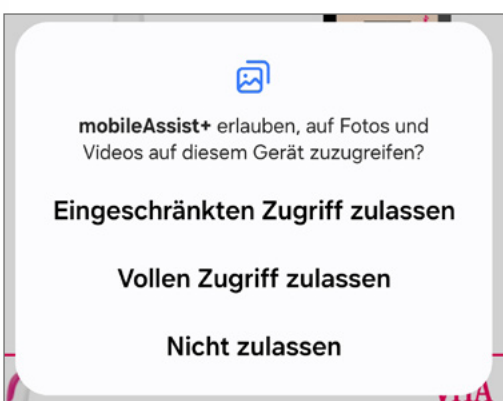


Abbildung 4: Foto- und Videospeicher-Berechtigung erteilen

- Falls Sie gespeicherte Fotos in der App verwenden möchten, erscheint eine weitere Anfrage, sobald Sie auf das Foto-Symbol in der App tippen:
- Es erscheint ein Fenster mit der Frage: „**mobileAssist+ erlauben, auf Fotos und Videos auf diesem Gerät zuzugreifen?**“
 - Wählen Sie „**Eingeschränkten Zugriff zulassen**“, wenn Sie nur bestimmte Fotos freigeben möchten.
 - Oder „**Vollen Zugriff zulassen**“, wenn die App auf alle Fotos und Videos zugreifen darf.

Hinweis

Falls Sie Probleme mit der Verbindung haben, stellen Sie sicher, dass die Berechtigungen für Bluetooth, Standort, Kamera und den Zugriff auf Fotos und Videos aktiviert sind. Bei den Berechtigungen werden Sie maximal zweimal nach dem Zugriff gefragt. Falls Sie „Nicht zulassen“ auswählen, wird die App nicht erneut nach einer Erlaubnis fragen. In diesem Fall müssen Sie die Berechtigung manuell über die Geräteeinstellungen aktivieren.

So ändern Sie die Berechtigungen nachträglich:

Einstellungen ⇒ **Apps (oder Apps & Benachrichtigungen)** ⇒ **mobileAssist+** ⇒ **Berechtigungen**

Aktivieren Sie die erforderlichen Berechtigungen:

- Standort ⇒ „Zugriff nur während der Nutzung der App Zulassen“
- Geräte in der Nähe ⇒ „Zulassen“
- Kamera ⇒ „Zugriff nur während der Nutzung der App Zulassen“
- Fotos und Videos ⇒ „Immer vollen Zugriff erlauben“

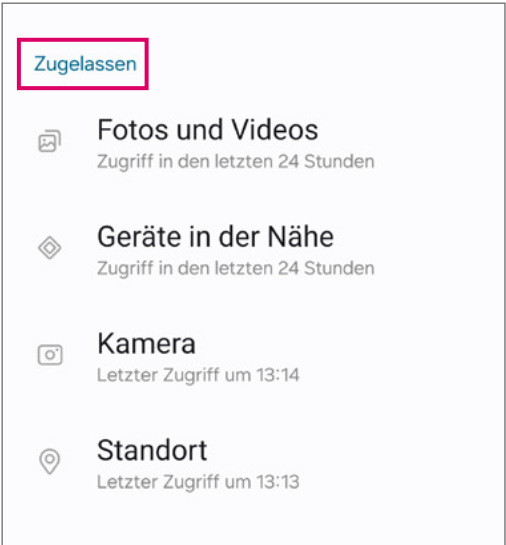
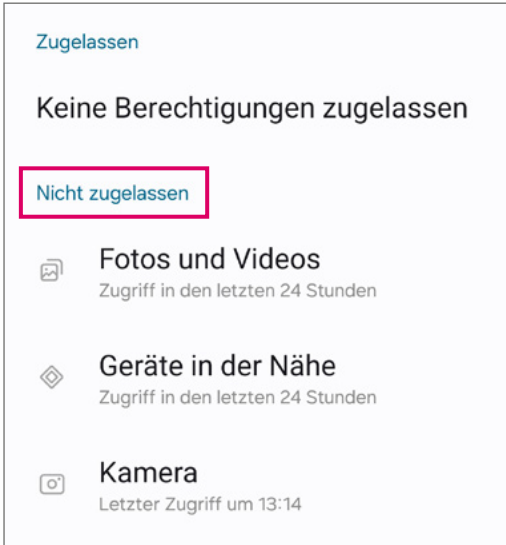


Abbildung 5: Berechtigungen nachträglich

3. Bluetooth

3.1. Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren

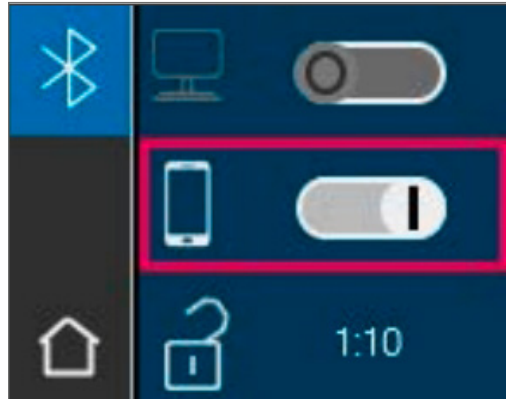


Abbildung 6: Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren

- Schalten Sie Ihr **VITA Easyshade V** ein.
- Gehen Sie in das Bluetooth-Menü des Geräts.
- Schieben Sie den mittleren Schieberegler nach rechts, um Bluetooth zu aktivieren.
- Das Vorhängeschloss-Symbol öffnet sich automatisch und das Gerät ist für 2 Minuten sichtbar.
- Falls das Vorhängeschloss-Symbol geschlossen bleibt, tippen Sie darauf, um das Gerät sichtbar zu machen.

3.2. Bluetooth auf dem Android-Gerät aktivieren

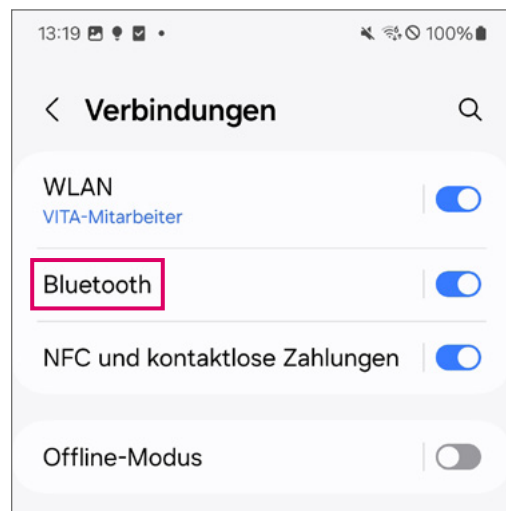


Abbildung 7: Bluetooth auf dem Android-Gerät aktivieren

- Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät.
- Tippen Sie auf Verbindungen
- Aktivieren Sie Bluetooth.

4. Verbindung

4.1. VITA Easyshade V mit der App verbinden

- Starten Sie die VITA mobileAssist+ App.
- Tippen Sie unten auf die VITA Easyshade V Abbildung.
- Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus. ⇒ Die Seriennummer finden Sie auf der Unterseite der Ladestation.
- Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.


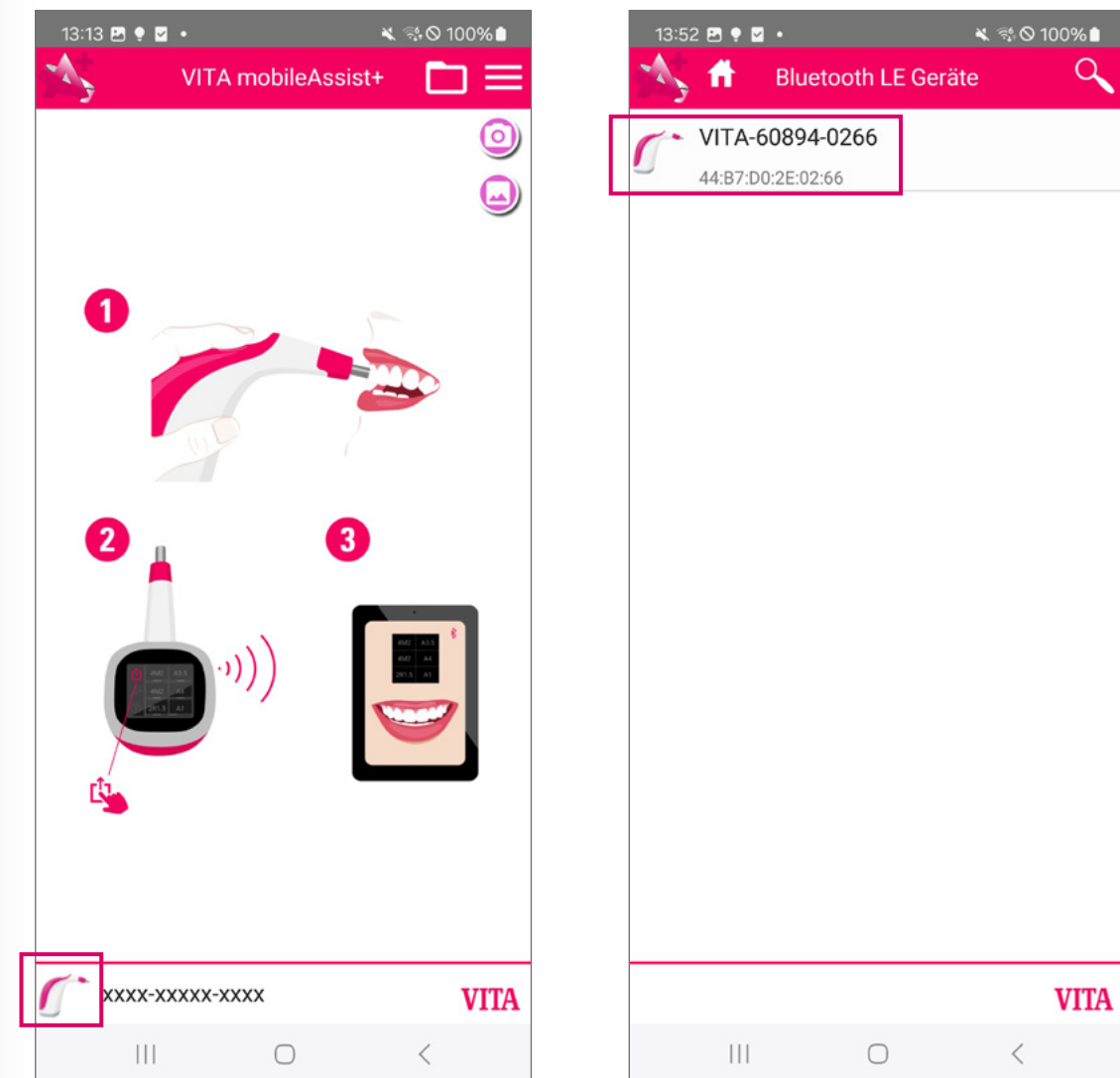


Abbildung 8

5. Messdaten übertragen

5.1. Messdaten übertragen

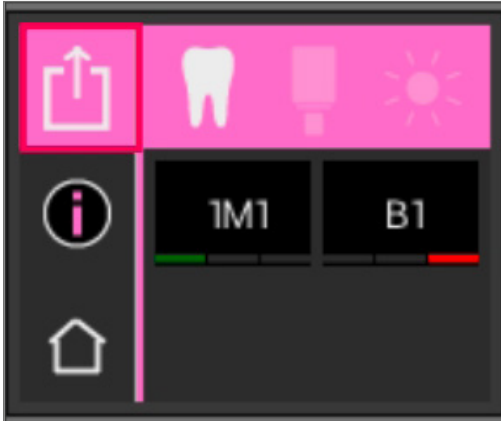

- Führen Sie eine Farbmessung durch oder tippen Sie auf das Messergebnis-Symbol
- Eine aktive Verbindung wird durch das Teilen-Symbol angezeigt.
- **Tippen Sie** auf das Teilen-Symbol um Messdaten zu übertragen

Abbildung 9: Messdaten übertragen

Hinweis

Falls ein zuvor mit dem VITA Easyshade V gekoppeltes iOS- oder Android-Gerät noch in Bluetooth-Reichweite ist, kann dies die Verbindung mit einem neuen Gerät beeinträchtigen.

iOS: Einstellungen ⇒ Bluetooth ⇒ VITA Easyshade in der Liste „Meine Geräte“ finden ⇒ (i)-Symbol antippen ⇒ „Dieses Gerät ignorieren“ wählen ⇒ Bluetooth kurz deaktivieren und wieder aktivieren ⇒ Erneute Kopplung mit neuem Gerät versuchen

Android: Einstellungen ⇒ Bluetooth ⇒ VITA Easyshade in der Liste „Gekoppelte Geräte“ finden ⇒ Gerät entfernen oder „Vergessen“ wählen ⇒ Bluetooth kurz deaktivieren und wieder aktivieren oder Gerät neu starten ⇒ Erneute Kopplung mit neuem Gerät versuchen

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

