

VITA

Guía de inicio rápido



VITA Easyshade® V

Determinación óptima del color,
seguridad máxima.





Índice

1 Instalación

1.1 Instalación de la aplicación VITA mobileAssist+ 4

2 Permisos

2.1 Concesión de permisos para Bluetooth, ubicación y cámara 5
2.2 Concesión de permisos para ubicación y Bluetooth 5
2.3 Concesión de permiso para la cámara 6
2.4 Concesión de permiso para la galería de fotos y vídeos 7

3 Bluetooth

3.1 Activación del Bluetooth en el VITA Easyshade V 8
3.2 Activación del Bluetooth en el dispositivo Android 8

4 Conexión

4.1 Conexión del VITA Easyshade V a la aplicación 9

5 Transmisión de los datos de medición

5.1 Transmisión de los datos de medición 10

1. Instalación

1.1 Instalación de la aplicación VITA mobileAssist+

- Acceda a Google Play Store en su dispositivo Android.
- Busque **“VITA mobileAssist+”**.
- Descargue e instale la aplicación.

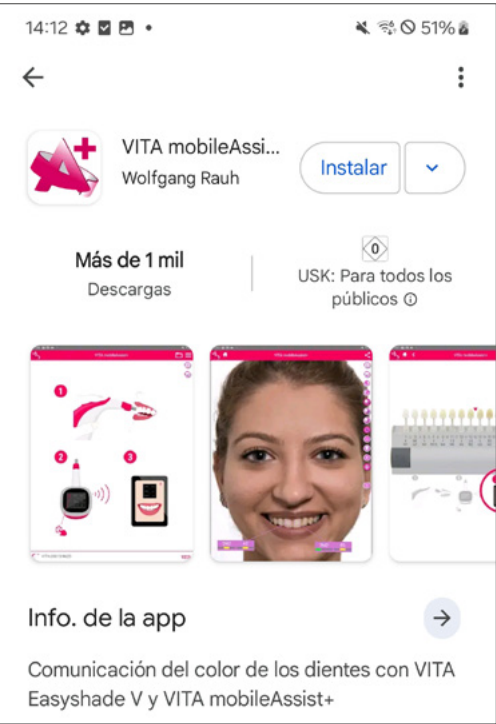


Figura 1

2. Concesión

2.1. Concesión de permisos para Bluetooth, ubicación y cámara

La primera vez que inicie la **aplicación VITA mobileAssist+** se le pedirán diversos permisos de acceso. Estos permisos son necesarios para que la aplicación pueda detectar su VITA Easyshade V y conectarse a este por Bluetooth.

2.2. Concesión de permisos para ubicación y Bluetooth

Una vez que haya abierto la aplicación y haya tocado la imagen de VITA Easyshade V situada en la parte inferior, se mostrarán los siguientes mensajes:

- Aparecerá una ventana con el mensaje: **“¿Permitir a mobileAssist+ acceder a la ubicación del dispositivo?”**.
- **Toque “Cuando se use la aplicación”** para que la aplicación pueda detectar su VITA Easyshade V.
- También puede seleccionar **“Solo esta vez”** si desea que se le pregunte cada vez.
- A continuación, aparecerá automáticamente otra ventana con el mensaje: **“¿Permitir que mobileAssist+ pueda detectar dispositivos cercanos, conectarse a estos y determinar su posición relativa?”**.
- **Toque “Permitir”** para que la aplicación pueda detectar su VITA Easyshade V y conectarse a este a través de Bluetooth.

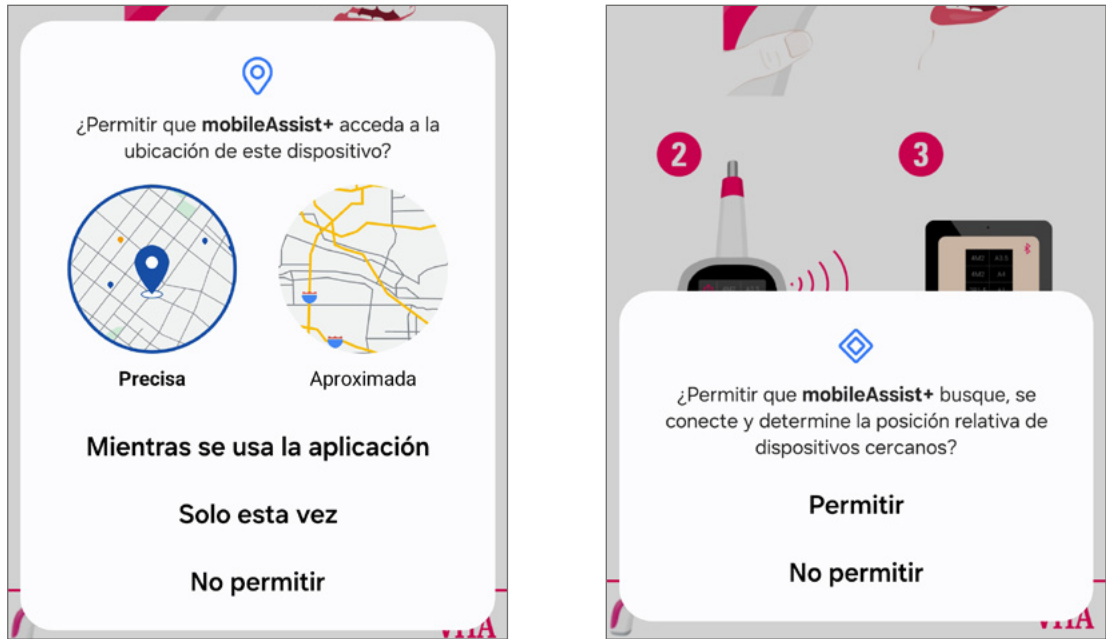


Figura 2: Concesión de permisos para ubicación y Bluetooth.

2. Concesión

2.3. Concesión de permiso para la cámara



Figura 3: Concesión de permiso para la cámara.

El mensaje no aparecerá hasta que toque el icono de la cámara dentro de la aplicación para tomar una fotografía.

- Cuando toque el icono de la cámara, se mostrará el mensaje: **“¿Permitir a mobileAssist+ tomar fotos y vídeos?”**.
- Toque **“Cuando se use la aplicación”** para que la aplicación pueda acceder a la cámara y tomar fotografías.

2.4. Concesión de permiso para la galería de fotos y vídeos

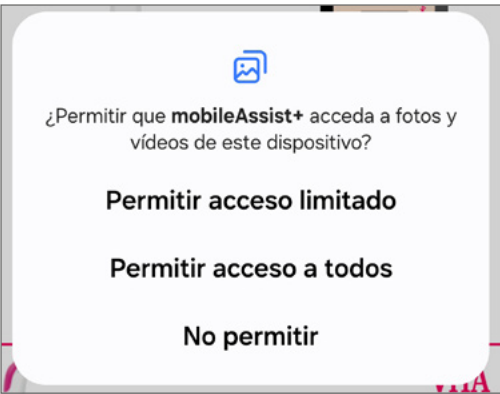


Figura 4: Concesión de permiso para la galería de fotos y vídeos.

Si quiere utilizar en la aplicación fotografías guardadas, aparecerá otro mensaje al tocar el icono de foto en la aplicación:

- Aparecerá una ventana con el mensaje: **“¿Permitir a mobileAssist+ acceder a fotos y vídeos en este dispositivo?”**.
- Seleccione **“Permitir acceso limitado”** si solo quiere autorizar determinadas fotografías.
- O bien seleccione **“Permitir acceso total”** para permitir a la aplicación acceder a todas las fotografías y vídeos.

Nota importante

Si tiene problemas con la conexión, cerciórese de que estén activados los permisos para Bluetooth, ubicación, cámara y para el acceso a fotografías y vídeos. Al configurar los permisos, se le solicitará el acceso un máximo de dos veces. En caso de que seleccione “No permitir”, la aplicación no volverá a solicitar el permiso. En este caso, deberá activar manualmente el permiso desde los ajustes del dispositivo.

Procedimiento para modificar los permisos con posterioridad:

Ajustes ⇒ Aplicaciones (o Aplicaciones y notificaciones) ⇒ mobileAssist+ ⇒ Permisos

Active los permisos requeridos:

- Ubicación ⇒ “Permitir el acceso solo durante el uso de la aplicación”
- Dispositivos cercanos ⇒ “Permitir”
- Cámara ⇒ “Permitir el acceso solo durante el uso de la aplicación”
- Fotos y vídeos ⇒ “Permitir siempre el acceso total”



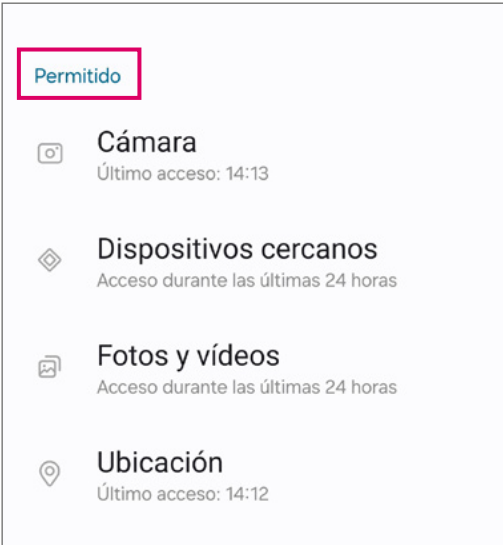


Figura 5: Modificación de los permisos con posterioridad.

3. Bluetooth


3.1. Activación del Bluetooth en el VITA Easyshade V

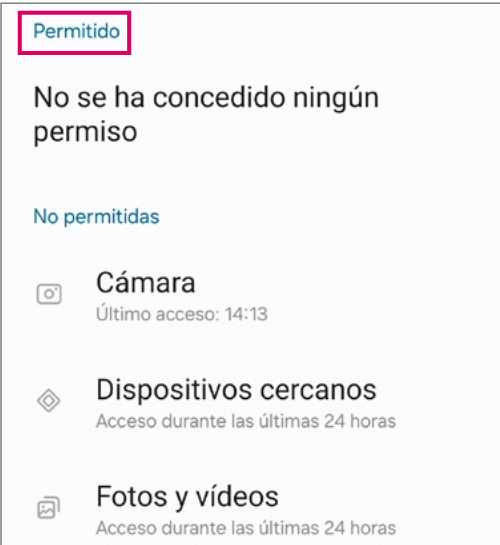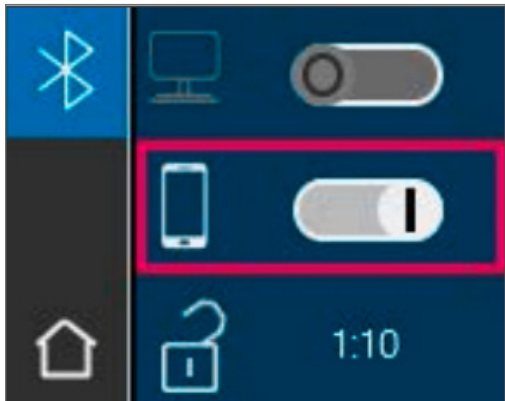

- Encienda su **VITA Easyshade V**.
- Acceda al menú de Bluetooth del aparato.
- Para activar el Bluetooth, deslice hacia la derecha el mando deslizante del medio.
- Se abrirá automáticamente el icono del candado y el aparato permanecerá detectable durante dos minutos.
- Si el icono del candado permanece cerrado, tóquelo para hacer detectable el aparato.

Figura 6: Activación del Bluetooth en el VITA Easyshade V.

3.2. Activación del Bluetooth en el dispositivo Android

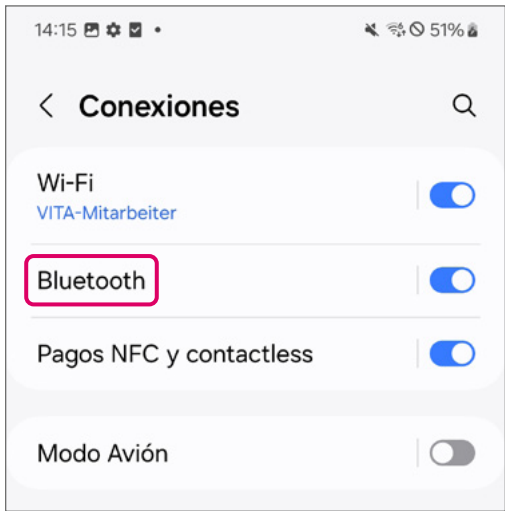

- Abra los ajustes en su dispositivo Android.
- Acceda a Conexiones.
- Active el Bluetooth.

Figura 7: Activación del Bluetooth en el dispositivo Android.

4. Conexión

4.1. Conexión del VITA Easyshade V a la aplicación

- Inicie la aplicación VITA mobileAssist+.
- Toque la imagen del VITA Easyshade V situada en la parte inferior.
- Seleccione su aparato de la lista. ⇒ Encontrará el número de serie en la base de la estación de carga.
- Espere hasta que se haya establecido la conexión.


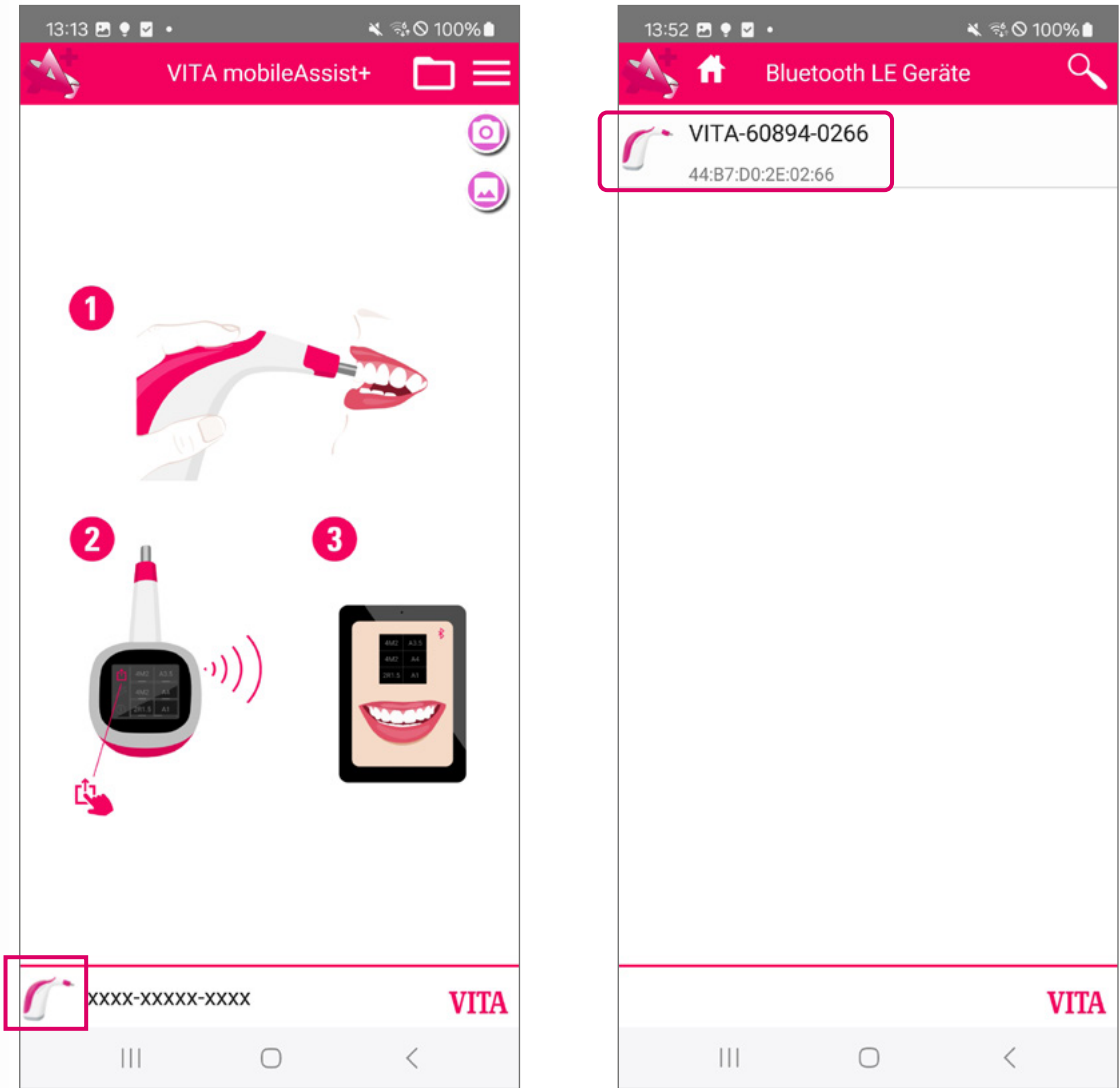


Figura 8

5. Transmisión de los datos de medición

5.1. Transmisión de los datos de medición

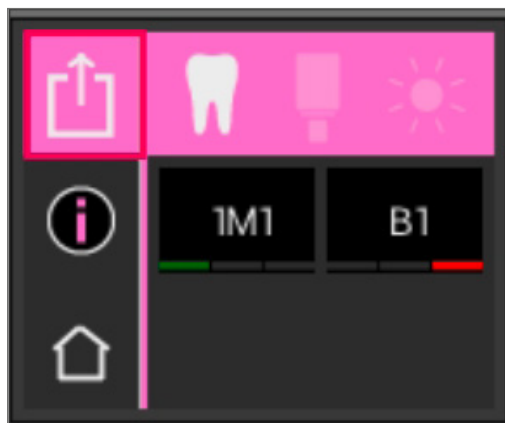

- Lleve a cabo una medición del color o toque el icono del resultado de medición.
- El símbolo de compartir indicará la existencia de una conexión activa.
- **Toque** el icono de compartir para transmitir los datos de medición.

Figura 9: Transmisión de los datos de medición.

Nota

En caso de que un dispositivo iOS o Android previamente vinculado al VITA Easyshade V todavía se encuentre dentro del alcance del Bluetooth, esto puede afectar negativamente a la conexión con un nuevo dispositivo.

iOS: Ajustes ⇒ Bluetooth ⇒ Localizar VITA Easyshade en la lista “Mis dispositivos” ⇒ Tocar el botón (i) ⇒ Seleccionar “Omitir dispositivo” ⇒ Desactivar brevemente el Bluetooth y volver a activarlo ⇒ Volver a intentar establecer la conexión con un nuevo dispositivo

Android: Ajustes ⇒ Bluetooth ⇒ Localizar VITA Easyshade en la lista “Dispositivos vinculados” ⇒ Eliminar el dispositivo o seleccionar “Olvidar” ⇒ Desactivar brevemente el Bluetooth y volver a activarlo o reiniciar el dispositivo ⇒ Volver a intentar establecer la conexión con un nuevo dispositivo

