

VITA

Quickstart Guide



VITA Easyshade® V

Optimale Farbbestimmung.
Maximale Sicherheit.





Inhaltsübersicht

- 1 Installation**
 - 1.1 VITA mobileAssist+ App installieren 4
- 2 Berechtigungen**
 - 2.1 Berechtigungen erteilen..... 5
 - 2.2 Bluetooth-Berechtigung erteilen..... 6
 - 2.3 Kamera-Berechtigung erteilen..... 6
- 3 Bluetooth**
 - 3.1 Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren..... 8
 - 3.2 Bluetooth auf dem iPhone aktivieren..... 8
- 4 Verbindung**
 - 4.1 VITA Easyshade V mit der App verbinden 9
- 5 Messdaten übertragen**
 - 5.1 Messdaten übertragen..... 10

1. Installation

1.1 VITA mobileAssist+ App installieren

- Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPhone oder iPad.
- Suchen Sie nach „**VITA mobileAssist+**“.
- Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

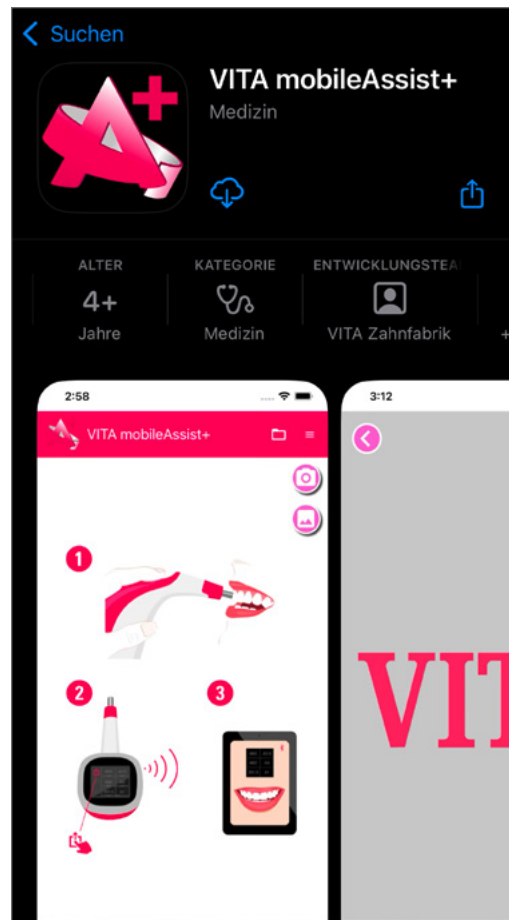


Abbildung 1: VITA mobileAssist+ App installieren

2. Berechtigungen

2.1. Berechtigungen erteilen

Beim ersten Start der VITA mobileAssist+ App werden Sie um Zugriffserlaubnisse gebeten. Diese Berechtigungen sind erforderlich, damit die App Ihr VITA Easyshade V über Bluetooth erkennt und Kameraaufnahmen für Farbmessungen nutzen kann.

2.2. Bluetooth-Berechtigung erteilen

- Nur beim ersten Start der App erscheint ein Fenster mit der Frage:
„Darf ‚mobileAssist+‘ Bluetooth-Geräte suchen?“
- Tippen Sie auf „Erlauben“, damit die App Ihr **VITA Easyshade V** über Bluetooth finden kann.

2. Berechtigungen

2.3. Kamera-Berechtigung erteilen

- Sobald Sie das Kamera-Symbol in der App auswählen, erscheint ein Fenster mit der Frage:
„mobileAssist+“ möchte auf Ihre Kamera zugreifen“
- **Tippen Sie auf „Erlauben“**, damit die App Zugriff auf die Kamera erhält und Fotos aufnehmen kann.

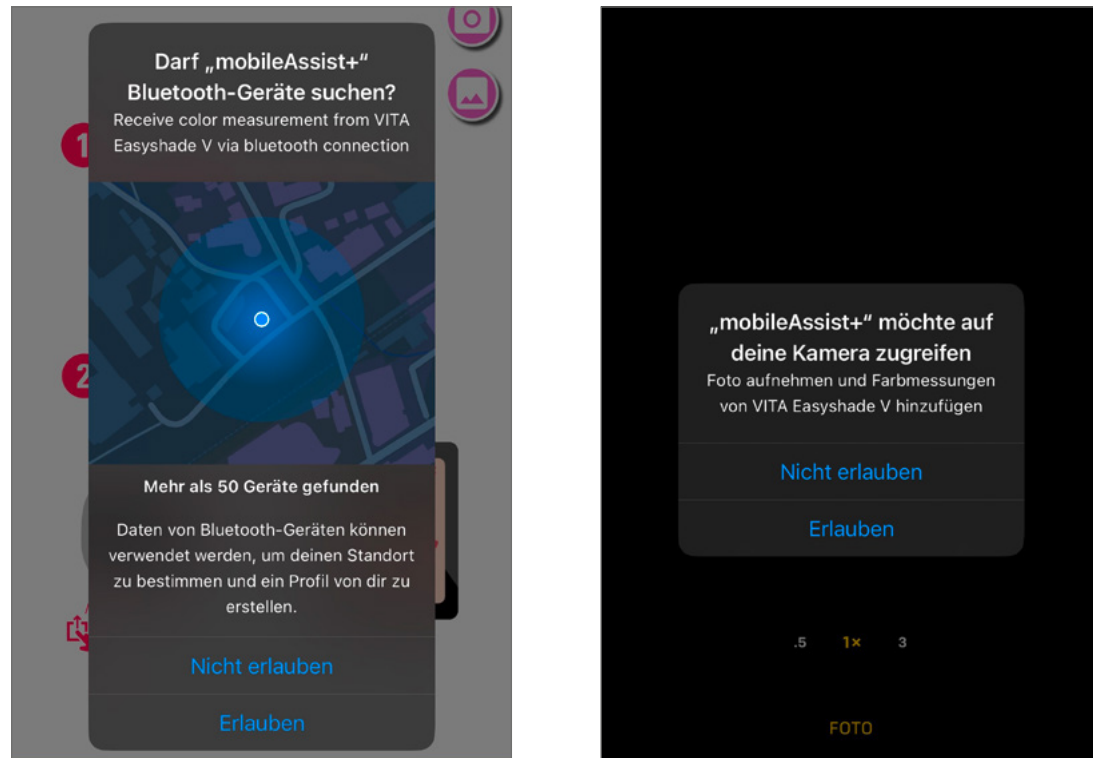


Abbildung 2: Berechtigungen für Bluetooth und Kamera erteilen

Hinweis

Falls Sie beim ersten Start oder bei der Nutzung der Kamera die Berechtigungen nicht erlaubt haben, können Sie sie später manuell in den Einstellungen aktivieren:

- Einstellungen ⇒ Apps ⇒ mobileAssist+ ⇒ Bluetooth aktivieren.
- Einstellungen ⇒ Apps ⇒ mobileAssist+ ⇒ Kamera aktivieren.

ODER

- Einstellungen ⇒ Datenschutz & Sicherheit ⇒ Bluetooth ⇒ mobileAssist+ aktivieren.
- Einstellungen ⇒ Datenschutz & Sicherheit ⇒ Kamera ⇒ mobileAssist+ aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth- und Kamera-Berechtigungen aktiviert sind. Ohne diese Berechtigungen kann die App nicht mit Ihrem VITA Easyshade V kommunizieren oder Bilder aufnehmen.

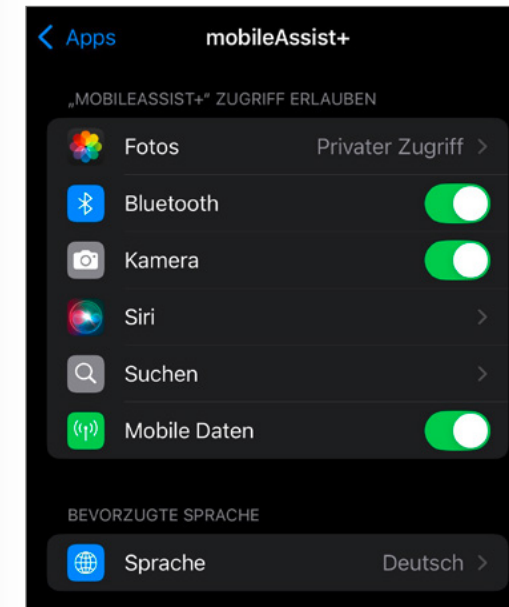


Abbildung 3: Manuelle Aktivierung

3. Bluetooth

3.1. Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren

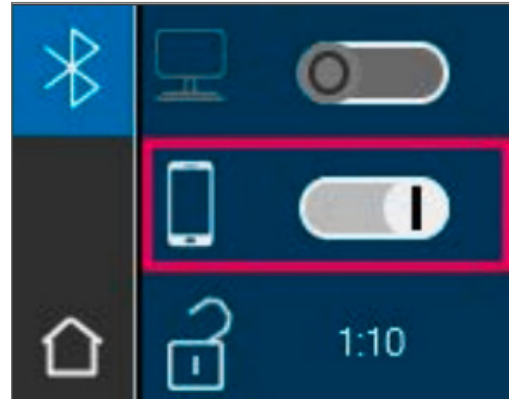


Abbildung 4: Bluetooth am VITA Easyshade V aktivieren

- Schalten Sie Ihr **VITA Easyshade V** ein.
- Gehen Sie in das Bluetooth-Menü des Geräts.
- Schieben Sie den mittleren Schieberegler nach rechts, um Bluetooth zu aktivieren.
- Das Vorhängeschloss-Symbol öffnet sich automatisch und das Gerät ist für 2 Minuten sichtbar.
- Falls das Vorhängeschloss-Symbol geschlossen bleibt, tippen Sie darauf, um das Gerät sichtbar zu machen.

3.2. Bluetooth auf dem iPhone aktivieren



Abbildung 5: Bluetooth auf dem iPhone aktivieren

- Öffnen Sie die Einstellungen Ihres iPhones.
- Gehen Sie zu Bluetooth und stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist.

4. Verbindung

4.1. VITA Easyshade V mit der App verbinden


- Starten Sie die VITA mobileAssist+ App.
- Tippen Sie unten auf die VITA Easyshade V Abbildung.
- Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus. ⇒ Die Seriennummer finden Sie auf der Unterseite der Ladestation.
- Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.



Abbildung 6: VITA Easyshade V mit der App verbinden

5. Messdaten übertragen

5.1. Messdaten übertragen

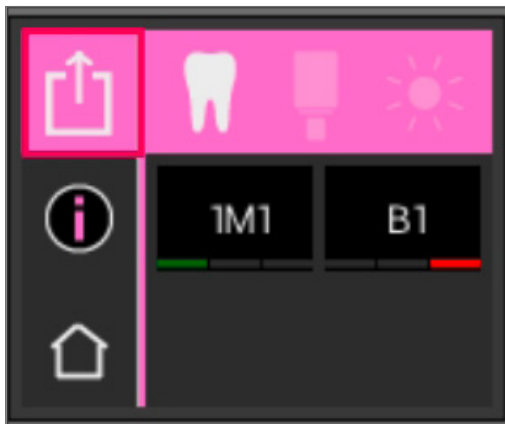

- Führen Sie eine Farbmessung durch oder tippen Sie auf das Messergebnis-Symbol
- Eine aktive Verbindung wird durch das Teilen-Symbol angezeigt.
- **Tippen Sie** auf das Teilen-Symbol um Messdaten zu übertragen

Abbildung 7: Messdaten übertragen

Hinweis

Falls ein zuvor mit dem VITA Easyshade V gekoppeltes iOS- oder Android-Gerät noch in Bluetooth-Reichweite ist, kann dies die Verbindung mit einem neuen Gerät beeinträchtigen.

iOS: Einstellungen ⇒ Bluetooth ⇒ VITA Easyshade in der Liste „Meine Geräte“ finden ⇒ (i)-Symbol antippen ⇒ „Dieses Gerät ignorieren“ wählen ⇒ Bluetooth kurz deaktivieren und wieder aktivieren ⇒ Erneute Kopplung mit neuem Gerät versuchen

Android: Einstellungen ⇒ Bluetooth ⇒ VITA Easyshade in der Liste „Gekoppelte Geräte“ finden ⇒ Gerät entfernen oder „Vergessen“ wählen ⇒ Bluetooth kurz deaktivieren und wieder aktivieren oder Gerät neu starten ⇒ Erneute Kopplung mit neuem Gerät versuchen

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

