

VITA

Guida Rapida all'uso



VITA Easyshade® V

Determinazione del colore ottimale.
Massima sicurezza.





Indice

1 Installare	
1.1 Installare l'app VITA mobileAssist+.....	4
2 Concedere	
2.1 Concedere le autorizzazioni	5
2.2 Concedere le autorizzazioni per posizione e Bluetooth	5
2.3 Concedere le autorizzazioni per la fotocamera.....	6
3 Bluetooth	
3.1 Attivare il Bluetooth sul VITA Easyshade V	8
3.2 Attivare il Bluetooth sul dispositivo iPhone	8
4 Connessioni	
4.1 Collegare il VITA Easyshade V all'app	9
5 Trasferire i dati misurati	
5.1 Trasferire i dati misurati	10

1. Installare

1.1 Installare l'app VITA mobileAssist+

- Aprire l'App Store sul dispositivo iPhone o iPad.
- Cercare „**VITA mobileAssist+**“.
- Scaricare e installare l'app.

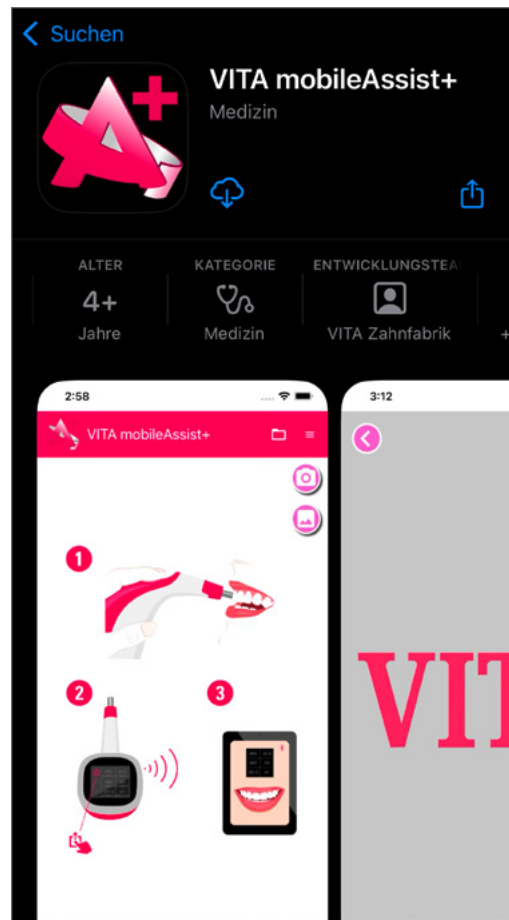


Figura 1: Installare l'app VITA mobileAssist+

2. Concedere

2.1. Concedere le autorizzazioni

Al primo avvio dell'app VITA mobileAssist+ viene chiesto di concedere alcune autorizzazioni di accesso che sono necessarie per consentire di riconoscere il dispositivo VITA Easyshade V via Bluetooth e utilizzare le immagini della fotocamera per le misurazioni del colore.

2.2. Concedere le autorizzazioni per il Bluetooth

- Solo al primo avvio dell'app viene visualizzata una finestra con cui si richiede:
„**Consentire la ricerca di dispositivi Bluetooth mobileAssist+?**“.
- Fare clic su „**Consenti**“ per fare in modo che l'app possa trovare il dispositivo **VITA Easyshade V** e connettersi via Bluetooth.

2. Concedere

2.3. Concedere le autorizzazioni per la fotocamera

- Quando viene selezionato il simbolo della fotocamera nell'app, viene visualizzata una finestra con la dicitura: „mobileAssist+ vorrebbe accedere alla fotocamera“.
- Fare clic su „Consenti“, in modo che l'app possa accedere alla fotocamera e scattare fotografie.

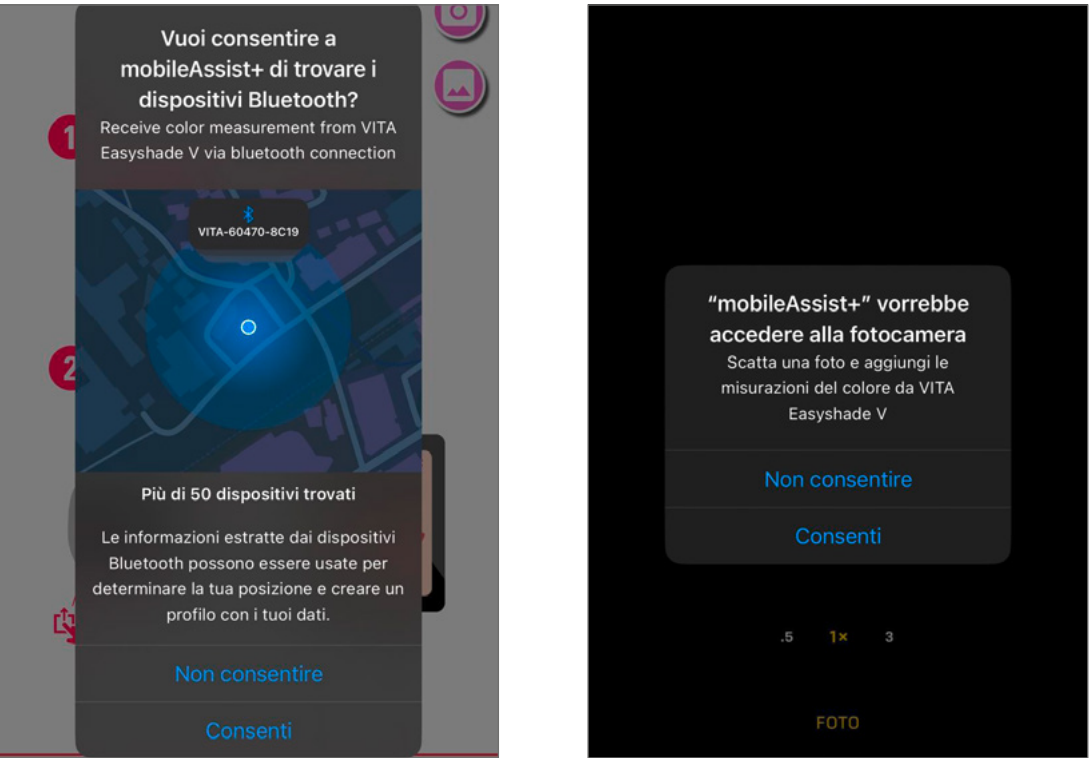


Figura 2: Concedere le autorizzazioni per Bluetooth, posizione e fotocamera

Avvertenza

Se al primo avvio o durante l'utilizzo della fotocamera non sono state concesse le autorizzazioni, è possibile attivarle manualmente in un secondo momento all'interno delle impostazioni:

- Impostazioni ⇒ App ⇒ mobileAssist+ ⇒ Attivare il Bluetooth.
- Impostazioni ⇒ App ⇒ mobileAssist+ ⇒ Attivare la fotocamera.

OPPURE

- Impostazioni ⇒ Privacy e sicurezza ⇒ Bluetooth ⇒ Attivare mobileAssist+.
- Impostazioni ⇒ Privacy e sicurezza ⇒ Fotocamera ⇒ Attivare mobileAssist+.

Verificare che le autorizzazioni di Bluetooth e fotocamera siano attivate.
Senza queste autorizzazioni, l'app non potrà comunicare con il VITA Easyshade V o acquisire immagini.

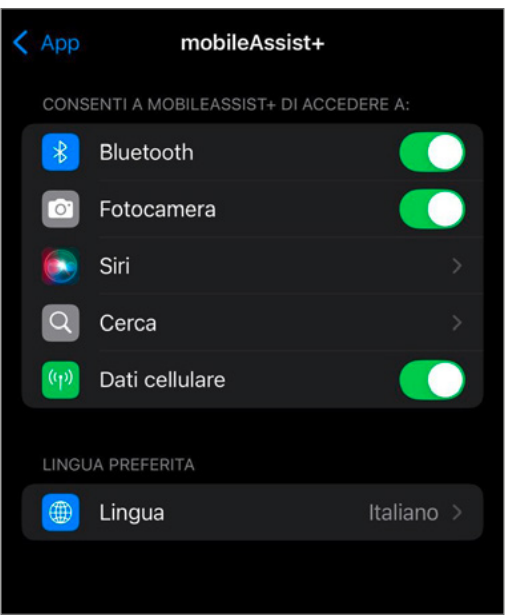


Figura 3: Attivazione manuale

3. Bluetooth

3.1. Attivare il Bluetooth sul VITA Easyshade V

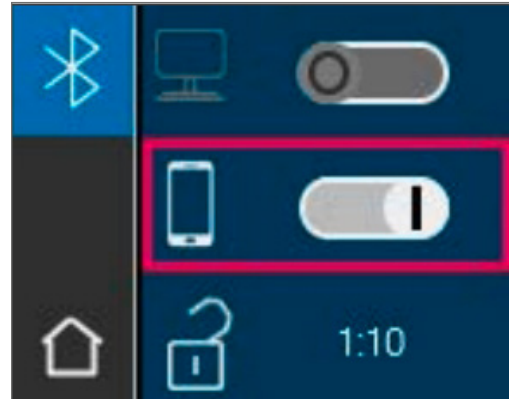


Figura 4: Attivare il Bluetooth sul VITA Easyshade V

- Attivare il **VITA Easyshade V**.
- Accedere al menu del Bluetooth del dispositivo.
- Spostare il cursore centrale verso destra per attivare il Bluetooth.
- Il simbolo del lucchetto si apre automaticamente e il dispositivo diventa visibile per 2 minuti.
- Nel caso in cui il simbolo del lucchetto resti chiuso, fare clic su di esso per rendere visibile il dispositivo.

3.2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo iPhone



Figura 5: Attivare il Bluetooth sul dispositivo iPhone

- Aprire le impostazioni del dispositivo iPhone.
- Accedere al Bluetooth e verificare che sia attivato.

4. Connessioni

4.1. Collegare il VITA Easyshade V all'app

- Avviare l'app VITA mobileAssist+.
- Fare clic sull'immagine del VITA Easyshade V nella parte inferiore.
- Selezionare il dispositivo dall'elenco. ⇒ Il numero di serie si trova sul lato inferiore della stazione di ricarica.
- Attendere fino a che la connessione non sarà stabilita.


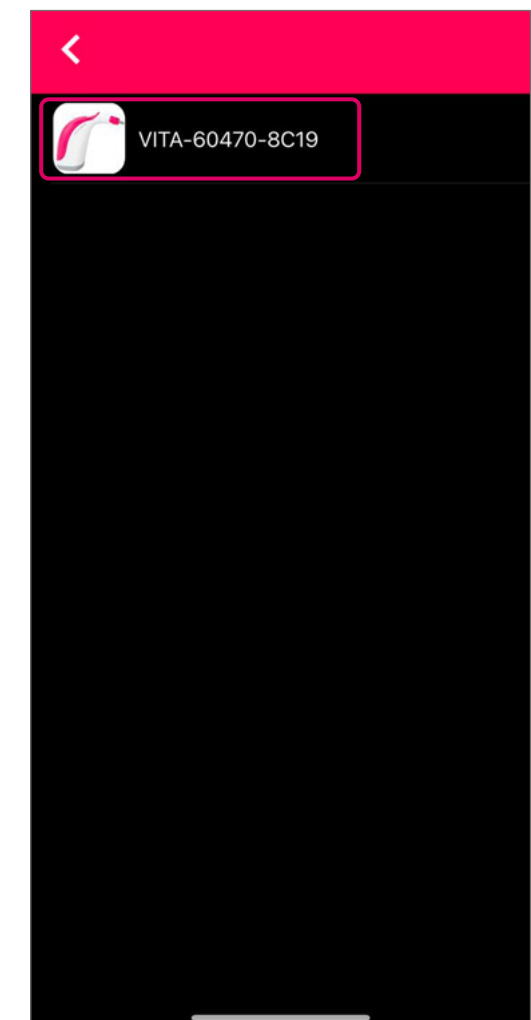


Figura 6: Collegare il VITA Easyshade V all'app

5. Trasferire i dati misurati

5.1. Trasferire i dati misurati

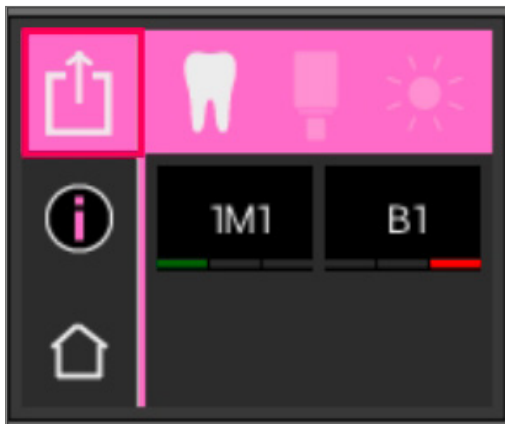

- Eseguire una misurazione del colore o fare clic sul simbolo del risultato della misurazione.
- Una connessione attiva viene visualizzata dal simbolo di condivisione.
- **Fare clic** sul simbolo di condivisione per trasferire i dati misurati

Figura 7: Trasferire i dati misurati

Avvertenza

Se un dispositivo iOS o Android precedentemente associato al VITA Easyshade V si trova ancora all'interno della portata del Bluetooth, ciò può influenzare la connessione al nuovo dispositivo.

iOS: Impostazioni ⇒ Bluetooth ⇒ Trovare il VITA Easyshade nell'elenco „I miei dispositivi” ⇒ Fare clic sul simbolo (i) ⇒ Selezionare „Ignora questo dispositivo” ⇒ Disattivare brevemente e riattivare il Bluetooth ⇒ Provare ad associare il nuovo dispositivo

Android: Impostazioni ⇒ Bluetooth ⇒ Trovare il VITA Easyshade nell'elenco „Dispositivi associati” ⇒ Rimuovere il dispositivo o selezionare „Dimentica” ⇒ Disattivare brevemente e riattivare il Bluetooth o riavviare il dispositivo ⇒ Provare ad associare il nuovo dispositivo

