

Prótesis Digitales: **El siguiente nivel**



VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Confeccione prótesis parciales flexibles de forma rápida y optimizando los costes mediante impresión 3D para el uso provisional.





Prótesis digital

VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

Material de impresión 3D para la confección de bases de prótesis flexibles

Hoy en día, la prostodoncia digital ofrece algo más que prótesis completas: con VITA VIONIC BASE RESIN FLEX es posible confeccionar prótesis parciales flexibles para uso provisional, con precisión, eficiencia y comodidad. Haga que su día a día en el laboratorio sea más sencillo. Confeccione restauraciones rentables de manera rápida y fiable. El proceso de confección digital posibilita un flujo de trabajo eficiente y permite crear varias prótesis parciales en un ciclo de impresión de manera reproducible. El material flexible proporciona una elevada comodidad de uso y satisface el deseo de muchos y muchas pacientes de llevar restauraciones sin metal. Las variantes de color transparentes dejan traslucir el color personal de la encía, contribuyendo así a una estética natural. Constituye asimismo una ventaja que las prótesis con ganchos impresas se pueden reparar y ampliar. Además, son mucho más fáciles de pulir en comparación con las prótesis creadas mediante métodos de inyección convencionales.

Beneficiarse de los materiales perfectamente armonizados entre sí con la calidad acostumbrada de VITA. Confíe en flujos de trabajo seguros, combinados con un gran número de impresoras y unidades de poscurado validadas.



[Ir a la lista de validaciones](#)



Rentable

Confección eficiente de prótesis parciales flexibles para uso provisional con ahorro de material y de costes, con calidad reproducible y un considerable ahorro de tiempo.

Cómodo

Material flexible sin metal, con estética natural y elevada comodidad de uso. La coloración transparente deja traslucir el color personal de la encía, y la prótesis se puede reparar y ampliar.

Fácil

Flujos de trabajo seguros gracias a la unión adhesiva química entre la base y los dientes, a la facilidad de fresado y al pulido de alto brillo.



// Con VITA VIONIC BASE RESIN FLEX puedo diseñar y confeccionar prótesis parciales de manera más rápida, precisa y económica. Los pacientes estarán encantados con la comodidad y la estética natural, sin ganchos metálicos y sin renuncias. Una innovación que beneficia a todas las partes.

Darius Northey
All Smiles Denture Clinic (Australia)

Combinación inteligente.

Economy Level

Flujo de trabajo para la impresión 3D eficiente

1) Impresión de la base de prótesis y de los dientes
2) Lavado
3) Comprobación del ajuste
4) Fijación mediante resina
5) Fraguado
6) Pulido

Ventaja para usted: restauraciones impresas de calidad sólida, confeccionadas de forma ágil y rentable.



Smart Level

Flujo de trabajo para la combinación con dientes fresados

1) Impresión, lavado y fraguado de la base de prótesis
2) Fresado y separación de los dientes
3) Comprobación del ajuste
4) Acondicionamiento previo mediante PRIMER
5) Fijación mediante resina
6) Fraguado
7) Pulido

Ventaja para usted: transición cromática integrada y pulido sencillo de los dientes para una mejor estética.



Comparación de los procesos de confección

Criterio de valoración	Diseño digital	Ajuste	Material homogéneo	Reparable y ampliable	Tenacidad de rotura Flexibilidad	Facilidad de pulido/ Alto brillo	Tiempo de producción	Envío	Costes
Impresión con VITA VIONIC BASE RESIN FLEX	✓ Sí Basado en CAD/CAM	✓ Bueno	✓ Sí Tras agitar bien	✓ Sí	●●○	●●○ Buena facilidad de pulido	●●● El proceso más rápido	●●●● Seco y estable	€ Bajos
Fresado	✓ Sí Basado en CAD/CAM	✓ Muy bueno	✓ Sí	✗ No	●○○	●●●● Muy buena facilidad de pulido	●●○ Moderado	●●●● Seco y estable	€€€ Altos
Inyección convencional	✗ No Manual	✗ Limitado	✗ No	✗ No	●●●	●○○ Pulido trabajoso	●○○ Requiere mucho tiempo	●○○ En agua	€€ Medios




Soluciones óptimas en el proceso.



1. Proceso CAD

En el módulo para prótesis completas mediante la base de datos de dientes protésicos VITA VIONIC DIGITAL VIGO o en el módulo de prótesis parciales

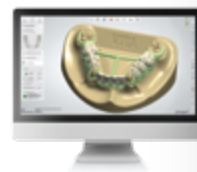

2. Confección de la base de prótesis

VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



3. Impresión o fresado de los dientes protésicos

VITA VIONIC DENT RESIN o
VITA VIONIC DENT DISC multiColor



4. Fijación

VITA VIONIC BASE RESIN FLEX



Consulte otras
soluciones de flujo
de trabajo aquí



5. Personalización

VITA AKZENT LC, VITA VM LC *flow*



Estamos a su disposición para ayudarle

Línea directa de apoyo a las ventas

Tel.: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA North America

EE. UU.: +1 800-828-3839
Asistencia técnica EE. UU.: +1 888-249-1640
info@vitanorthamerica.com

Línea directa de asistencia técnica

Tel.: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
De 8:00 a 17:00 h CET
info@vita-zahnfabrik.com

Línea de atención al cliente de VITA Canada

Canadá: +1 800-263-4778
Asistencia técnica Canadá:
+1 800-324-6224



Nota importante

Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el procesamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La VITA Modulbox no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de este folleto de producto: 01.26

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0124: VITA VIONIC® DENT DISC multiColor,
VITA AKZENT® LC und VITAVM® LC *flow*

detax GmbH está certificada según el Reglamento de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado

CE 0483: VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX,
VITA VIONIC® DENT RESIN

Los productos/sistemas de otros fabricantes mencionados en este documento son marcas registradas de sus respectivos fabricantes.



Para más información sobre VITA VIONIC BASE RESIN FLEX,
simplemente escanee el código QR
<https://hs.vita-zahnfabrik.com/es/vita-vionic-base-resin-flex>



VITA VIONIC® BASE RESIN FLEX

 **VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG**

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222

info@vita-zahnfabrik.com
www.vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!

