

Control de un solo horno

Imagen	Hornos	Número de serie	 VITA vPad excellence N.º de serie > 2820170051 VITA vPad PRO N.º de serie > 3720250049	 VITA vPad comfort N.º de serie > 3020180051 VITA vPad LITE N.º de serie > 3620250049
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conecte el cable inyector de alimentación del vPad (D63100) al VITA vPad excellence y a la toma de red superior del horno.	✓ Conecte el cable inyector de alimentación del vPad (D63100) al VITA vPad comfort y a la toma de red superior del horno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la toma de red inferior del horno.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la toma de red inferior del horno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✓	✓ Solo posible con VITA vPad LITE
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049		

Control de varios hornos

(Sin combinar aparatos con año de fabricación anterior y posterior a 2017)

Imagen	Hornos	Número de serie	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I. Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno. Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red superior del horno. Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I. Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno. Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red inferior del horno.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049				
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

* El aparato del puerto 1 debe estar siempre encendido.


VITA vPad excellence
N.º de serie > 2820170051
VITA vPad PRO
N.º de serie > 3720250049


VITA vPad comfort
N.º de serie > 3020180051
VITA vPad LITE
N.º de serie > 3620250049

Control multihorno mixto

(Combinando aparatos con año de fabricación anterior y posterior a 2017)



VITA vPad excellence
N.º de serie < 2820170051



VITA vPad comfort
N.º de serie < 3020180051



VITA vPad excellence
N.º de serie > 2820170051
VITA vPad PRO
N.º de serie > 3720250049



VITA vPad comfort
N.º de serie > 3020180051
VITA vPad LITE
N.º de serie > 3620250049

Imagen	Hornos	Número de serie	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la VITA SWITCHBOX II.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la VITA SWITCHBOX I.	✓ Conecte el VITA vPad comfort a la VITA SWITCHBOX II.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX I. Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno.	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗	
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400									
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno.	Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red superior del horno.	Conecte la VITA SWITCHBOX I a la toma de red superior del horno.	Conecte la VITA SWITCHBOX II a la toma de red superior del horno.	Conecte el cable inyector de alimentación (D63100) a la VITA SWITCHBOX I.	Conecte la toma de red inferior del horno al puerto 1 de la VITA SWITCHBOX II.			
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx))	> 1320178854 > 1820172401									
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗	
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400									
VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987										
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049									
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049									
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗	
	+	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)						> 272022xxxx			Conecte la toma de red inferior del horno al puerto 1 de la VITA SWITCHBOX II.
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conecte el VITA vPad excellence a la VITA SWITCHBOX II. Conecte la toma de red superior del horno a los puertos 2-4 de la VITA SWITCHBOX II.	✗	✗	
	+	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)						> 3420240049			Conecte la toma de red inferior del horno al puerto 1 de la VITA SWITCHBOX II.

* El aparato del puerto 1 debe estar siempre encendido.