

Controle simples de fornos

Imagem	Fornos	Número de série	 VITA vPad excellence Número de série > 2820170051 VITA vPad PRO Número de série > 3720250049	 VITA vPad comfort Número de série > 3020180051 VITA vPad LITE Número de série > 3620250049
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conectar o cabo injetor PoE do vPad-(D63100) no VITA vPad excellence e na entrada de rede superior do forno.	✓ Conectar o cabo injetor PoE do vPad-(D63100) no VITA vPad comfort e na entrada de rede superior do forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400		
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987		

	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conectar o VITA vPad excellence na entrada de rede inferior do forno.	✓ Conectar o VITA vPad comfort na entrada de rede inferior do forno.
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✓	✓
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049		
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx	✓	✓ Apenas possível com o VITA vPad LITE
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049		

Controle múltiplo de fornos

(Aparelhos construídos antes de 2017 e depois de 2017 não são misturados)

Imagem	Fornos	Número de série	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)	 VITA SWITCHBOX I (D47009)	 VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX I. Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno. Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX I.	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno. Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400				
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno. Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX I.	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede inferior do forno.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	> 1320178854	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	> 1820172401				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049				
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049	✗	✓	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx				
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049				

Aparelho na porta 1 deve estar sempre ligado.

Controle de múltiplos fornos

(Aparelhos construídos antes e depois de 2017)



VITA vPad excellence
Número de série < 2820170051



VITA vPad comfort
Número de série < 3020180051



VITA vPad excellence
Número de série > 2820170051
VITA vPad PRO
Número de série > 3720250049



VITA vPad comfort
Número de série > 3020180051
VITA vPad LITE
Número de série > 3620250049

Imagem	Fornos	Número de série	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)	VITA SWITCHBOX I (D47009)	VITA SWITCHBOX II* (D65000)
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX I.	✓ Conectar VITA vPad comfort no VITA SWITCHBOX II.	✓ Conectar VITA vPad comfort no VITA SWITCHBOX I.	✓ Conectar VITA vPad comfort no VITA SWITCHBOX II.	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX I. Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar a entrada de rede superior do forno às portas 2-4 do VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987								
	VITA VACUMAT 6000 M/MP (DV6000Mxxx/DV6000MPxxx)	> 1320178854 > 1820172401	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX I na entrada de rede superior do forno.	Conectar o VITA SWITCHBOX II na entrada de rede superior do forno.	Conectar o cabo injetor PoE (D63100) no VITA SWITCHBOX I.	Conectar a entrada de rede inferior do forno com a porta 1 do VITA SWITCHBOX II.		
	VITA VACUMAT 6000 M (DV6000Mxxx)	< 1320178853	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar a entrada de rede superior do forno às portas 2-4 do VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA VACUMAT 6000 MP (DV6000MPxxx)	< 1820172400								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	< 2120170987								
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY61000MSxxx)	> 3120190049						Conectar à porta 1 do VITA SWITCHBOX II.		
	VITA VACUMAT 6100 M (DV6100Mxxx)	> 3520240049								
	VITA ZYRCOMAT 6000 MS (DZY6000MSxxx)	< 2120170987	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar a entrada de rede superior do forno às portas 2-4 do VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE (DSFxxx)	> 272022xxxx						Conectar a entrada de rede inferior do forno com a porta 1 do VITA SWITCHBOX II.		
	VITA ZYRCOMAT 6100 MS (DZY6100MSxxx)	> 3120190049	✗	✗	✗	✗	✗	✓ Conectar VITA vPad excellence no VITA SWITCHBOX II. Conectar a entrada de rede superior do forno às portas 2-4 do VITA SWITCHBOX II.	✗	✗
	VITA SMART.FIRE ADVANCED (DSFAxxx)	> 3420240049						Conectar a entrada de rede inferior do forno com a porta 1 do VITA SWITCHBOX II.		

* Aparelho na porta 1 deve estar smpre ligado.