

VITA

Easy Transformation.  
**Make it UNIQUE.**



## VITA LUMEX® UNIQUE

La céramique liquide pour une caractérisation 3D simple et une micro-stratification ultrafine. Rend le monolithique unique.





Céramique liquide

# VITA LUMEX® UNIQUE

Une céramique liquide. Des possibilités uniques.

VITA LUMEX UNIQUE apporte la touche finale aux restaurations monolithiques : simple, rapide et efficace. Le système innovant de céramique liquide se compose de pâtes fluorescentes prêtes à l'emploi et permet d'obtenir une esthétique unique offrant un effet de profondeur tridimensionnel.

Les restaurations monolithiques sont ainsi portées à un niveau inédit, avec un résultat immédiatement visible : la forme, la couleur et les effets restent stables avant et après la cuisson. La faible température de cuisson préserve les caractéristiques de surface conçues, ce qui permet d'obtenir des résultats fiables et esthétiques même avec une seule cuisson.

Qu'il s'agisse d'une caractérisation 3D efficace ou d'une micro-stratification ultrafine sur dioxyde de zirconium, disilicate de lithium ou céramique feldspathique, VITA LUMEX UNIQUE offre une esthétique optimale en un minimum d'efforts. Le résultat : un rendu chromatique fascinant, des textures impressionnantes et une brillance de surface naturelle. Le tout grâce à un seul et même système qui rend les restaurations monolithiques uniques.

## Manipulation facile

La forme, la couleur et les effets sont visibles dès l'application des pâtes et restent inchangés après la cuisson. Pour des résultats fiables.

## Une esthétique unique


Les restaurations monolithiques obtiennent une esthétique fascinante, un effet de profondeur tridimensionnel et une brillance naturelle.

## Flexibilité énorme

Des nuances de couleurs fines, des structures détaillées et des détails en filigrane peuvent être réalisés avec précision, grâce à une manipulation flexible des consistances. Idéale pour la caractérisation 3D et la micro-stratification ultrafine.



**Esthétique rose**  
Reproduction fidèle de la gencive.

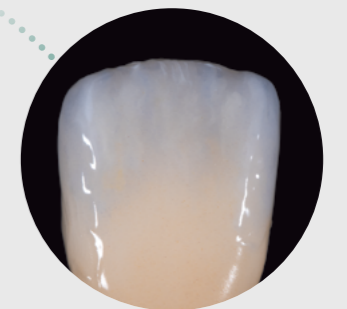

**Caractérisation 3D**  
Effet de profondeur et brillance naturelle sans cut-back.



**Micro-stratification ultrafine**  
Avec une épaisseur de couche de seulement 0,1 - 0,2 mm sans cut-back traditionnel.



## Technique mixte

Du cut-back traditionnel à la stratification complète avec VITA LUMEX AC et VITA LUMEX UNIQUE.

# Une esthétique unique.

## Des espaces de conception créatifs pour une esthétique impressionnante


Les effets naturels tels que la translucidité incisale, les effets de halo, les mamelons, les fissures d'émail et autres peuvent être reproduits rapidement et facilement avec les masses fluorescentes EFFECT PASTE.

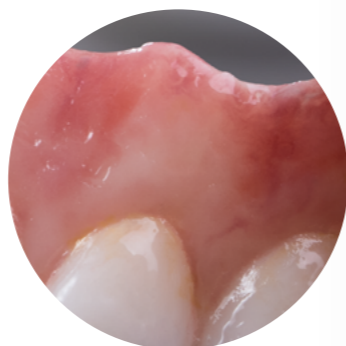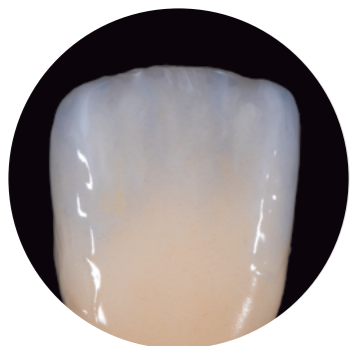

Il est possible d'augmenter ou de diminuer la luminosité et de procéder à des ajustements systématiques de couleur dans les deux standards de couleur VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER.



Valeur inférieure

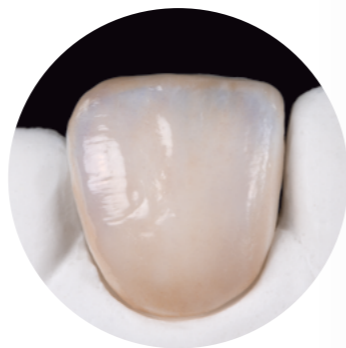

Valeur supérieure

## Correction simple des couleurs

Les masses CHROMA PASTE permettent de réussir facilement l'adaptation chromatique dans les groupes de couleurs correspondants. Que ce soit pour corriger la couleur de la dent ou pour l'adapter aux standards de couleur VITA classical A1-D4 et VITA SYSTEM 3D-MASTER, les masses CHROMA PASTE permettent de réussir facilement l'adaptation chromatique.



## Une température de cuisson pour tous les types de pâte

### Une température de cuisson uniforme pour toutes les pâtes

Cela réduit les sources d'erreurs potentielles et simplifie le flux de travail. Pour un traitement rapide et sûr, et un taux de réussite maximal dans le quotidien du laboratoire.



### Stabilité des couleurs – même après plusieurs cuissons


Cela garantit des résultats fiables sans variations de couleur et réduit les corrections fastidieuses.



# Manipulation facile. Flexibilité énorme.

## Visibilité immédiate des effets

La texture et la couleur restent stables aussi bien pendant le modelage qu'après la cuisson, ce qui réduit considérablement les efforts.

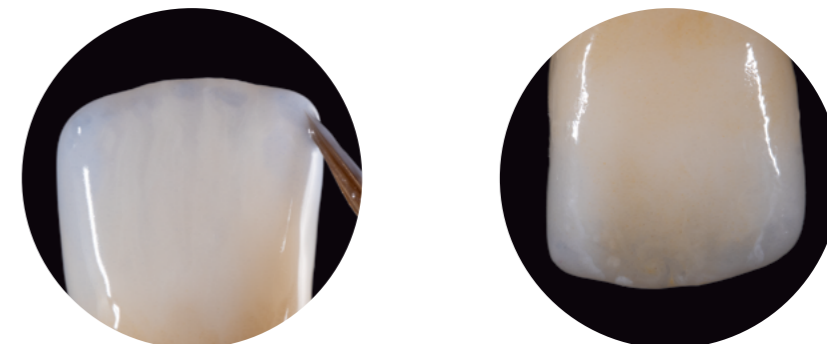

## Prêtes à l'usage

### Des possibilités quasiment illimitées pour de multiples techniques d'application.

La caractérisation tridimensionnelle grâce à des pâtes prêtes à l'emploi composées de particules céramiques finement ajustées, ainsi que des micro-stratifications ultra-fines offrant des textures riches en détails peuvent être réalisées de manière précise et rapide, avec un effet impressionnant.

### Consistance optimale pour une application rapide et efficace.

Les masses peuvent être appliquées avec la technique « Wet-on-Wet » (humide sur humide), sans que les couleurs ne se mélangent. Toutes les masses peuvent être diluées avec LIQUID - pour des techniques d'application flexibles et pratiques. Le LIQUID peut en outre être aspiré afin d'en solidifier la consistance. Cela facilite aussi bien le modelage plastique sur de grandes surfaces que le modelage plastique finement dosé.



# Esthétique rose – Caractérisation 3D.

# Présentation de la gamme.

## Vue d'ensemble du flux de travail

Flux de travail	Degré de difficulté	Recommandation d'utilisation	
Flux de travail BASIC GINGIVA	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Caractérisation gingivale	
Micro-stratification ultrafine – Flux de travail CREATIVE GINGIVA : TEXTURE PASTE après flux de travail BASIC	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○	Effet de profondeur supplémentaire (en 2 cuissons*)	
Micro-stratification ultrafine – Flux de travail CREATIVE GINGIVA : TEXTURE PASTE comme point de départ	● ● ● ○ ○ ○ ○ ○	Pour une combinaison rapide et personnalisée des couleurs et de la structure (One-bake*)	

\*Le nombre de cuissons ne représente qu'une valeur indicative.



Accéder aux tutoriels

VITA LUMEX® UNIQUE	Description	Kits STANDARD		Facultatif :	
		classical	3D-MASTER		
LUMIN TRANSLUCENT EFFECT PASTE	○ crystal-white	✓	✓		
MAMELON EFFECT PASTE	● saffron	✓	✓		
	● honey-melon			✓	
TRANSLUCENT EFFECT PASTE	● midnight	✓	✓		
	● deep-blue	✓	✓		
	● foggy-grey	✓	✓		
	● copper	✓	✓		
	● lilac			✓	
	● khaki		✓	✓	
	● lemon			✓	
	● deep-red			✓	
	HIGHLIGHTING EFFECT PASTE	○ white	✓	✓	
		● brown	✓	✓	
● black				✓	
CHROMA PASTE VITA System classical A1-D4®	● red-brown (A)	✓			
	● red-sun (B)	✓			
	● grey-brown (C)	✓			
	● grey-red (D)	✓			
CHROMA PASTE VITA System 3D-MASTER®	● corn-yellow (L)		✓		
	● red-yellow (M)		✓		
	● light-red (R)		✓		
	● pale-papilla	✓	✓		
EFFECT PASTE GINGIVA	● light-rose	✓	✓		
	● deep-pink	✓	✓		
	● nectarine			✓	
	● deep-purple			✓	
	○ ENAMEL light			✓	
	● opal-sky			✓	
	● misty-rose			✓	
TEXTURE PASTE	○ clear	✓	✓		
	● light-pink			✓	
TEXTURE PASTE GINGIVA	● pink	✓	✓	✓	
	● POWER FLUO-GLAZE PASTE			✓	
GLAZE	● FLUO-GLAZE PASTE	✓	✓		
	● GLAZE PASTE	✓	✓		
	● GLAZE POWDER			✓	
LIQUID	15 ml	✓	✓		
	50 ml			✓	

Produits VITA LUMEX® AC	Description/couleur	Kits STANDARD	
		classical	3D-MASTER
CORRECTIVE	neutral	✓	✓
ENAMEL	clear	✓	✓
MODELLING LIQUID	MODELLING LIQUID	✓	✓



VITA LUMEX® UNIQUE STANDARD KIT pour VITA classical A1-D4® (n° d'art. BLUSKC), voir illustration à gauche. Également disponible en VITA SYSTEM 3D-MASTER® KIT (n° d'art. BLUSK3D)

Vous trouverez de plus amples informations ici



# Glaçure pour une finition naturelle.

## La finition parfaite

Bien que la glaçure puisse présenter une surface plus lisse lorsqu'elle est appliquée à l'état humide, la texture monolithique conçue numériquement réapparaîtra clairement après la cuisson et confèrera à la surface un fini naturel, soyeux et brillant. La FLUO-GLAZE PASTE assure une finition naturelle qui impressionne aussi bien à la lumière du jour que sous la lumière noire des UV à 365 nm. Pour les zones non fluorescentes (par exemple, la zone muco-gingivale), il est possible d'utiliser une pâte de glaçure GLAZE PASTE non fluorescente afin d'obtenir un aspect gingival rose naturel.



sans glaçure



avec glaçure

## VITA LUMEX® UNIQUE POWER FLUO-GLAZE

### La nouvelle génération de fluorescence naturelle


Cette glaçure produit **une fluorescence** entièrement naturelle à 365 nm et 395 nm.

Elle met en évidence les différences entre les lampes UV classiques et les lampes à lumière noire LED modernes.

#### Le résultat particulier :


Une esthétique stable et naturelle, quelle que soit la source lumineuse.

**Une solution complète et naturelle**  
– parée pour l'avenir – VITA PERFECT MATCH.

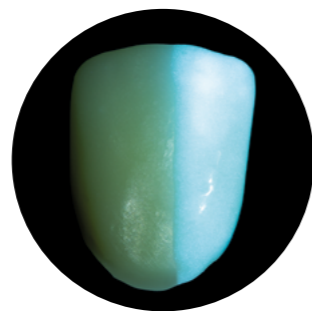

POWER FLUO-GLAZE PASTE

Réaction sous une lumière UV à 365 nm

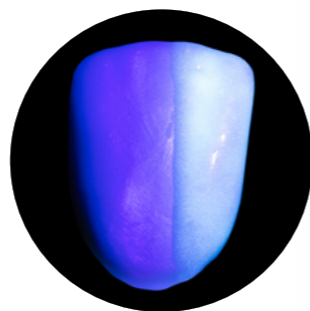

POWER FLUO-GLAZE PASTE

Réaction sous une lumière UV LED à 395 nm







Conseils vidéo sur l'application  
de GLAZE PASTE








# Domaines d'application : pâtes céramiques liquides.

## Présentation des masses VITA LUMEX® UNIQUE

### Pâtes Color

 <p><b>LUMIN TRANSLUCENT EFFECT</b></p>	<p>Augmentation de la valeur de luminosité ou mise en évidence des crêtes et zones de bosses.*</p> <p>○ crystal-white</p>	 <p><b>MAMELON EFFECT</b></p>	<p>Pour imiter les mamelons naturels et l'effet de halo dans la zone incisale.*</p> <p>● saffron ● honey-melon</p>	 <p><b>TRANSLUCENT EFFECT</b></p>	<p>Pour créer des effets translucides naturels, une plus grande profondeur et pour réduire la valeur de luminosité.*</p> <p>● deep-blue ● foggy-grey ● midnight ● lilac</p>
 <p><b>TRANSLUCENT EFFECT</b></p>	<p>Pour imiter les fissures et les défauts d'émail foncés, les décolorations incisales et les zones proximales foncées.*</p> <p>● copper</p>	 <p><b>TRANSLUCENT EFFECT</b></p>	<p>Pour le mélange et les effets dans les zones dentaires et gingivales.*</p> <p>● lemon ● deep-red</p>	 <p><b>TRANSLUCENT EFFECT</b></p>	<p>Pour imiter les défauts foncés de l'émail, les fissures, les colorations dues à la nicotine ainsi que les colorations dans la zone cervicale et sur les bords incisifs. Pour intensifier les zones proximales et neutraliser les couleurs de dents rougeâtres.*</p> <p>● khaki</p>




### Pâtes EFFECT et CHROMA

 <p><b>HIGHLIGHTING EFFECT</b></p>	<p>Pour imiter les pointes de cuspidales crayeuses, les fissures de l'émail, les taches de calcium, l'accentuation des cuspidales et des crêtes. Pour augmenter la valeur de luminosité.*</p> <p>○ white</p>	 <p><b>HIGHLIGHTING EFFECT</b></p>	<p>Pour réduire la valeur de luminosité, imiter une translucidité intense et assombrir d'autres couleurs.*</p> <p>● black</p>	 <p><b>HIGHLIGHTING EFFECT</b></p>	<p>Pour imiter les fissures et les défauts d'émail foncés, les décolorations incisales et les zones proximales foncées.*</p> <p>● brown</p>
 <p><b>Teintes VITA classical A1-D4</b></p> <p><b>VITA SYSTEM 3D-MASTER Couleurs CHROMA</b></p>	<p>Pour un ajustement simple de la chromaticité ou pour une adaptation à la couleur naturelle des dents.*</p> <p>● red-brown (A) ● red-sun (B) ● grey-brown (C) ● grey-red (D) ● corn-yellow (L) ● red-yellow (M) ● light-red (R)</p>	 <p><b>EFFECT GINGIVA</b></p>	<p>Pour imiter les effets naturels de la gencive. Conseil : ces teintes peuvent également être utilisées pour créer des effets minimes au niveau des dents.*</p> <p>● pale-papilla** ● light-rose** ● nectarine** ● deep-pink** ● deep-purple**</p>		

\* Exemples et propositions à titre indicatif. L'application des pâtes se fait selon leur destination et l'effet souhaité.

\*\*non fluorescent

### Pâtes TEXTURE et GLAÇURE

 <p><b>HIGHLIGHTING EFFECT</b></p>	<p>Micro-stratification ultrafine : pour de légères modifications de forme et de structure (environ 0,1 à 0,2 mm), pour masquer la couleur et texturer les zones gingivales.*</p> <p>● light-pink** ● pink** ● clear ● misty-rose</p>	 <p><b>TEXTURE</b></p>	<p>Les petites modifications de la forme et de la structure ainsi que l'ajout de points de contact sont possibles. Micro-stratification ultrafine (d'environ 0,1 à 0,2 mm) pour renforcer l'effet de profondeur.*</p> <p>○ ENAMEL light ● clear** ● opal-sky** ● misty-rose**</p>	 <p><b>GLAZE PASTE</b></p> <p>● POWER FLUO-GLAZE</p> <p><b>GLAZE POWDER</b></p> <p>● FLUO-GLAZE ● GLAZE** ● GLAZE**</p>	<p>Pour la stratification des zones dentaires et gingivales. Peut aussi être mélangé.*</p>
---	---	---	---	--	--



# Des solutions adaptées en cours de processus.

## Détermination de la couleur

VITA Easyshade V/VITA Easyshade LITE ou teintiers VITA



## Réalisation d'armature

en dioxyde de zirconium VITA YZ, céramique feldspathique VITABLOCS ou en céramique dopée au dioxyde de zirconium VITA AMBRIA



## Stratification

VITA LUMEX AC



## Caractérisation 3D et micro-stratification ultrafine

Céramique liquide VITA LUMEX UNIQUE



## Protocole de cuisson

VITA VACUMAT 6100 M  
VITA SMART.FIRE ADVANCED



## Polissage

Kits de polissage VITA CERAMICS et pâte de polissage VITA Polish Cera



# Nous sommes à votre disposition pour toute aide complémentaire.

## Assistance téléphonique et support

Téléphone +49 7761 562-884  
Fax +49 7761 562-299  
8 h - 17 h (HEC)  
info@vita-zahnfabrik.com

## Ligne d'assistance technique

Téléphone +49 7761 562-222  
Fax +49 7761 562-446  
8 h - 17 h (HEC)  
info@vita-zahnfabrik.com

## Assistance téléphonique technique VITA Amérique du Nord

États-Unis : +1 800-828-3839  
Assistance technique États-Unis :  
+1 888-249-1640  
info@vitanorthamerica.com

## Assistance téléphonique VITA Canada

Canada : +1 800-263-4778  
Assistance technique Canada :  
+1 800-324-6224

### N.B.

Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage.

Publication de cette brochure produit : 2026-05

Cette nouvelle édition de la brochure du produit rend caduques toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants

portent le marquage **CE 0124** :  
**VITA LUMEX® UNIQUE · VITA LUMEX® AC**

Les produits/systèmes d'autres fabricants cités dans ce document sont des marques déposées des fabricants respectifs.

Rx uniquement  

### Références

**Recherches internes, VITA R&D :**  
VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Département de recherche et développement  
Spitalgasse 3, 79713 Bad Säckingen, Allemagne

**Informations complémentaires :**  
**10887 VITA LUMEX UNIQUE – Céramiques cosmétiques homologuées, voir VITA LUMEX® UNIQUE**  
Téléchargement via [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



Pour de plus amples informations sur VITA AKZENT UNIQUE, scannez le code QR.

[http://www.vita-zahnfabrik.com/lumex\\_unique](http://www.vita-zahnfabrik.com/lumex_unique)



## VITA LUMEX® UNIQUE

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

Phone: +49 7761 562-0  
Hotline: +49 7761 562-222

[info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

Follow us on  
Social Media!

