

# VITA YZ® – Parámetros de sinterización importantes

VITA YZ® T, HT, ST, XT											
Nombre del programa	%	T0 °C	min.	°C/min.	T1 °C	min.	°C/min.	T2 °C	min.	°C	%
YZ One for all	100	25	51:28	17	900	137:30	4	1450	120:00	200	100

VITA YZ® ST								
Nombre del programa	%	T0 °C	min.	°C/min.	T1 °C	min.	°C	%
YZ ST Universal	100	25	188:08	8	1530	120:00	200	100
YZ ST Speed	En el modo de sinterización Speed del VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS es posible sinterizar restauraciones de hasta 4 piezas en menos de 60 minutos.							

VITA YZ® XT								
Nombre del programa	%	T0 °C	min.	°C/min.	T1 °C	min.	°C	%
YZ XT Universal	100	25	356:15	4	1450	120:00	200	100

VITA YZ® HT								
Nombre del programa	%	T0 °C	min.	°C/min.	T1 °C	min.	°C	%
YZ HT Universal	100	25	83:49	17	1450	120:00	200	100
YZ HT Speed	En el modo Speed del VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS es posible sinterizar restauraciones de hasta 14 piezas en 80 minutos.							

VITA YZ® T								
Nombre del programa	%	T0 °C	min.	°C/min.	T1 °C	min.	°C	%
YZ T Universal	100	25	88:32	17	1530	120:00	200	100
YZ T Speed	En el modo Speed del VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS es posible sinterizar restauraciones de hasta 14 piezas en 80 minutos.							

Parámetros de presecado al utilizar COLORING LIQUID/SHADE LIQUID								
Nombre del programa	%	T0 °C	min.	°C/min.	T1 °C	min.	°C	%
Pre-Dry	50	25	7:21	17	150	30:00	–	50

## Nota

- Todos los parámetros de programa para trabajar con los materiales VITA YZ T, VITA YZ HT, VITA YZ ST y VITA YZ XT ya están preinstalados en el software de las unidades de mando VITA vPad para el horno de sinterización VITA ZYRCOMAT 6000 MS/6100 MS.
- Para lograr una reproducción del color óptima, recomendamos el programa de sinterización Universal específico para el material en cuestión.
- Para la sinterización simultánea de distintos materiales está disponible el programa de sinterización "YZ One for all".
- En el programa de sinterización "YZ One for all" son posibles desviaciones mínimas del color, dado que los parámetros de sinterización no están perfectamente adaptados al material en cuestión.

## Atención:

- **Sinterización en el CEREC SpeedFire**
  - VITA YZ ST y VITA YZ HT están aprobados para la sinterización en el CEREC SpeedFire.
  - En este contexto, también las restauraciones de VITA YZ HT coloreadas con VITA YZ HT SHADE LIQUID pueden presecarse en el CEREC SpeedFire y sinterizarse a continuación.
  - Para el glaseado están permitidos exclusivamente los maquillajes en polvo VITA AKZENT Plus, el VITA AKZENT Plus GLAZE LT Powder y el VITA AKZENT Plus GLAZE LT Spray.
  - Siga las instrucciones de uso de CEREC SpeedFire a este respecto (Sirona Dental Systems GmbH).