

# Patienteninformation:

## Der sichere Weg zur sauberen Prothese

Liebe Patientin, lieber Patient,  
heute haben Sie Ihre neue Zahnprothese erhalten – vielen Dank für Ihr Vertrauen!  
Ihr Zahnersatz wurde individuell für Sie gefertigt und unterstützt Ihr natürliches Lächeln sowie einen hohen Tragekomfort. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Prothese haben und Ihre Mundgesundheit erhalten bleibt, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Tägliche Reinigung – Schritt für Schritt:

### 1. Spülen

Reinigen Sie Ihre Prothese morgens und abends gründlich unter fließendem, lauwarmem Wasser. So entfernen Sie Speisereste und beugen Ablagerungen vor.

👉 Tipp: Reinigen Sie Ihre Prothese am besten über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder legen Sie ein Handtuch hinein. Dies schützt Ihre Prothese, falls sie Ihnen beim Reinigen versehentlich aus der Hand gleitet.




### 2. Sanfte Reinigung

Reinigen Sie die Prothese anschließend vorsichtig mit

- einer weichen Zahnbürste
- und Flüssigseife oder Spülmittel

Spülen Sie die Prothese danach gründlich ab. Achten Sie besonders auf:

- Zahnzwischenräume
- Übergänge zum Zahnfleisch
- schwer erreichbare Bereiche

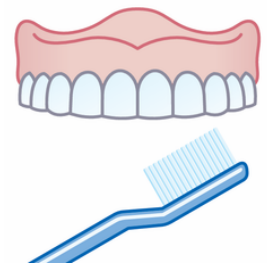

### 3. Reinigung in der Tiefe

Nach der täglichen Reinigung empfehlen wir, die Prothese in einem Glas mit lauwarmem Wasser aufzubewahren (ohne Reinigungstablette). Das hilft die Prothese feucht zu halten und somit Materialeigenschaften zu erhalten und Versprödungen vorzubeugen.



### 4. Vor dem Tragen

Spülen Sie die Prothese vor dem Einsetzen nochmals gründlich unter fließendem Wasser ab.





## Was Sie vermeiden sollten

VITA

Für eine lange Haltbarkeit Ihrer Prothese beachten Sie bitte:

- Harte Zahnbürsten – können die Oberfläche beschädigen
- Zahnpasta mit Schleifpartikeln – verursacht Kratzer
- Aufhellende Zahnpasta – macht die Oberfläche stumpf
- Sehr heißes oder kochendes Wasser – kann die Prothese verformen
- Aggressive Reinigungsmittel (z. B. Säuren oder Lösungsmittel)
- Unsachgemäßer Umgang – vermeiden Sie Stürze, insbesondere in harte Waschbecken

👉 Tipp: Reinigen Sie Ihre Prothese stets über weichem Untergrund (Wasser oder Handtuch).

## Wichtige Hinweise zur Anwendung

- Reinigen Sie Ihre Prothese täglich und regelmäßig
- Spülen Sie sie möglichst auch nach den Mahlzeiten kurz ab
- Bewahren Sie Ihre Prothese bei Nichttragen in Wasser auf
- Bei Veränderungen (z. B. schlechter Sitz, Beschwerden) wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt

## Hinweis für flexible Teilprothesen

Vor dem Einsetzen:

Legen Sie Ihre Prothese für bis zu 5 Minuten in warmes Wasser (max. 40 °C).

Das erleichtert das Einsetzen und schont die Klammern.



Die regelmäßige Reinigung sowie die Kontrolle durch Ihren Zahnarzt tragen wesentlich dazu bei, die Funktion und Ästhetik Ihrer Prothese langfristig zu erhalten.

Wir wünschen Ihnen stets einen guten Biss!

102080 -0726\_V04

## Ihr Ansprechpartner

Mit freundlicher Empfehlung Ihres Zahnarztes / Zahntechnikers



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany  
Tel. +49 7761 562-0 · Fax +49 7761 562-299  
Hotline: Tel. +49 7761 562-222 · Fax +49 7761 562-446  
[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com) · [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)  
 [facebook.com/vita.zahnfabrik](https://facebook.com/vita.zahnfabrik)