

VITAVM®9 for VITABLOCS® Programa de cocción

	Presec. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. aprox. °C	→ min.	VAC min.
Cocción de fijación de los colores de retoque VITA AKZENT Plus	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-
1ª Cocción de la personalización de VITA VM 9	500	6.00	7.49	55	930	1.00	7.49
2ª Cocción de la personalización de VITA VM 9	500	6.00	7.38	55	920	1.00	7.38
Cocción de glaseado VITA AKZENT Plus, VITA AKZENT Plus Glaze, VITA AKZENT Plus Glaze Spray, VITA AKZENT Plus finishing agent	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-
Cocción de glaseado VITA GLAZE LT Powder	500	4.00	3.30	80	780	1.00	-
Cocción de glaseado VITA GLAZE LT Paste	500	6.00	3.30	80	780	1.00	-
Cocción de corrección VITA VM 9 con COR	500	4.00	4.40	60	780	1.00	4.40

El resultado de la cocción de cerámica dental depende en gran medida de la conducción individual de la cocción por parte del usuario, es decir, del tipo de horno, de la posición de la sonda térmica, del soporte de la pieza, del tamaño de la pieza, etc.

Nuestras recomendaciones de uso técnico para la temperatura de cocción (independientemente de que se hagan de forma oral, de forma escrita o por medio de instrucciones prácticas) se basan en numerosos ensayos y en nuestra experiencia propia. No obstante, estas indicaciones deben entenderse sólo como valores indicativos.

En el caso de que no se consiga un resultado óptimo en cuanto a superficie, translucidez o nivel de lustre, debe adaptarse el proceso de cocción. Los parámetros decisivos para conducir el proceso de cocción son el aspecto y la calidad de la superficie de la pieza después de la cocción, y no la temperatura de cocción indicada en el aparato.

VITA shade, VITA made.

VITA