

VITA AKZENT Plus® Tabelle di cottura

POWDER cottura finale

BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, GLAZE SPRAY, BODY SPRAY, FINISHING AGENT, GLAZE LT

	Prees. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	ca. Temp. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITABLOCS MARK II	500	4.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA VM 7	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	-
VITA VM 9	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-	600*
VITA PM 9	500	4.00	3.30	80	780	1.00	-	500*
VITA VM 9 ADD-ON	500	4.00	3.30	80	780	1.00	-	600*
VITA VM 13	500	4.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VM 15	400	4.00	4.45	80	780	1.00	-	-
VITA TITANKERAMIK	400	4.00	4.00	80	770	1.00	5.00	400*
VITA VMK Master	500	4.00	5.15	80	920	1.00	-	-
Cottura finale GLAZE LT polvere	400	4.00	4.45	80	780	1.00	-	-

PASTE cottura finale

BODY STAINS, EFFECT STAINS, GLAZE, FINISHING AGENT, GLAZE LT

	Prees. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	ca. Temp. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
VITABLOCS	500	6.00	5.37	80	950	1.00	-	-
VITA VM 7	500	6.00	5.00	80	900	1.00	-	-
VITA VM 9	500	6.00	5.00	80	900	1.00	-	600*
VITA VM 13	500	6.00	4.45	80	880	1.00	-	-
VITA VMK Master	500	6.00	5.15	80	920	1.00	-	-
Cottura finale GLAZE LT Paste	400	6.00	4.45	80	780	1.00	-	500*

Cottura di fissaggio supercolori

	Prees. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	ca. Temp. °C	→ min.	VAC min.	↘ °C
Temperatura cottura ceramica ≥ 880 °C	500	4.00	4.23	80	850	1.00	-	-
Temperatura cottura ceramica < 880 °C	400	4.00	3.45	80	700	1.00	-	-

* Per l'ultima cottura è raccomandato il raffreddamento lento fino alla temperatura indicata.

Nei forni VACUMAT la posizione del lift deve essere > 75%.

VITA shade, VITA made.

VITA