

# Tabelle di cottura VITA In-Ceram in VITA INCERAMAT 3T

## VITA In-Ceram ALUMINA

### VITA In-Ceram ALUMINA – Strutture per corone / *Tecnica di stratificazione*

	Progr. Nr.	↗ 1	Temp 1	Tempo 1	↗ 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di sinterizzazione	4	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
Cottura di infiltrazione del vetro	5	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00

### VITA In-Ceram ALUMINA - Strutture per ponti / *Tecnica di stratificazione*

	Progr. Nr.	↗ 1	Temp 1	Tempo 1	↗ 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di sinterizzazione	4	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
Cottura di infiltrazione del vetro	6	0:03	200	0:00	0:30	1110	6:00

### VITA In-Ceram ALUMINA - Strutture per corone / *Tecnica di fresaggio*

	Progr. Nr.	↗ 1	Temp 1	Tempo 1	↗ 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di infiltrazione del vetro	7	0:03	200	0:00	0:30	1140	1:00

### VITA In-Ceram ALUMINA - Strutture per ponti / *Tecnica di fresaggio*

	Progr. Nr.	↗ 1	Temp 1	Tempo 1	↗ 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di infiltrazione del vetro	8	0:03	200	0:00	0:30	1140	2:00

### VITA In-Ceram ALUMINA – *Tecnica sprint*

	Progr. Nr.	↗ 1	Temp 1	Tempo 1	↗ 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di sinterizzazione	12	0:03	120	0:00	0:30	1120	2:00
Cottura di infiltrazione del vetro	13	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00



# VITA

# Tabelle di cottura VITA In-Ceram in VITA INCERAMAT 3T

## VITA In-Ceram SPINELL

### VITA In-Ceram SPINELL – Strutture per Inlay- Onlay

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Tempo 1	 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di sinterizzazione	1	0:03	120	0:00	2:00	1180	2:00

### VITA In-Ceram SPINELL – Strutture per corone

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Tempo 1	 2	Temp 2	Tempo 2
1. Cottura di sinterizzazione	2	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
2. Cottura di sinterizzazione	3	0:03	120	0:00	1:00	1180	2:00

## VITA In-Ceram ZIRCONIA

### VITA In-Ceram ZIRCONIA – Tecnica di stratificazione


	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Tempo 1	 2	Temp 2	Tempo 2
1. Cottura di sinterizzazione	9	6:00	120	0:00	2:00	1120	2:00
2. Cottura di sinterizzazione	3	0:03	120	0:00	1:00	1180	2:00
Cottura di infiltrazione del vetro	11	0:03	200	0:00	0:50	1140	2:30

### VITA In-Ceram ZIRCONIA – Tecnica di fresaggio

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Tempo 1	 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di infiltrazione del vetro	11	0:03	200	0:00	0:50	1140	2:30

### VITA In-Ceram ZIRCONIA – Tecnica *sprint*

	Progr. Nr.	 1	Temp 1	Tempo 1	 2	Temp 2	Tempo 2
Cottura di sinterizzazione	10	0:03	120	0:00	0:30	1180	2:00
Cottura di infiltrazione del vetro	13	0:03	200	0:00	0:30	1110	2:00

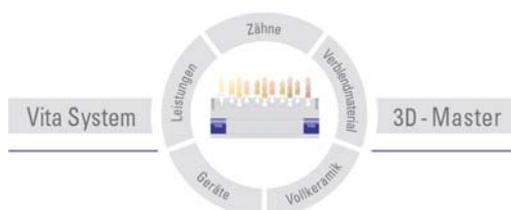

# VITA