



Software-Update downloaden, auf Memorystick kopieren und im Gerät installieren

1.) Download der Software

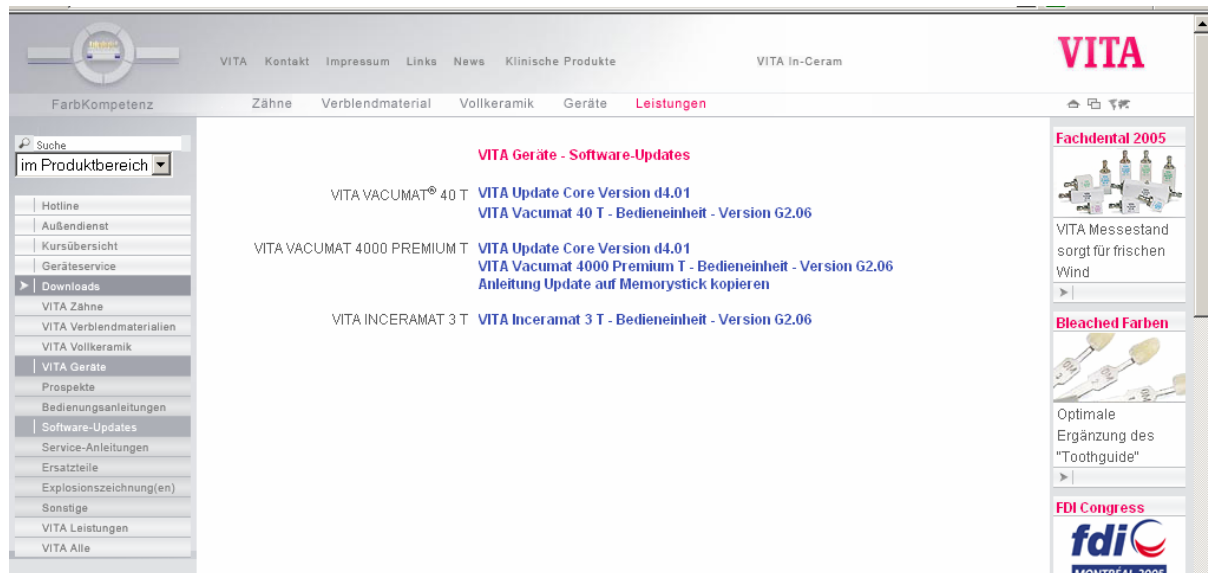


- Auswahl der gewünschten Software

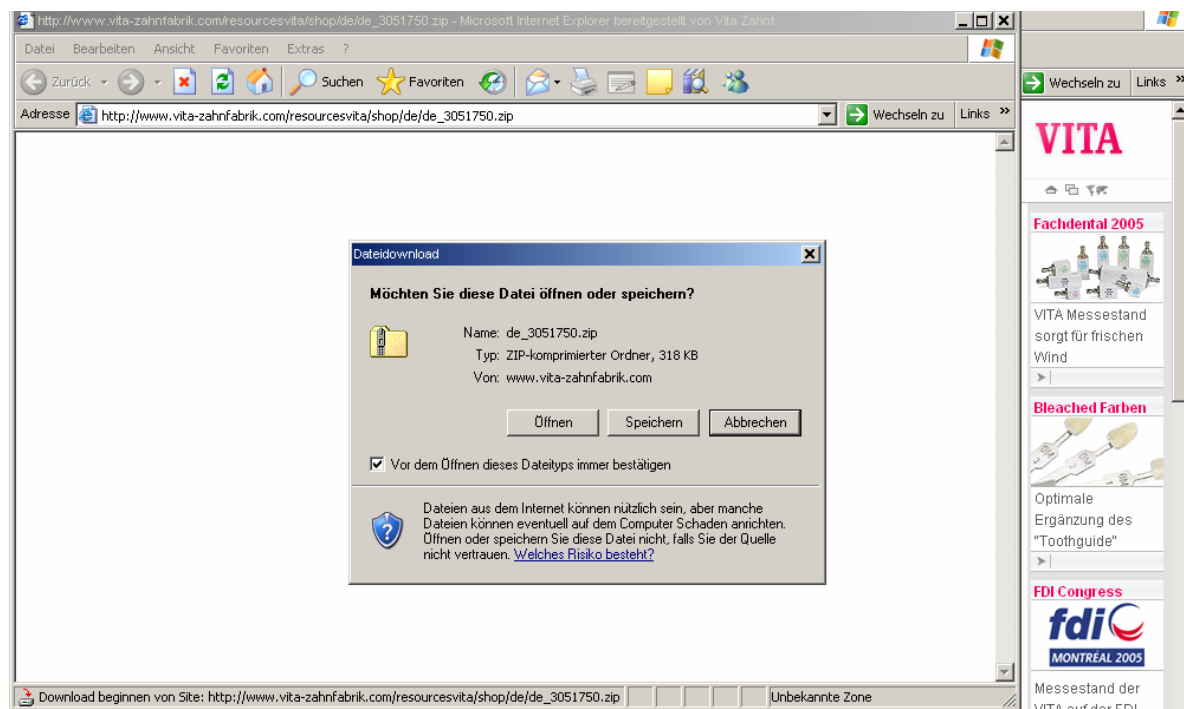


- Auswahl „Speichern“

Anleitung Software-Update downloaden, auf Memorystick kopieren und im Gerät installieren

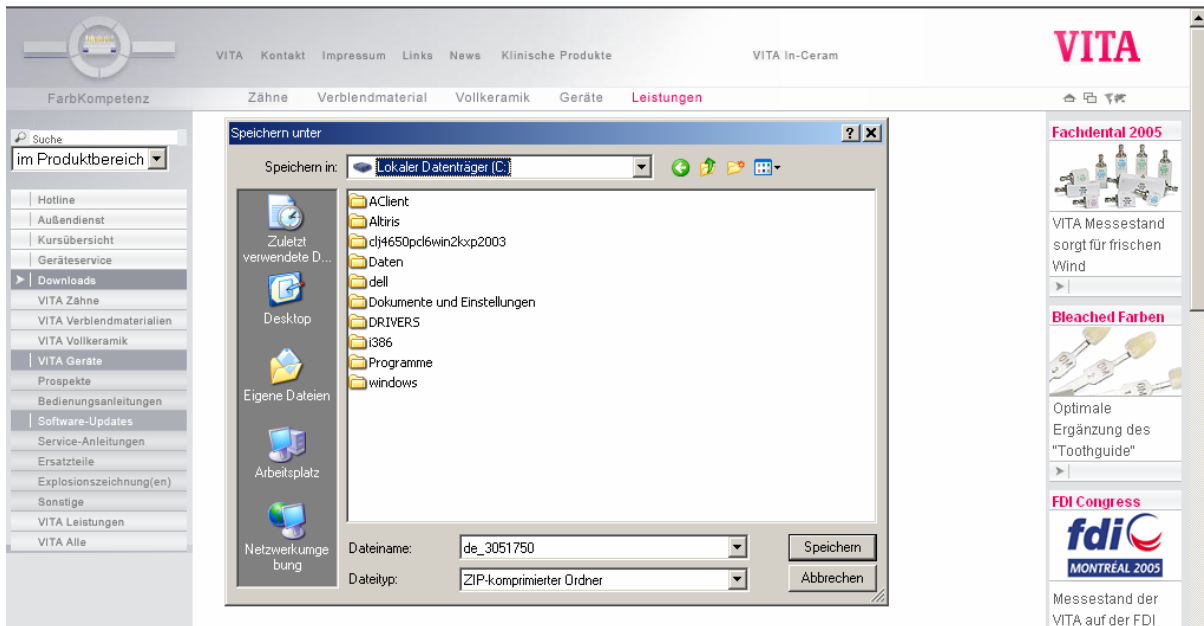


- Gewünschten Speicherort auswählen und „Speichern“ betätigen

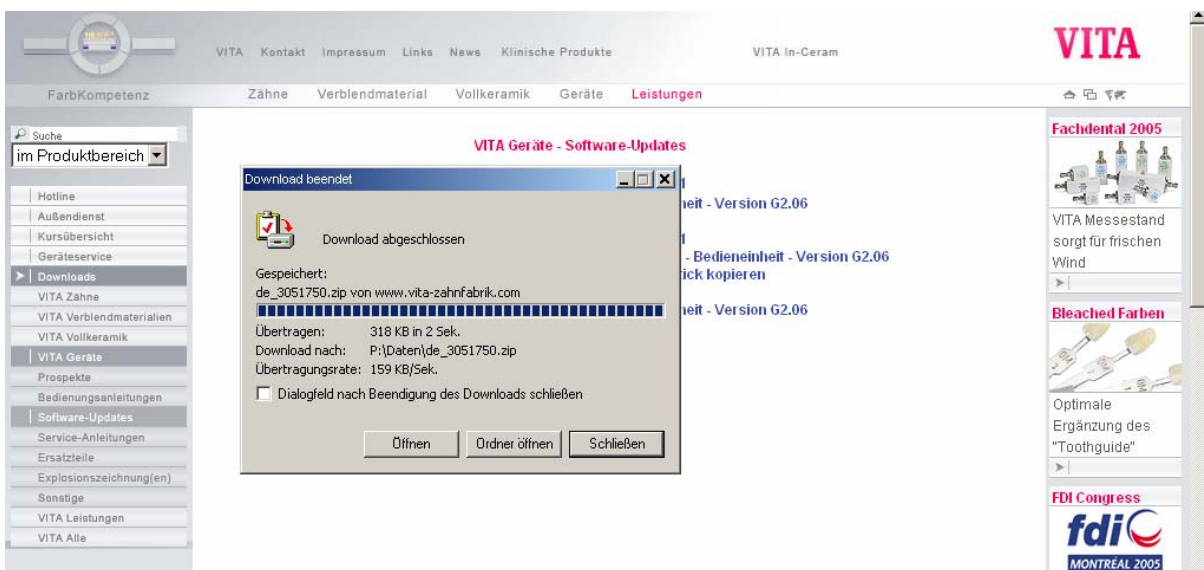


- „Öffnen“ auswählen


Anleitung Software-Update downloaden, auf Memorystick kopieren und im Gerät installieren

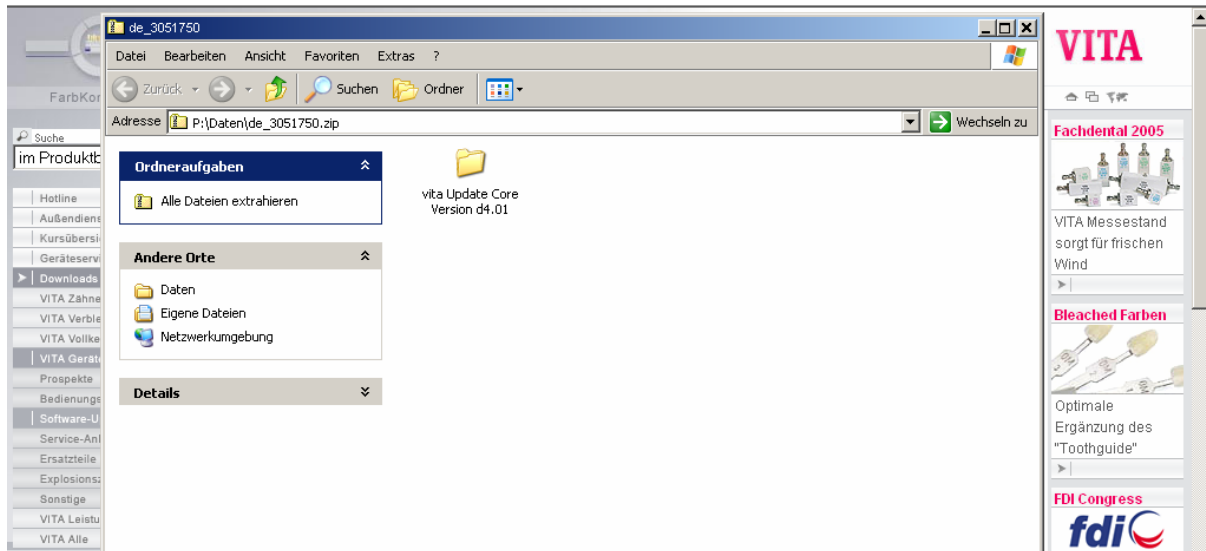


- Doppelklick auf Ordner

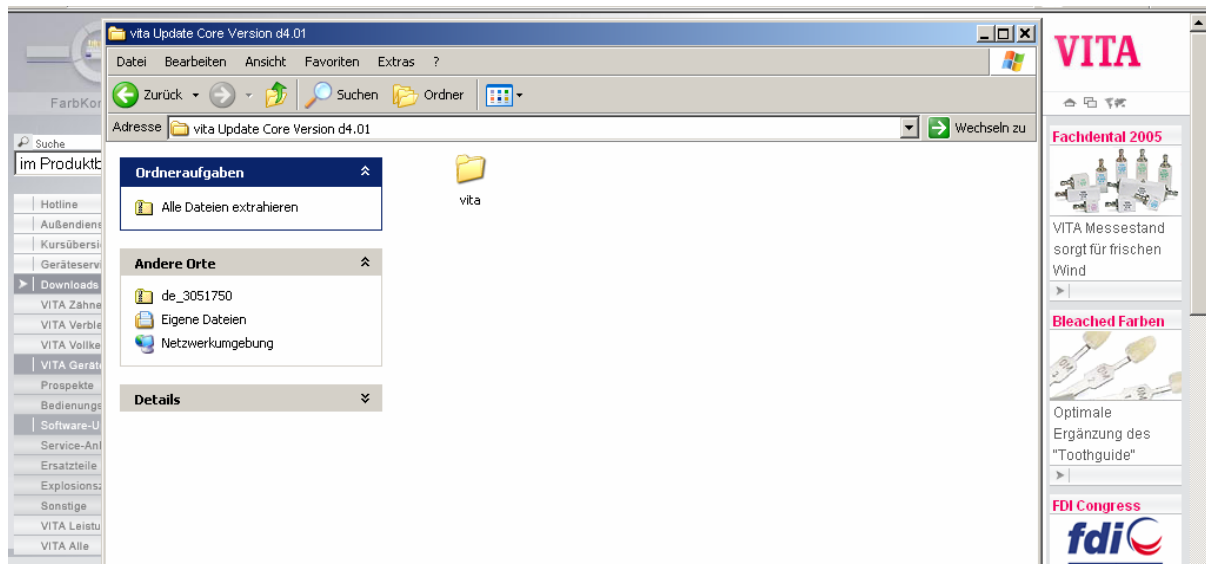


- Ordner „vita“ markieren, rechte Maustaste betätigen und „kopieren“ auswählen

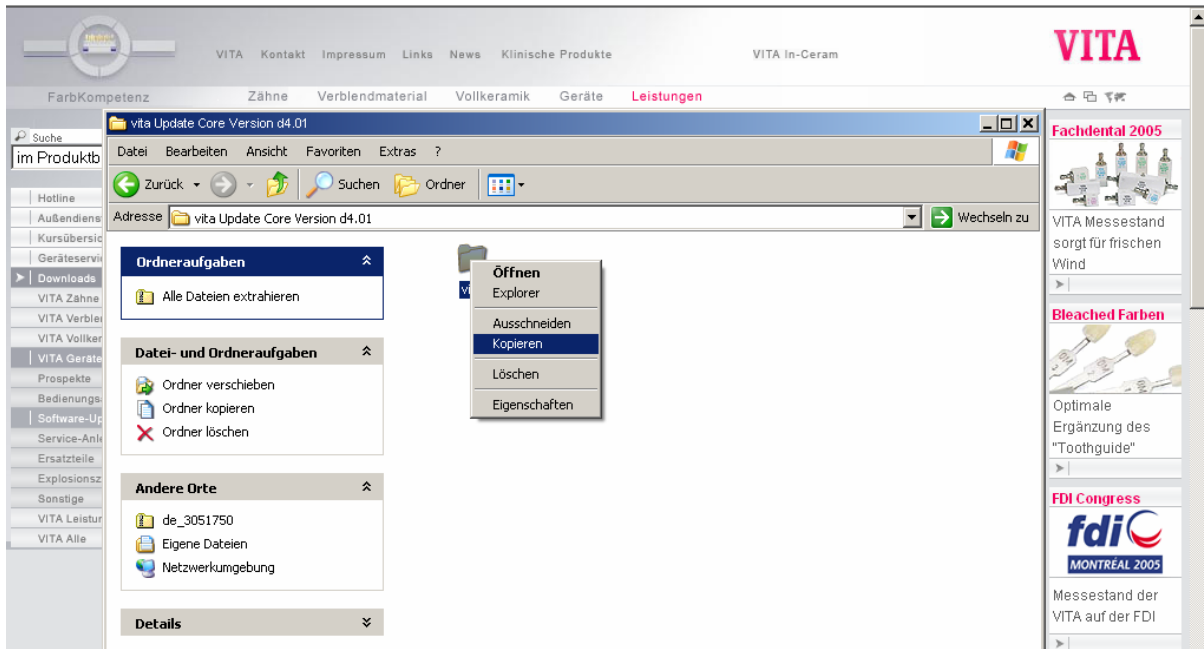

- Explorer öffnen

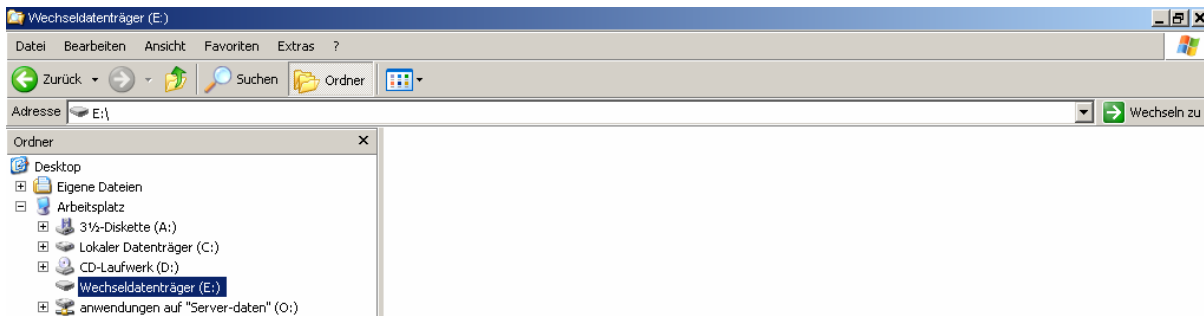


- Wechseldatenträger (E:) auswählen

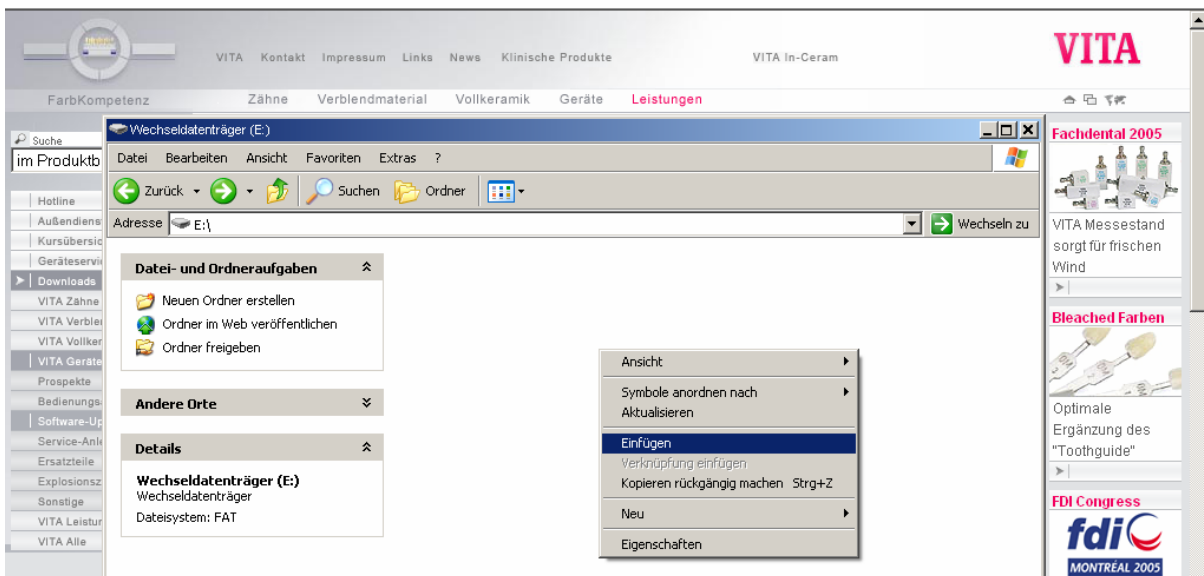


- rechte Maustaste betätigen, „Einfügen“ auswählen

- Kopiervorgang wird angezeigt

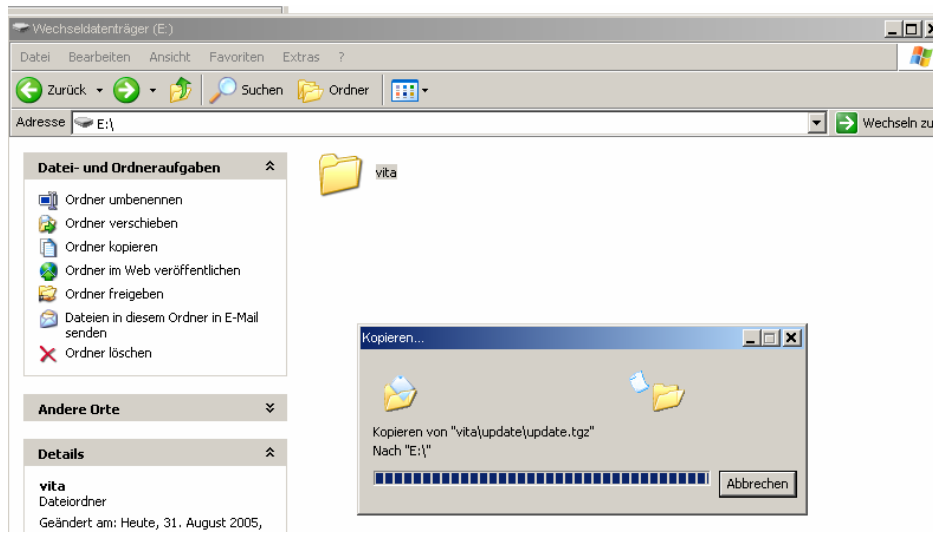

- Ordner „vita“ wurde auf Memorystick (Wechseldatenträger) kopiert:

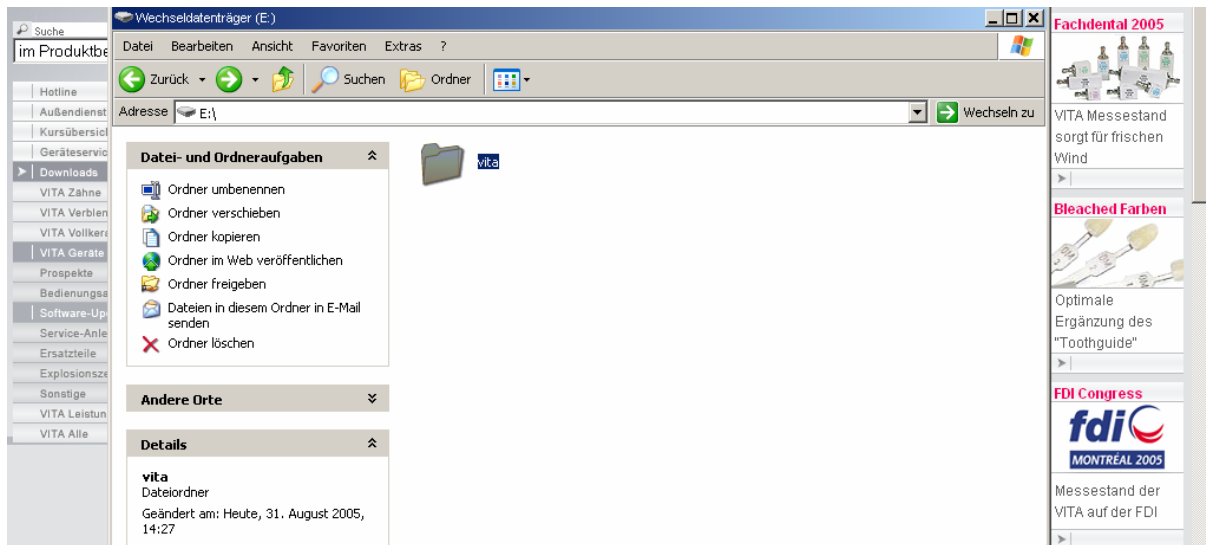

2.) Installation der neuen Software

- Gerät mit Hauptschalter ausschalten
- Memorystick einstecken
- Gerät mit Hauptschalter einschalten
- Taste "Service" betätigen
- Taste "Info" betätigen
- Taste "Update" betätigen, Software wird übertragen
- Nach Übertragung die Taste "OK" betätigen

