

VITA VM 13 im Multimat MC II

Progr.	Temp.°C Vorwärmen	Trocknen min	Vorw. min	Vac.	Brennen	Anstieg °C/min	Endtemp. °C
Washbrand Pulver	500	2	1	1,0	3,0	075	890°
Washbrand Paste	500	3	1	1,0	3,0	075	890°
Grundmasse Pulver	500	2	1	1,0	2,0	075	890°
Grundmasse Paste	500	3	1	1,0	2,0	075	890°
NEM Gerüste							
Washbrand Pulver	500	2	1	1,0	3,0	075	940°
Washbrand Paste	500	3	1	1,0	3,0	075	940°
Grundmasse Pulver	500	2	1	1,0	2,0	075	920°
Grundmasse Paste	500	3	1	1,0	2,0	075	920°
Margin Brand	500	5	1	1,0	3,0	050	890°
Effect Liner Brand	500	5	1	1,0	2,0	050	890°
1. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	050	880°
2. Dentinbrand	500	5	1	1,0	2,0	050	870°
Glanzbrand	500	1	1	0	2,0	080	880°
Glanz mit Glasurmasse	500	3	1	0	1,0	080	880°
Korrekturbrand COR	500	3	1	1,0	2,0	050	800°

Die Angaben sind Brennwerte, welche uns von Kunden übermittelt wurden. Eine Gewähr kann nicht übernommen werden.