

VITAVM®7 Brenntabelle

	Prog. Nr.	Vt. °C	→ min.	↗ min.	↗ °C/min	Temp. ca. °C	→ min.	VAC min.
MARGIN Brand	71	500	6.00	7.40	60	960	1.00	7.40
EFFECT LINER Brand	53	500	6.00	8.11	55	950	1.00	8.11
1. Dentinbrand	54	500	6.00	7.27	55	910	1.00	7.27
2. Dentinbrand	55	500	6.00	7.16	55	900	1.00	7.16
Malfarbenfixierbrand	56	500	6.00	3.00	100	800	0.00	-
Glanzbrand	57	500	0.00	5.00	80	900	1.00	-
Glanzbrand mit VITA AKZENT Plus Fluid	58	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-
Glanzbrand mit VITA AKZENT Plus Glaze	59	500	4.00	5.00	80	900	1.00	-
Korrekturbrand mit COR	60	500	4.00	6.00	55	830	1.00	6.00

Bei Dentalkeramiken hängt das Brennergebnis sehr stark von der individuellen Brandführung des Anwenders ab, d.h. unter anderem von der Art des Ofens, der Lage des Temperaturfühlers, dem Brenngutträger sowie der Größe des Werkstückes bei der Brandführung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen für die Brenntemperaturen (unabhängig davon, ob sie mündlich, schriftlich oder im Wege praktischer Anleitungen erteilt werden) beruhen auf zahlreichen eigenen Erfahrungen und Versuchen. Dennoch können diese Angaben nur als Richtwerte für den Anwender angesehen werden. Sollten Oberfläche, Transparenz oder Glanzgrad nicht dem unter optimalen Bedingungen zu erzielenden Brennergebnis entsprechen, ist die Brandführung dahingehend anzupassen.

Entscheidend für die Brandführung ist nicht die vom Gerät angezeigte Brenntemperatur, sondern das Aussehen und die Oberflächenbeschaffenheit des Brenngutes nach dem Brand.

VITA shade, VITA made.

VITA